

919 Quick Tray LC

Light curing resin for Individual custom tray

経済価格で新発売

プレート状に成型された光重合型トレーレジンは、
切削性が良く、印象材保持孔の穿孔も簡単です。
どなたでも簡単に、手早く個人トレーの製作ができます。

- 光照射するまで成型は自由自在。
- プレート状に成型されているため、粉末・液の計量や混和の手間が不要です。
- 揮発したモノマー、強い臭気、飛散パウダーを吸引する心配がありません。
- 切り取った余剰材料は、ハンドルの作製や追加修正などで再利用が可能です。



セール期間中は
1枚あたり
わずか
¥70

簡単・早い!!
安い!!

**初回
限定
200ヶ**

届出番号: 23B2X00017000241
919トレー-LC
サイズ: W100×H70mm 入数: 50枚
形状: 上下兼用プレート 色調: ピンク
標準価格 1ケース **¥4,500**

919トレー-LC新発売記念!!
PRICE DOWN
¥3,500
(200セット限定。期間: 2017.04.01 ~ 04.30迄)



EXA DENTAL TRAY HOLDER STAND 新発売

片側に同時に最大4個のトレーを保持できる印象トレーホルダーです。棚板は左右独立し、一枚ずつ取り外しが可能なのでトレーの柄の太さによって調整が可能です。

ほんのチョットとしたことで…印象精度は治療の成否を決定します。

硬化したアルジネート印象材は多量の水を含みます。その為、印象採得後に硬化物を外気中に放置すると硬化物から水分が蒸発して硬化物の形状が徐々に変化してしまいます。このような変形は印象精度の低下を招きます。更に、アルジネート印象材は印象採得後は直ちに石膏を注ぐのが理想ですが、この石膏を注入した印象材を保湿BOXに入れその中で石膏硬化を待つ事でより精度の高い石膏模型が得られます。寒天印象材メーカー(關オムニコ)さんのホームページにおきましても寒天印象材は乾燥すると収縮し、石膏の肌荒れの原因となるので密封容器に水で濡らしたタオルスポンジ等を敷き、湿度100%に近い中で硬化されることを推奨しています。



- ◀ - 保湿箱のご使用方法 - ▶
1. スポンジ又はカウンタークロスに水をきませて容器の中に敷いてください。
総合カタログ P18 掲載
 2. できるだけ速やかに石膏を注入し、しっかりと保湿BOXの蓋を閉め石膏を硬化させてください。



※エグザスタンド単品には画像のトレーは付属しません。

エグザスタンド
サイズ: W150×H162×D100mm
標準価格 1台 **¥1,500**

**限定
500
セット**

エグザスタンド新発売記念!!

今ならエグザスタンドをお求め頂きますと、「より高い精度のモデル造りの強い味方!!」1000円の保湿BOX1台と「トレークリーナー不要で印象材がスルッと取れる!!」大人気のアットレー6個、3,000円の3点をセットにして通常5,500円のところ半額以下の2,500円にてご提供致します。(500セット限定。期間: 2017.04.01 ~ 04.30迄)



エグザ セット

①アットレー アットレー-S上下×各1
アットレー-M上下×各1
アットレー-L上下×各1 **計6個**
総合カタログ P46 掲載 **¥3,000**

②エグザスタンド 1台 **¥1,500**

③保湿BOX 1台 **¥1,000**

合計 **¥5,500** PRICE DOWN



エグザセットが半額以下!! ¥2,500
のスペシャルセット
※セール期間におきましてもエグザスタンド単品でお求め頂けます。

■販売店名