

# 診療スタイルにあわせて 選べる2タイプの合着材

約**30**秒間

余剰セメントの除去可能時間

口腔内保持時間

**2分45秒**  
以上



接着性ガラスアイオノマー系レジンセメント

ジーシー  
フジルーティング EX

約**90**秒間

余剰セメントの除去可能時間

口腔内保持時間

**5分**  
以上



接着性ルーティングセメント

ジーシー  
ルーティング VErsa

パーサ



合着時の診療スタイルに着目し、合着臨床の効率化（待ち時間の使い方）をご提案。


シャープに硬化する「ジーシー フジルーティング EX」に加えて、

新たに時間的な安心感をもたせた「ジーシー ルーティング VErsa」をラインナップ。

フジルーティング EXを  
お使いの歯科医院の皆様へ

37°C下へ静置後の硬化特性の違い

最終硬化時間は、「フジルーティング EX」の口腔内セット後2分45秒に対し、「ルーティング VErsa」は5分と長く設定されています。このため「フジルーティング EX」と同様のタイミングで、余剰セメントの除去を行ったり、コア装着後の支台歯形成を行うと脱落することがありますので充分にご注意ください。

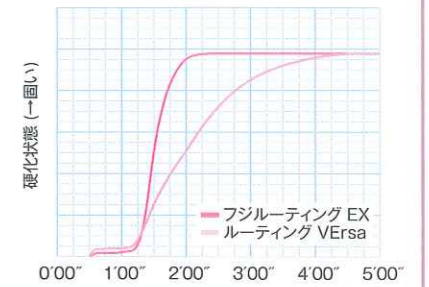

“合着臨床”の効率化をご提案

シャープな硬化特性により、早いタイミングで余剰セメントを除去。患者さんに対して負担が少なく、チェアタイムも短い

ジーシー  
フジルーティング EX

ゆっくり硬化する特性により、余剰セメントの操作余裕時間が長く、ゆとりをもって除去作業ができる

ジーシー  
ルーティング VErsa



※ VErsa (バーサ) は VERSATILE (融通が利く) という新しい発想から生まれた商品名です。 ※ 23°Cで練和開始からセットまでの操作余裕時間：フジルーティング EXは約2分、ルーティング VErsaは約4分です。

エコSTOPPERを使用  
1クリック (インレー)、2クリック (クラウン)

エコSTOPPERを用いることで、1クリックでインレー、2クリックでクラウンの適量 (目安) が採取可能。誰でも簡便・正確な計量操作で、より経済的に使用できます。



エコSTOPPER (別売) CDディスペンサーⅢ (別売) CDディスペンサーⅢのレバーに装着するだけでセット完了。



容易な練和操作と高い視認性

各ペーストは練和しやすいクリーミーなペースト性状。2色に色分けすることで、練和状態を視覚的に確認できます。また、歯質と余剰セメントの判別がしやすい色調設定にしています。



プラスチックヘラ (別売)




ピンクのプラスチックヘラ (No.4) は、インレー、クラウン、コアなどへ適量のペーストを塗布しやすい先端形状です。



世界の合着臨床で実績のある高い理工学的特性

世界の合着臨床で実績がある「フジルーティング EX」\*。「ルーティング VErsa」は、この「フジルーティング EX」と同レベルの高い歯質接着性、曲げ強さなど理工学的特性を発揮します。特に、被膜厚さは10μmと薄いため浮き上がりの無い合着を行うことができます。\*フジルーティング EXは海外仕様製品名「GC FujiCEM 2」です。

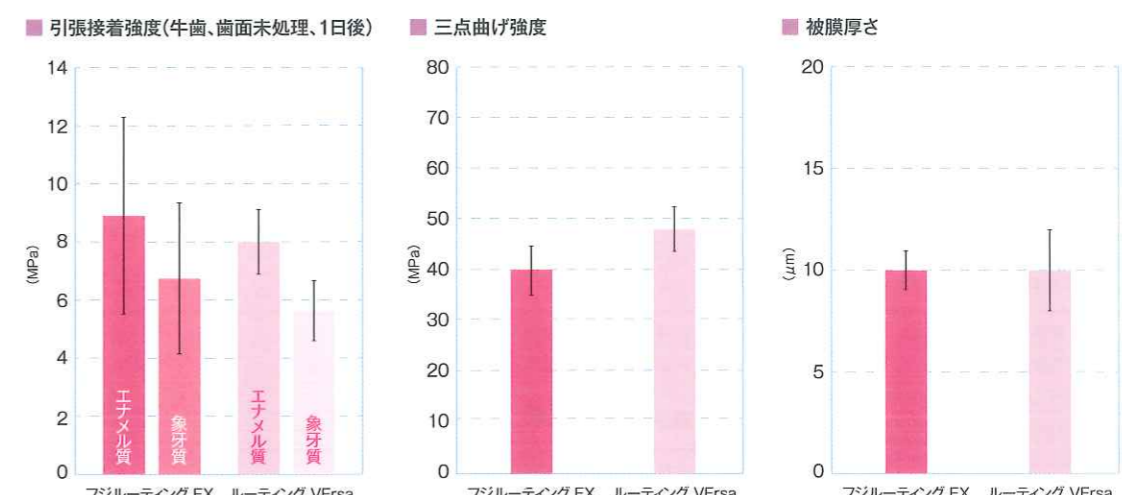



接着性ガラスイオンマー系レジンセメント

## ジーシー フジルーティング EX



色調●1色=ライトイエロー

包装・希望医院価格●1函：カートリッジ13.3g(7.2mL)2本、練和紙(No.22)1冊  
=¥10,000

管理医療機器 223AKBZX00077000

接着性ルーティングセメント

## ジーシー ルーティング VErSa <sup>バーサ</sup>



色調●1色=ホワイト

包装・希望医院価格●1函：カートリッジ12.0g(7.2mL)2本、練和紙(No.22)1冊  
=¥12,500

ジーシー ルーティング バーサ 管理医療機器 225AKBZX00150000

※ 歯面処理材(ジーシー フジルーティング コンディショナー)は使用できません。

「合着・接着」歯科用セメント 使い分けのすすめ		フジルーティング EX	ジーセム リンクエース
※ 接着力、経済性などを考慮した製品選択の目安です。		ルーティング VErSa	
メタル	インレー/アンレー	◎	○
	クラウン	◎	○
	ブリッジ	◎	○
	コア	◎	◎
	ポストコア	◎	◎
CAD/CAM ハイブリッドレジン	インレー/アンレー	—	◎ *1
	クラウン	—	◎ *1

\*1:セラミックプライマー II(1液性)

歯科接着用レジンセメント

### ジーシー ジーセム セラスマート



色調●4色=トランスルーセント、A03、  
A2、メタルコアオーバー  
包装・希望医院価格●1函：カートリッジ  
11.9g(7.2mL)2本、練和紙(No.22)1冊  
=¥15,000  
管理医療機器 226AKBZX00032000

歯科接着用レジンセメント

### ジーシー ジーセム リンクエース



色調●3色=A2、A03、トランスルーセント  
包装・希望医院価格●1函：シリンジ4.6g  
(2.7mL)2本、EMミキシングチップT 15  
個、EMミキシングチップF 5個、EMミキ  
シングチップ用ノズルRC 5個=¥9,600  
パリュールバック(5本入)  
色調●1色=A2  
包装・希望医院価格●パリュールバック1函シリ  
ンジ4.6g(2.7mL)5本、EMミキシングチップ  
T40個、EMミキシングチップF5個、EMミキ  
シングチップ用ノズルRC5個=¥21,600  
管理医療機器 225AKBZX00043000

## 関連製品

### ジーシー CDディスペンサーⅢ

〈使用方法〉



すべてのCDカートリッジ製品にご使用いただけます。カートリッジをセットします。

包装・希望医院価格●1函：1個=¥2,500  
一般医療機器 09B2X00010G00063



プッシュボール(押し棒)をカートリッジ中皿に突き当たるまでスライドさせます。



安全ツマミを回し、押し出し操作ができるようにします。



ストッパーをスライドさせ、押し出し量を決め、カートリッジのキャップを外して採取します。

### ジーシー CDディスペンサーⅢ エコストッパー



セットも簡単で1回の採取量が少量で経済的です。  
※フジルーティング EX、  
ルーティング VErSaのみ対応

包装・希望医院価格●1函：1個=¥640  
一般医療機器 09B2X00010G00063

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。  
※掲載の価格とジーシー研究所測定値の参考データは、2016年3月現在のものです。  
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

### プラスチックハラ



色調●2色=青、白  
包装・希望医院価格●1本(No.1)=¥130

色調●1色=ピンク  
包装・希望医院価格●1本(No.4)=¥130

### ジーシー フジルーティング CDプランジャー



フジルーティング EX、ルーティング VErSaのみ押し出しが手軽に行える軽量でコンパクトな専用のプランジャーです。オートクレープ滅菌が行えます。  
※本体重量25g:CDディスペンサーⅢの約1/5

包装・希望医院価格●1函：1個=¥1,300  
一般医療機器 13B1X00155000227

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

DIC(デンタルインフォメーションセンター) 支店  
お客様窓口 ☎0120-416480 ●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)  
http://www.gcdental.co.jp

営業所  
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286