

Chemical curing resin for Provisional restoration

Temp Quick

テンクイック



高精度・
高強度・高審美性
のテックが簡単に、手早くできる!!
MMAフリーで患者様に優しく
超低コストで先生にも優しい



簡単

スムーズな練和でカンタン! 臭い無し

従来よりの粉、液体タイプの常温重合レジンとは異なり、計量、混和、後片づけ不要。シリコン印象材のミキシングチップをカートリッジに取り付けてレバーを引くだけ、気泡の無い均一なレジンをすぐに得られます。



MMAフリー&低発熱
発熱量が少なく 刺激臭なしで患者様への負担低減

刺激臭のあるMMA(メチルメタアクリレート)を含みません。又、硬化時の重合発熱が40℃と粉液混和タイプの常温重合レジンと比べ大幅に低くなっており、患者様に不快な思いをさせません。

印象材を選ばなく、しかも速い

アルジネート印象材、シリコン印象材等あらゆる印象材を使用でき、テック製作時間は従来比の

1/2

【製作ステップ】



支台歯形成前の印象を採得します。アルジネート、シリコンどちらの印象材でもご使用頂けます。

支台歯形成後、水性分離材チャームセップを支台歯に塗布します。

テンクイック注入。30秒以内に印象(コア)を支台歯へ装着します。

口腔内装着後、約2分で瞬間修復物を支台歯から外します。(ペースト注入から約5分で完全硬化しますが硬化が進むと外れなくなる恐れがありますので必ず2分で外してください。

余剰部分を除去します。その後アルコールにて表面清掃を行います。

マージン部位研磨

完成

優れた物性

低収縮率で重合の時変形が少なく、高い曲げ強度で破折を減少。更に高い圧縮強度で長期間の口腔内装着にも最適です。

圧倒的なコストパフォーマンスを実現

テンクイックの便利さをご実感いただきたいので価格は他社製品の1/2~1/3を実現。

シェードカラーはA2とA3の2色をご用意致しました。どちらも50mlカートリッジ1本がなんと¥4,800。

美しいテックが簡単に!! 一度お使い頂ければもう手放せません。是非、お試しください。



驚きのプライズ!!
他社の
1/3

■テンクイック ●色調: A2・A3
●1箱: カートリッジ (50ml) 1本、ミキシングチップ×10本 (ミキシン SSS ショートタイプ)



50ml カートリッジ 1本で 何と、**4,800円** 標準価格