

石膏阻集器用硬化剤

# ANGEL CLEAN POLYMER

## エンゼル クリーン ポリマー

ドロドロに汚れるシンク下の掃除から解放されましょう！



吸水後



サラサラの顆粒状で  
使いやすい素材です。



石膏泥の水分を吸って  
湿った砂状になり回収  
しやすい！

キャップ付きアルミ容器入 NET 400g

定価 2,400 円 (税別)



## 石膏阻集器凝固剤 エンゼル クリーン ポリマー



キャップ付きアルミ容器入 NET 400g  
定価 2,400 円 (税別)

### 特 長

吸水性のポリマーが、石膏泥の水分をグングン吸い取って、おから状に変身させます。一度吸い取った水分は逃しません。

固まった石膏泥は石膏阻集器から簡単に取り出すことができます。

しっかり締まるキャップ付きアルミ容器入りで、余ったクリーンポリマーは次回の清掃時まで保管しておくことができます。



固まると団子状にしても崩れないハイレベルな高吸水性ポリマーを使用しています。

### 使用方法

1. 石膏阻集器内の上澄み液を捨てます。



2. 石膏泥全体にエンゼルクリーンポリマーを振り掛けてヘラ等で攪拌して下さい。



3. 水分が残っている場合は少しずつエンゼルクリーンポリマーを投入し、石膏泥がおから状になるまで攪拌して下さい。



4. シヤベルなどで簡単に処分できる状態になります。



石膏阻集器

### クリーンボックス・ミニ

定価 35,000 円 (税別)

#### 特 徴

- 石膏・ワックス・ゴミ・不快な臭いなどを除去します。
- 本体は半透明なので、外から汚れ具合が見られます。
- 設置、取り外し、掃除の簡単な親切設計
- ホースを側面に集める事により、本体以外に必要な容積をコンパクト化しました。

#### ◆仕様

サイズ : W310×H335×D240  
貯水量 : 約 10 ℓ  
本体重量 : 2 kg

#### ◆セット内容

本体・フタ・仕切り版 (3枚組)  
ホース上 (IN)  
ホース下 (OUT)  
IN側ホースジョイント  
OUT側ホースジョイント

#### ◆オプション

万能アダプター排水栓

販売元

## DAIEI Angel 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510c\*#8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026  
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市中千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897