



酵素洗淨剤

サイデザイム*

Johnson & Johnson

ASP[®]
CIDEZYME[®]



フタルール製剤やグルタラール製剤で高水準消毒を行う前に、
蛋白質・有機物を分解するために使用する酵素洗淨剤です。
タンパク分解酵素配合のサイデザイムは器具等に付着した有機物に
浸透して分解し、すみやかに汚れを取り除き、消毒の効果を高めます。

SHOFU INC.



特 長

- タンパク分解酵素入りなので、器具等に付着した蛋白質・有機物を分解します。
- 浸漬後、約1分で汚れが浮き上がりはじめ、効果があらわれます。
- 室温で有効なため、温水を使用する必要がありません。
- 材質に影響を与えにくい洗浄剤です。
- 専用ポンプ*により、溶液の調整を容易に行うことができます。

※専用ポンプは、製品には含まれておりません。
 専用ポンプをご希望の方は、お出入りの歯科商社にお申し出ください。

使用方法

1. サidezaim® 1Lボトルの場合：
 専用ポンプで1プッシュ(8mL)のサイdezaim®を、1Lの水で希釈します。
 サidezaim® 5Lボトルの場合：
 専用ポンプで2プッシュ(40mL)のサイdezaim®を、5Lの水で希釈します。
 (乾燥した有機物が付着している場合は、サイdezaim®を倍量加えて下さい。)
2. 使用後の器具はただちにサイdezaim®に浸漬し、すべての有機物が溶解あるいは取り除かれるようにして下さい。浸漬後、約1分で効果があらわれます。乾燥した有機物が付着したものは、浸漬時間を延長して下さい。
3. サidezaim®に浸漬した器具を水で十分に洗浄し、水切りを行なって下さい。
4. これで高水準消毒あるいは滅菌の準備ができました。



[包装・価格]
 1L…¥3,785 5L…¥12,235

価格は2013年10月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は製品に記載の注意事項をよく読んでお使いください。

*商標

取扱い店

輸入元 **ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社**
 〒101-0065 東京都千代田区西神田3丁目5番2号 ☎ 03-4411-7215

世界への歯科医療に貢献する **株式会社 松風** ●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代) http://www.shofu.co.jp
 ●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595
 1310AJJSI