

CAD/CAM用ハイブリッドレジンブロック

ARTESANO

アルテサーノ

ナノフィラー配合により優れた研磨性を有し、艶出しが容易!!

従来のSサイズに加え **Mサイズ**を新発売!!


色調には、**A1・A4**を追加!!

ラインナップがさらに充実!!



【物性】


3点曲げ強さ [MPa]	195
2軸曲げ強さ [MPa]	230
圧縮強さ [MPa]	526
ビッカース硬度 [Hv]	71
蛍光性	あり

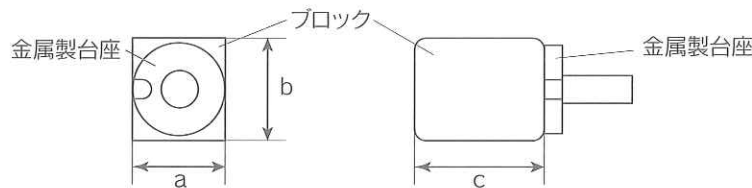


種類	サイズ a×b×c(mm)	色調	容量	標準価格(税抜)
Sサイズ	10×12×15	A1・A2・A3・A3.5・A4	5個入 / 箱	¥15,000
Mサイズ	12×14×18			¥17,000

支台歯形成のポイント(小臼歯)

■形成の注意点

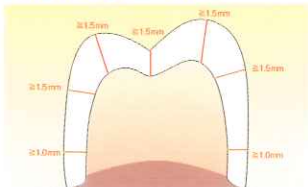

咬合面は1.5mm以上、マージン部は1.0mm以上の厚みをご確認ください。


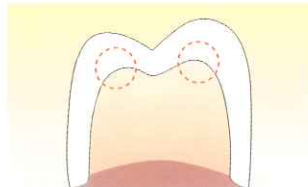


隅角は丸みを付けなめらかにしてください。

■マージン形成

(ディープシャンファー)

(ラウンドショルダー)

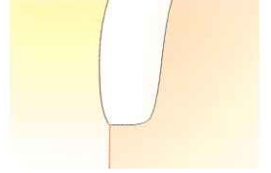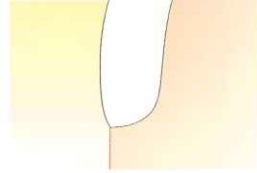


マージン形成はディープシャンファーやラウンドショルダーとしてください。


装着のポイント



①プラスト処理
0.1~0.2MPaの圧力で約30~70μmのアルミナ粒子を用いたサンドプラスト処理します。

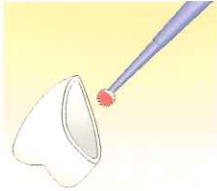


②リン酸処理
試適後は、クラウン内面をリン酸等で洗浄し、水洗・乾燥します。

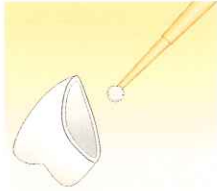

③表面処理
クラウン内面をシランカップリング処理します。



④支台歯処理
支台歯処理は、使用するセメントの説明書に従って行ってください。

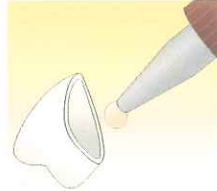

⑤セメント塗布
クラウン内側にCAD/CAM用ハイブリッドレジンブロック対応のレジンセメントを塗布します。



⑥光重合
適法に従って重合してください。

アルテサーノ — 研磨ステップ —

①コネクタークット及び形態修正

山八技工用カーバイドバー(クロスカット)

歯科技工用カーバイド切削器具

23B1X10001C09069

一般医療機器

■ファインシリーズ



最大回転数 20,000rpm

包装単位 10本入セット(各形態 各1本)
単品(1本/ケース)

標準価格 ¥18,000
標準価格 ¥2,000

②中仕上げ研磨

ニューシリコンポイントII

歯科用ゴム製研磨材 金属・レジン中研磨用ポイント

23B1X10001C09049

一般医療機器



形状	#10 #13 #13S #28 #114 #162 #カップ #シリンダー
種類	中仕上用ブラウン・仕上用グリーン (#シリンダーはブラウンのみ)
回転数	30,000rpm以下 (#162・#シリンダーは15,000rpm以下)
包装単位	12本入/箱 標準価格 ¥1,500 72本入/箱 標準価格 ¥8,000
	#シリンダー 72本入/箱 標準価格 ¥3,600 (専用マンドレル1本付)

※13Sブラウン推奨

※シリンダーは72本入/箱のみとなります。

③艶出し研磨

ジルコスター

歯科用研磨器材

13B1X10089000958

一般医療機器



製造販売元 (株)マイクロテック

【特徴】

ダイヤモンド粒子配合で、ジルコニア・ポーセレン・ハイブリッド硬質レジンの艶出しが早くなります。

包装単位 20g 標準価格 ¥9,000

バンピネスブラシ

歯科用研磨器材

23B1X10001C09018

ロビンソンブラシ凹凸型 一般医療機器



【特徴】

歯間から咬合面までくまなく密着するため、効率的な研磨ができます。

種類 ソフト(#9・#11)
レギュラー(#9・#11)
包装単位 12本入/箱
標準価格 ¥1,500

※レギュラー推奨

ホイールパフ#2

歯科用研磨器材

23B1X10001C09061

一般医療機器



材質 セーム皮
サイズ 作業部直径φ22mm
包装単位 12本入/袋
標準価格 ¥2,200

④さらに艶を出したい場合

ブルーシャイン

歯科用研磨器材

23B1X10001C09009

歯科技工用艶出しペースト研磨剤



包装単位 50g 300g
標準価格 ¥700 ¥3,800

ホイールパフ#1

歯科用研磨器材

23B1X10001C09061

一般医療機器



材質 フェルト
サイズ 作業部直径φ22mm
包装単位 12本入/袋
標準価格 ¥800

※艶出し研磨工程には低速での研磨を推奨致します。

山八歯材最新情報はホームページで... ~健康は歯から~ (お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております)

www.yamahachi-dental.co.jp/

●ご用命は...



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL (0533) 57-7121 FAX (0533) 57-1764

Home Page http://www.yamahachi-dental.co.jp/

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp