

PQ+ パワークイック

超音波洗浄機用洗浄剤

アルカリ性

医療器具の
超音波洗浄に

特に大型・強力超音波洗浄機にお勧め！



成分：水酸化ナトリウム、カルボン酸塩
性状：外観・・・無色～微黄色・透明液体

特徴

● 洗浄力に優れています。

アルカリ剤の作用で、器具に付着した血液・体液などのタンパク質や脂質を速やかに除去します。キレート剤が、洗浄水を軟水化し、洗浄効率を高めます。

● 無泡性です。

無泡性のため、超音波洗浄機での使用に最適で、すすぎ性にも優れています。

● スケールが残りません。

スケールが残らないので、洗浄槽を衛生的に保てます。

使用方法

① 超音波洗浄槽に水で0.5%希釈液を調製します。

※推奨使用濃度 0.5% (10Lの水に対し50mL)

※汚れの程度により0.2～0.5% (10Lの水に対し20～50mL) の間でご使用ください。



② 医療器具をセットします。

※分解可能な器具は分解し、鉗子などは開いた状態にしてセットしてください

※内腔のあるものは洗浄液を注入または吸引して内腔に洗浄液が行き渡るようにしてください。



③ 洗浄機の操作法に従い、10～15分間超音波洗浄してください。

④ 器具を取り出し、流水で十分にすすいでください。

※洗浄液は最低1日1回交換してください。

※洗浄液の汚染が激しいときはその都度交換してください。



品名	内容量 / 規格	1コ標準価格 (税抜)	1コ梱入数	JANコード
パワークイック 超音波洗浄機用洗浄剤 アルカリ性	4L	8,700円	3	49-87696-50339-7

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

販売代理店 株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里 2-2-8
TEL.06-6797-2525

ご用命は

