

MORITA

双眼ルーペ

ワイナビュー® マルチルーペ・ウイングフレーム

倍率、作業距離が変更できるルーペとフィット感を重視した超軽量なフレームのセット



Thinking ahead. Focused on life.

Features

ワイナビューマルチルーペ

- ルーペを回転させることで倍率の変更が2.5X~3.0Xで可能(倍率に応じて作業距離、視野直径は変わります。)
- ルーペ本体は取付バーとあわせて36gと軽量でワイナビューウイングフレームと組み合わせた総重量も64gと非常に軽量
- ルーペの光軸を作業距離に合わせて調整可能



0回転 1回転 1.5回転 2回転

	倍率	作業距離	視野直径
0回転	2.5X	500mm	140mm
0.5回転	約2.6X	450mm	125mm
1回転	約2.8X	400mm	110mm
1.5回転	約2.9X	350mm	95mm
2回転	3.0X	300mm	80mm




接眼レンズが大きい(φ13.8mm)ので、視野が明るい。



レンズキャップ
ルーペレンズを保護します。

[ルーペの合わせ方]

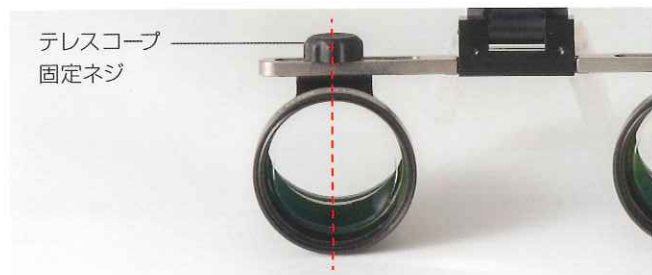

テレスコープ
固定ネジ



①瞳孔間距離(PD)調整

テレスコープ固定ネジを少し緩め、使用者の瞳孔間距離に設定します。

②瞳孔間距離の微調整

片目で物体を観察し、影が見えているようならその方向へ瞳孔間距離を微調整し、影の見えなくなった位置でネジを固定します。もう一方の目でも、同様に微調整を行った後、今度は、両眼で観察し、左右に影のないことを確認して、しっかりネジを固定します。



③作業距離と倍率の調整

瞳孔間距離を調整後、作業距離と倍率を設定します。ルーペ先端部をCに回すと倍率が高くなり、作動距離が短くなります。Dに回すと倍率が低くなり、作動距離が長くなります。



④ルーペ光軸角度(視野方向)の調整

作動距離に合わせてルーペ角度光軸(視野方向)の調節します。

ワイナビューウイングフレーム

新開発の超軽量な日本人に合ったフレーム。ウイングによりフィット感に優れ安定します

ヒンジ

ルーペの角度を常に一定の位置に戻せるシングルヒンジとメガネと併用の時におすすめのマルチヒンジがあります。また、LEDライトの取付も可能です。



シングルヒンジ

マルチヒンジ

ウイング
額にフィットすることで安定します。



メガストッパー
フレームのズレを防止します。サポートコード止め位置の調整が可能です。

サポートコード

シールド
メガネ使用時には簡単に取り外しが可能です。

マルチルーペ



レンズキャップ

ノーズパット

長時間の使用に耐えるクッション性の高いノーズパット。また、眼に対するルーペの高さを簡単に調整できます。スタンダード、メガネ併用型の2種類があります。



受け部

(三段階高さ調整可)

①
②
③

スタンダード

①
②
③

メガネ併用型

ノーズパッドは眼鏡の内側に挿入します。

Specifications

ワイナビュー マルチルーペ ウイングフレーム シングルヒンジセット / マルチヒンジセット
標準価格: 139,000円 206720580 / 206720581

商品構成:

・ワイナビューマルチルーペ×1 ・ワイナビューウイングフレーム×1 ・シールド×1組 ・ノーズパット スタンダード、メガネ併用×各1
・メガストッパー×1組 ・サポートコード×1 ・レンズクロス×1 ・ケース×1 ・ホギードライバー×1 ・レンズキャップ 透明×1組

フレームカラー全7色



B ブラック

C カーボン

R レッド

S シルバー

W ホワイト

CG クリアーグレイ

CR クリアーレッド

販売名:ワイナビュー マルチルーペ 一般名称:双眼ルーペ 医療機器届出番号:13B1X00268000175 医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)
販売名:ワイナビュー ウイングフレーム 一般名称:双眼ルーペ 医療機器届出番号:13B1X00268000174 医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)

〈別売品〉

ワイナー MINI LEDライト (電池式)

軽量の電池式モデル

LEDライトにも軽さを求める先生におすすめ
中間スイッチで光量を
切り替えることができます。



電池:単3乾電池×3本または、充電式ニッケル水素電池×3本
電源コード:約140cm(バッテリーケースと接続)
質量:約9g(LED本体のみ)
照度@30cm:20,000ルクス~@40cm:12,000ルクス
標準価格:95,000円 206720065

ワイナー LEDライト YNA-II-4.5 (電池式)

27,000ルクスの高出力モデル
明るさと電池式の手軽さを両立
中間スイッチで光量を
切り替えることができます。



電池:単3乾電池×3本または、充電式ニッケル水素電池×3本
電源コード:約140cm(バッテリーケースと接続)
質量:約20g(LED本体のみ)
照度@30cm:27,000ルクス~@40cm:15,000ルクス
標準価格:115,000円 206720059

〈LEDライト使用例〉 付属のマグネットボタンをヒンジに取り付けLEDライトを装着します。



装着前

マグネットボタン取り付け

LEDライト装着

販売名:ワイナー MINI LEDライト 一般的名称:額帯灯 医療機器届出番号:13B1X00268000141 医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)
販売名:ワイナー LEDライト 一般的名称:額帯灯 医療機器届出番号:13B1X00268000112 医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)



発売

株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

製造販売 株式会社キラー・アンド・ワイナー 東京都文京区本郷3-35-3 本郷UCビル

お問合せ お客様相談センター T 0800. 222 8020(フリーコール)
※歯科医療従事者様専用

Morita Global Site: www.morita.com

More Infos about Products: www.dental-plaza.com

標準価格の後の数字は品目コードです。
掲載商品の標準価格は、2017年11月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
ご使用に際しましては、製品の添付文書および取扱説明書を必ずお読みください。
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

PUB NO. M207.2648.1.000.1710.72.000JJ.JPC/JPC 208520072

Diagnostic and Imaging Equipment

Treatment Chair Units

Treatment Equipment

Handpieces and Instruments

Endodontic System

Laser Equipment

Laboratory Devices

Educational and Training Systems

Auxiliaries