

NEW

# IPS Style®

メタル築盛用陶材 IPS スタイル

# MAKE IT YOUR! STYLE

“ハツ” とする “鮮やか” な発色

今までにない 美しさ



ivoclar  
vivadent®  
passion vision innovation

# MAKE IT YOUR STYLE.

Ivoclar Vivadentのメタルセラミックスの歴史は、1976年から始まりました。それから40年、製品開発により技工の材料、技術も大きく進歩しています。常にその変化にチャレンジし続ける技工の世界において、変わらないメタルセラミックスの技術工程を、Ivoclar Vivadentがより簡便にし、日々の作業効率向上をお手伝いします！増えた時間は、あなたの新しいチャレンジに！

## MAKE IT FAST.

高いぬれ性と低収縮。だから焼成回数を最低限に。

従来のPFM陶材



IPSスタイル



Ivoclar Vivadent R&D, Schaan, 2015

オペークと築盛陶材の化学組成をマッチさせ、ぬれ性を向上させました。そのため焼成後、安定した結果が得られるとともにガラスセラミックスの配合、粒子サイズの分布により焼成後の収縮を抑え、築盛時の形態を保ちます。その結果、焼成回数も抑えられます。

### 時短陶材

IPS スタイル セラム One



たった一層で最終デザインまで。少量の補足築盛とIPS イボカラーによるステイン焼成で仕上げます。

IPS スタイル セラム Powder オペーカー



870°Cで焼成する Powder オペーカーは、短時間での焼成が可能です。高密度に含有するオキシアパタイトで効率的に金属色を遮蔽します。

## MAKE IT EASY.

### あらゆるフレームに対応



アナログからデジタルまで、あらゆる金属材料に対応します。

CTE値  
 $13.8-15.2 \times 10^{-6}/K (25-500^{\circ}C)$

### 合わせやすいシェードシステム



IPS スタイルのシェードコンセプトは、IPS e.max システムと同じです。口腔内で2つのシステムの修復物が混在しても統一感のある結果が得られます。

### 築盛のしやすさ




築盛方法は一般的な築盛ステップと同じです。しかし、IPS スタイルでは、簡単なハンドリングを目指しました。IPS e.max セラムと共用のビルドアップリキッドで同じシェードを使用すれば、築盛初心者でも簡単に築盛でき、エキスパートと同様の結果が得られます。

IPS スタイル 組合わせ表

IPS スタイル セラム																																								
A-D	BL1	BL2	BL3	BL4	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4																				
IPS スタイル セラム Powder オペーカー	O BL1/BL2		O BL3/BL4		O A1	O A2	O A3	O A3.5	O A4	O B1	O B2	O B3	O B4	O C1	O C2	O C3	O C4	O D2	O D3	O D4																				
IPS スタイル セラム インテンシブ Powder オペーカー					IO ホワイト		IO バイオレット			IO ブラウン		IO インサイズル																												
IPS スタイル セラム マージン	M BL				M 1	M 2	M 3	M 4	M 7	M 1	M 2	M 4	M 4	M 5	M 6	M 6	M 7	M 5	M 3	M 6																				
IPS スタイル セラム インテンシブ マージン					IM イエロー			IM オレンジ・ピンク		IM オレンジ		IM オペーク																												
IPS スタイル セラム ディープ デンチン	DD BL1/BL2		DD BL3/BL4		DD A1	DD A2	DD A3	DD A3.5	DD A4	DD B1	DD B2	DD B3	DD B4	DD C1	DD C2	DD C3	DD C4	DD D2	DD D3	DD D4																				
IPS スタイル セラム デンチン	D BL1	D BL2	D BL3	D BL4	D A1	D A2	D A3	D A3.5	D A4	D B1	D B2	D B3	D B4	D C1	D C2	D C3	D C4	D D2	D D3	D D4																				
IPS スタイル セラム インサイズル	I BL				I 1	I 2	I 3	I 4	I 5	I 1	I 2	I 3	I 4	I 2	I 3	I 4	I 5	I 2	I 3	I 4																				
IPS スタイル セラム アドオン	A-O BL				A-O 690°			A-O インサイズル		A-O デンチン		A-O マージン																												
IPS スタイル セラム インパルス	オクルーザル デンチン		OD オレンジ		OD ブラウン		マメロン			MM ライト		MM イエロー・オレンジ		MM サーモン		オパール エフェクト				OE 1		OE 2		OE 3		OE 4		OE 5		OE バイオレット		インサイズル エッジ		インサイズル エッジ						
	トランSPA		T ニュートラル		T クリアー		T ブルー		T ブラウン・グレイ		T オレンジ・グレイ		スペシャル インサイズル		SI イエロー		SI グレイ		インター インサイズル		II ホワイト・ブルー		サーピカル トランSPA		CT イエロー		CT オレンジ・ピンク		CT カーキ		CT オレンジ									
IPS スタイル セラム ジンジバ	ジンジバ オペーカー		GO ピンク		ベーシック ジンジバ		BG34		ジンジバ		G1		G2		G3		G4		G5		インテンシブ ジンジバ		IG1		IG2		IG3		IG4		IG5									
IPS イボカラー エッセンス	E01 ホワイト		E02 クリーム		E03 レモン		E04 サンセット		E05 コッパー		E06 ヘーゼル		E07 オリーブ		E08 カーキ		E09 テラコッタ		E10 マホガニー		E11 カプチーノ		E12 エスプレッソ		E13 テラ		E14 プロファンD		E15 オーシャン		E16 サファイア		E17 アンズラサイト		E18 ブラック		E19 ローズ		E20 コーラル	
									E21 ベーシック レッド				E22 ベーシック イエロー				E23 ベーシック ブルー																							
IPS イボカラー シェード	シェード 0				シェード 1		シェード 2		シェード 3		シェード 4		シェード 5		シェード 6		シェード 7		シェード 6																					
					シェード インサイズル 1				シェード インサイズル 2				シェード インサイズル 3																											
IPS スタイル セラム One																																								
A-D	BL1	BL2	BL3	BL4	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4																				
IPS スタイル セラム Powder オペーカー	IO white	O BL1/BL2	O BL3/BL4		O A1	O A2	O A3	O A3.5	O A4	O B1	O B2	O B3	O B4	O C1	O C2	O C3	O C4	O D2	O D3	O D4																				
IPS スタイル セラム One	One BL				One 1	One 2	One 3	One 4	One 7	One 1	One 2	One 4	One 4	One 5	One 6	One 6	One 7	One 5	One 3	One 6																				

# MAKE IT NATURAL.


焼成しても安定したシェードと透過性

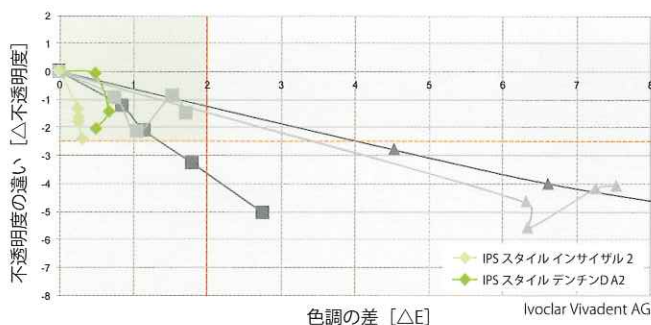

一般的に、焼成を繰り返すことで透過性が上がり、色調変化が大きくなります。

オキシアパタイトを含むIPS スタイルの場合、焼成後の色調、透過性の変化はわずかなのがわかります(図)。

深部からの輝き オキシアパタイト

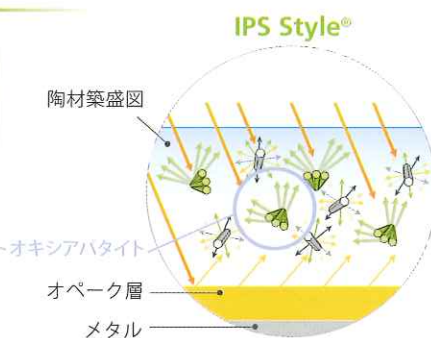

新開発されたオキシアパタイトは、光の反射で不透過性をコントロールします。オペーク層に多く配合されたこのオキシアパタイトにより、修復物に深部から輝きを与えます。

“ハツ” とする “鮮やかさ” が生まれます。

# MAKE IT UNIQUE.

IPS スタイルを完成させるIvoclar Vivadent 製品

IPS イボカラー



710℃で焼成できるステイン材。低温焼成だから表面性状を保ちながらあらゆる修復物にステイン可能です。ガラスを含むイボカラーの輝きがIPSスタイルにさらなる鮮やかさを与えます。

プログラマット Pシリーズ



40年以上の歴史を持つポーセレンファーンネスです。陶材をより良い状態で焼き上げるために開発されたこのファーンネスは、IPSスタイルの焼成をさらに時短へと導きます。

IPS スタイル セラム	焼成温度 T [°C]	スタンバイ温度 B [°C]	乾燥時間 S [min]	温度上昇率 r [°C / min]	係留時間 H [min]	バキューム 開始温度 V <sub>1</sub> [°C]	バキューム 解除温度 V <sub>2</sub> [°C]
1次 / 2次オペーカー焼成*	870	403	4:00	100	1:00	450	869
1次 / 2次マージン焼成	840	403	6:00	60	1:30	450	839
1次デンチン / インサイザル焼成/One焼成	790	403	6:00	60	1:00	450	789
2次デンチン / インサイザル焼成/One焼成	780	403	6:00	60	1:00	450	779
ステイン焼成**	750	403	6:00	60	1:00	450	749
グレース焼成 / グレース焼成と同時のアドオン焼成	750	403	6:00	60	1:00	450	749
グレース焼成後のアドオン	690	403	6:00	60	1:00	450	689

\* Powder オペーカーは、IPS スタイル セラム / セラム Oneを築盛するために開発されています。

\*\* ステイン焼成には、IPS イボカラー シェード / エッセンスを使用します。特に、広範囲な特徴づけに有効です (e.g. 一層築盛テクニック)。



# Fixed prosthetics

IPS スタイルは、「Fixed Prosthetics(固定式補綴物)」に分類されます。

この製品群は、固定式補綴物による修復(テンポラリー～セット後のメンテナンスまで)を網羅しています。

各製品はそれぞれバランス良く組み合わせられており、技工物製作と診療を成功に導きます。



Telio



IPS e.max



Programat



IPS Style



Variolink



Proxyt

前処理

修復

製作

仕上げ

装着

メンテナンス

## 製品内容

IPS スタイル セラム Powder オペカー 各 18g×1 5,200 円

673146	BL1/BL2	673147	BL3/BL4	673148	A1	673149	A2	673150	A3
673151	A3.5	673152	A4	673153	B1	673154	B2	673155	B3
673156	B4	673157	C1	673158	C2	673159	C3	673160	C4
673161	D2	673162	D3	673163	D4	673164	ピンク		

IPS スタイル セラム インテンシブ Powder オペカー 各 18g×1 5,200 円

673184	ホワイト	673185	バイオレット	673186	ブラウン	673187	インサイザル		
--------	------	--------	--------	--------	------	--------	--------	--	--

IPS スタイル セラム マージン 各 20g×1 5,800 円

673230	BL	673232	1	673233	2	673234	3	673235	4
673236	5	673237	6	673238	7				

IPS スタイル セラム インテンシブ マージン 各 20g×1 5,800 円

673239	イエロー	673240	オレンジ・ピンク	673241	オレンジ	673242	オペカー		
--------	------	--------	----------	--------	------	--------	------	--	--

IPS スタイル セラム ディープデンチン 各 20g×1 5,800 円

673335	BL1/BL2	673336	BL3/BL4	673243	A1	673244	A2	673245	A3
673246	A3.5	673247	A4	673248	B1	673249	B2	673250	B3
673251	B4	673252	C1	673253	C2	673254	C3	673255	C4
673256	D2	673257	D3	673258	D4				

IPS スタイル セラム デンチン 各 20g×1 5,000 円

673331	BL1	673332	BL2	673333	BL3	673334	BL4	673259	A1
673260	A2	673261	A3	673262	A3.5	673263	A4	673264	B1
673265	B2	673266	B3	673267	B4	673268	C1	673269	C2
673270	C3	673271	C4	673272	D2	673273	D3	673274	D4

IPS スタイル セラム デンチン 各 100g×1 21,000 円

673339	BL1	673340	BL2	673341	BL3	673342	BL4	673275	A1
673276	A2	673277	A3	673278	A3.5	673279	A4	673280	B1
673281	B2	673282	B3	673283	B4	673284	C1	673285	C2
673286	C3	673287	C4	673288	D2	673289	D3	673290	D4

IPS スタイル セラム インサイザル 各 20g×1 5,000 円

673337	IBL	673291	I1	673292	I2	673293	I3	673294	I4	673295	I5
--------	-----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----

IPS スタイル セラム インサイザル 各 100g×1 21,000 円

673343	IBL	673296	I1	673297	I2	673298	I3	673299	I4	673300	I5
--------	-----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----

IPS スタイル セラム トランスバ 各 20g×1 5,200 円

673302	ニュートラル	673303	ブルー								
673304	ブラウン・グレイ	673305	オレンジ・グレイ								

IPS スタイル セラム トランスバニュートラル 各 100g×1 21,000 円

673307											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IPS スタイル セラム マメロン 各 20g×1 5,200 円

673308	ライト	673309	イエロー・オレンジ	673310	サーモン						
--------	-----	--------	-----------	--------	------	--	--	--	--	--	--

IPS スタイル セラム オクレーザル デンチン 各 20g×1 5,200 円

673311	オレンジ	673312	ブラウン								
--------	------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

IPS スタイル セラム インサイザル エッジ 20g×1 5,200 円

673313											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IPS スタイル セラム オパール エフェクト 各 20g×1 5,200 円

673314	1	673315	2	673316	3	673317	4	673318	5	673319	バイオレット
--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	--------

IPS スタイル セラム スペシャル インサイザル 各 20g×1 5,200 円

673320	イエロー	673321	グレイ								
--------	------	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

IPS スタイル セラム インター インサイザル ホワイト・ブルー 20g×1 5,200 円

673322											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IPS スタイル セラム サービカル トランスバ 各 20g×1 5,200 円

673323	イエロー	673324	オレンジ・ピンク	673325	カーキ	673326	オレンジ				
--------	------	--------	----------	--------	-----	--------	------	--	--	--	--

IPS スタイル セラム アドオン 各 20g×1 5,800 円

673327	マージン	673328	デンチン	673329	690°C	674603	インサイザル	673338	BL		
--------	------	--------	------	--------	-------	--------	--------	--------	----	--	--

IPS スタイル セラム ジンジバ 各 20g×1 5,200 円

673344	(G) 1	673345	(G) 2	673346	(G) 3	673347	(G) 4	673348	(G) 5		
--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--	--

IPS スタイル セラム インテンシブ ジンジバ 各 20g×1 5,200 円

673349	(IG) 1	673350	(IG) 2	673351	(IG) 3	673352	(IG) 4	673353	(IG) 5		
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

IPS スタイル セラム ベーシック ジンジバ 20g×1 5,200 円

673354											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IPS スタイル セラム One 各 20g×1 5,000 円

673355	BL	673356	1	673357	2	673358	3	673359	4		
673360	5	673361	6	673362	7						

IPS スタイル セラム One 各 100g×1 21,000 円

673363	BL	673364	1	673365	2	673366	3	673367	4		
673368	5	673369	6	673370	7						

IPS スタイル セラム シェードガイド 各 1セット 14,000 円

674208	インサイザル/トランスバ	674210	インパルス								
--------	--------------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

IPS スタイル Powder オペカー リキッド 673371 60mL×1 5,000 円

IPS スタイル セラム イントロキット A2 679924EN 40,000 円

セラム (9種類)	各 1
IPS イボカラー (4種類)	各 1
IPS イボカラー ミキシングリキッド オールラウンド	15mL×1
IPS スタイル Powder オペカー リキッド	15mL×1
IPS ビルドアップリキッド オールラウンド	15mL×1

IPS スタイル セラム スターターキット A-D 679925EN 180,000 円

セラム (24種類)	各 1
IPS イボカラー (8種類)	各 1
IPS イボカラー ミキシングリキッド オールラウンド	15mL×1
IPS スタイル Powder オペカー リキッド	60mL×1
IPS ビルドアップリキッド オールラウンド	60mL×1
シェードガイド (インサイザル/トランスバ・インパルス)	各 1

一般的名称: 歯科メタルセラミック修復用陶材 / 販売名: IPS スタイル / 認証番号: 229AGBZX00072000 / 管理医療機器  
一般的名称: 歯科セラミックス用着色材料 / 販売名: IPS イボカラー / 認証番号: 228AGBZX00117000 / 管理医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社  
〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24  
TEL: 03-6801-1301 FAX: 03-5844-3657  
www.ivoclarvivadent.jp  
info.japan@ivoclarvivadent.com

PR0034B01

