



Sakura Quick

DUST FREE

クリストバライト埋没材(急速加熱タイプ)

サクラ クイック 10

さらなる進化!

NEW!

石こう系埋没材史上初!!
最短 **10分** で急速加熱可能

埋没完了後10分での急速加熱が可能のため、埋没作業後の待ち時間を大幅に短縮できます。技工作業をより円滑にします。

きれいな鑄肌

ワックスパターンに優れたヌレ性を有しているため、鑄肌の良好な補綴物が作製できます。その後の研磨作業の時間短縮にもつながります。

ダストフリー

優れたダストフリー性能(※)を発揮します。より快適な作業ができます。

(※当社が独自に考案した特許出願中の測定方法により評価)



Sakura Quick 10

クリストバライト埋没材（急速加熱タイプ） サクラクイック 10

一般医療機器 歯科材料8 歯科用石膏及び石膏製品 JMDN70900010 歯科鑄造用石膏系埋没材
届出番号: 13B2X10233000055(サクラクイック10), 13B2X10233000023(サクラクイック20/30)




■包装形態 3kg箱 (1.5kgアルミ袋×2)

最短10分で急速加熱可能!

埋没作業後の待ち時間を大幅に短縮できます。

ワックスパターンに優れたヌレ性を有しているため、鑄肌の良い補綴物が作製できます。その後の研磨作業の時間短縮にもつながります。また、優れたダストフリー性能(※)を発揮し、より快適な作業ができます。

(※当社が独自に考案した特許出願中の測定方法により評価)

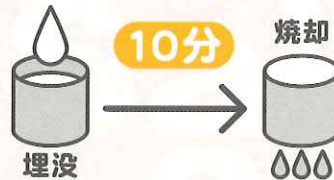

使用上の注意事項

- 標準混水比(0.34W/P)で使用してください。水の量が不足した場合、流動性低下や硬化時間短縮の原因となります。
- 練和時間の目安は、手練和20秒+真空練和30秒です。
- 最短10分での急速加熱を可能にするため、操作時間を短めに設定しています。練和後3~4分で埋没を完了してください。
- 埋没する際は必ず鑄造用リングライナー(0.7mm厚、ナチュラルライナー推奨)を使用してください。
- パターンの先端からリングの上面・内面までの間隔、およびパターン同士の間隔は5mm以上確保してください。
- リングサイズにより急速加熱を開始するタイミングを調節してください。
- ・リング内径50mm以下、高さ55mm以下の場合:埋没完了後10分
- ・左記条件以外のリングの場合:埋没完了後15分以上経過後 ※保留時間は30分を目安にリングの大きさやワックスパターンの数などにより適宜延長してください。
- 次の場合は急速加熱での使用を避けてください。
- ・レジン系のパターンを使用する場合。
- ・埋没後24時間以上経過した場合。

		サクラクイック 10
混水量 (粉末100gに対して)		34ml
硬化時間		7分
硬化膨張率	10分後	0.10%
	2時間後	1.75%
熱膨張率 (700°C)		1.60%
圧縮強さ (2時間後)		4.8MPa

試験方法: JIS T6601 に準ずる。

サクラクイック20 サクラクイック30



■包装形態 6kg箱 (1.5kgアルミ袋×4)



■包装形態 6kg箱 (1.5kgアルミ袋×4)

きれいな鑄肌で
パーフェクト!

安定した膨張で
オールマイティー!

生体溶解性鑄造用リングライナー 非吸水タイプ

NATURAL LINER

ナチュラルライナー

生体溶解性ファイバー採用! 新タイプのリングライナー

生体に吸入されても生理作用で体外に排出されやすいファイバーを採用した体にやさしい製品です。(リフラクトリーセラミックファイバーを含有していません。)
クリストバライト、石英、高温埋没材など、すべての埋没材に使用できます。



規格	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)
#32	0.7	32	30
#42	0.7	42	30
#48	0.7	48	30

■販売店

■製造販売元



吉野石膏株式会社

〒123-0872 東京都足立区江北2丁目1番1号

■販売元



吉野石膏販売株式会社

本社: 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1丁目8番3号

TEL.03-3944-6571 FAX.03-3944-6577

大阪営業所: 〒538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目20番34号

TEL.06-6915-1250 FAX.06-6915-1255

福岡営業所: 〒815-0004 福岡県福岡市南区高木1丁目14番8号-A

TEL.092-437-2112 FAX.092-437-2113

<http://www.yoshino-gypsum-sales.com>

2017.10-4000