

アルジネート印象材

アルフィーナネオ[®]

1. 長期保存安定性をさらに高めました。
2. 安心できる寒天との連合印象採得。
3. スピーディーに安定したゲル化体を形成、
精密な印象採得ができます。



- 5kg(1kg×5) 標準価格¥21,000 (税別)
- 承認番号:224AFBZX00128000

子どもや高齢者にも
好評のストロベリー

製造販売元

睦化学工業株式会社 お問い合わせホットライン▶059-333-1611▶ 歯科材料サービス係

〒510-0804 三重県四日市市万古町8-9 TEL 059-331-2354 (代) FAX 059-331-1044 URL <http://www.mutsumikagaku.co.jp>




アルジネート印象材 アルフィーナ ネオ

水と粉が素早くなじみ、ムラのない
均一ペーストを実現。
寒天との接着力を高め、タレにくい印象材です。


1. 軽い練和感、素早い練和
水なじみに優れ、軽い練和感で
素早く練和できるように、配合
バランスを調整しました。



2. 優れたチキソトロピー性
軽い練和感はそのままに、タレ
にくいペーストに仕上がります。

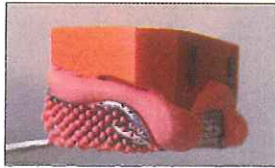

3. 寒天との高い接着性
滑らかな表面性と、適度のゲル
化時間により、寒天との接着に
優れています。連合印象時に
おいても、安心してご使用いた
だけます。

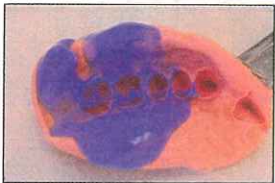


※寒天印象材：ネオロイドサファイアブルー

4. 精密できれいな模型面

硬石膏や超硬石膏を用いても、精密で滑沢模型面が得られます。

表面粗さ試験
ニュープライムロック
(超硬質石膏) 使用例

平均粗さ0.5μmRaFS
10点粗さ2.2μm

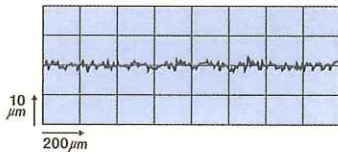

5. 物理的性質

項目	参考値
粉 / 水	8.4g/20ml
練和時間	20~30秒
トータル操作時間	1分20秒(ファスト)
	1分40秒(ノーマル)
	2分20秒(スロー)
初期硬化時間	1分40秒(ファスト)
	2分10秒(ノーマル)
	3分(スロー)
永久歪み	2.7%
弾性歪み	14.5%
圧縮強さ	0.7MPa

(試験方法: JIS T6505) (室温23°)

■3つのセッティングタイムと2つの香り

タイプ	ノーマルセット	ファストセット	スローセット (自動練和器対応)
色調	ピンク	グリーン	ブルー
香り	ペパーミント ストロベリー	ペパーミント	ペパーミント

包装(1Kg×5袋)

関連商品のご案内

寒天印象材

ネオロイド
サファイアブルー

ネオロイド
2000H



- 包装: 48本入
- 使用温度: 60°C~65°C
- 管理医療機器:
221ADBZX00050000

- 包装: 48本入
- 使用温度: 58°C~63°C
- 管理医療機器:
221ADBZX00051000

アルギン酸塩印象材清掃用

ムツミトレークリーナー液

デュアルタイプ
剥がす 溶かす



- 容量: ポリ容器10+詰替バック10
詰替バック10×2
20ハンディ容器
- 特許No.4054085取得品

クオリティをお届けする **MUTSUMI** です。

製造販売元

睦化学工業株式会社

〒510-0804 三重県四日市市万古町8-9
☎059-331-2354(代) ☎059-331-1044
<http://www.mutsumikagaku.co.jp>

ご用命は