

手持ち型口内法デジタルX線撮影用デバイス

スマートグリップIP 特許出願中

スマートグリップ

オートクレーブ滅菌

ガス滅菌対応

被曝軽減

患者様も術者も手指の被曝を軽減できます！

衛生的

手指を口内に入れず、唾液もつかないので衛生的！

簡単操作

IP/CCD対応
操作が簡単！訪問診療や警察歯科に対応できます！

保持部に角度を持たせた形状なので、左右縦横自在に設定ができます

純チタン製で金属アレルギーにも対応

※小児サイズから標準サイズに対応

指で押さえるよりも姿勢に無理がなく楽に保持できます。

CCDのコード絡み防止付き

CCD用は、保持部の角度が自由に変えれます

スマートグリップIP

スマートグリップCCD(汎用)

動画を配信中！

インターネット上の動画共有サイト(YouTube)にてスマートグリップ(スマート撮影2)のガイドを動画でネット配信しております。パソコンやスマートフォンからご覧ください。

動画共有サイトURL: <https://youtu.be/vudTW490liU>



スマートグリップ I P の取扱法



1 IPをフラットバッグにセットします。



2 スマートグリップを撮影部位に合った向きにあわせフラットバッグの背面側から差し込みます。

※ スマートグリップ I P はリバーシブルで両面から差し込みますので、どの部位にも I P を設定できます。



3 唾液感染予防袋をスマートグリップに被せます。

撮影時のポイント

デバイス形状、向きを認識しておくことと口腔内の I P 位置を把握でき照射筒を合わせやすくなります。



4 目的歯が I P の中心に来るように設定します。


※ 患者様にグリップを握ってもらい術者がアーム部をもって誘導し I P を設定します。

※ 目的歯側口腔に I P 保持部をそっと添わずようにすると持ち手が安定します。

スマートグリップ CCD の取扱法



1 CCDセンサーを固定プレートに合致します。

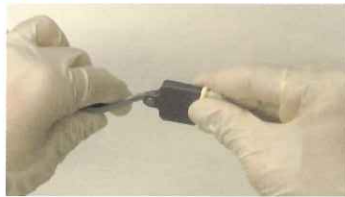

2 固定サックで CCD を固定します。



3 コードをグリップに固定します。



4 唾液感染予防袋を被せ任意の向きに設定します。

スマートグリップ 関連製品一覧

スマートグリップ I P

クラス I 28B3X00009000035

※純チタン製

サイズ2用



サイズ0・1用



販売価格 各1本 7,000円(税別)

スマートグリップ CCD (汎用)

クラス I 28B3X00009000037

※ステンレス
※耐熱樹脂製



販売価格 1本 13,000円(税別)

フラットバッグ (I P 保護袋)

特許 第6038751号



1シート 5組

サイズ0A (22mm×31mm)
サイズ0B (22mm×35mm)
サイズ 1 (24mm×40mm)
サイズ 2 (31mm×41mm)

販売価格 各500組 6,000円(税別)

固定サック (CCD用)



販売価格 サック100個 800円(税別)

唾液感染予防袋 (スマートグリップ用) クラス I 28B3X00009000036



販売価格 予防袋500枚 2,500円(税別)

使用上の注意

- スマートグリップは滅菌したものをお使いください。
- フラットバッグ・唾液感染予防袋・固定サックは使い捨て製品です。
- スマートグリップ CCD の首ふり部が緩んできましたら + ドライバーで増す締めしてください。
- 破損・変形したものは使用しないでください。

お問い合わせ

製造・販売元

株式会社 フラット

〒658-0023 東灘区深江浜町141-4
Tel: 078-412-2345 Fax: 078-412-2028
URL: <http://www.k-flat.co.jp>

取扱い品目 歯科用レントゲン自動現像機(明室用、暗室用)・現像処理液
□内法エックス線撮影補助具・防護用品(防護衣・手袋他)