

シリコーン印象材

Zerosil soft



精度・経済性・安全性を追求した精密付加型シリコーン印象材

ゼロシール ソフト

ラバーボールで練和可能な付加型シリコーン印象材です。硬度35ショアで、アルジネート印象材と同じ操作方法で扱え、印象材撤去時の孤立歯の破損を防ぎます。連合印象可能です。



経済性

インレー、クラウン、ブリッジの印象から、デンチャーの印象まで使用範囲の広い印象材です。

安全性

印象撤去時の不快感がなく、無味無臭のため、HIV感染など二次感染を防ぐ適切な消毒が可能です。



口径の広い新パッケージに変更になりました

操作手順



Aに対してBを同じ量で練り出します。



気泡を入れないよう色ムラがなくなるまで均一に練和します。



硬化後印象材を取り外します。
印象材の撤去が容易



プラスチックボンド

ゼロシールソフトのトレーに対し強力な接着を実現するトレードヘッピです。(10mLボトル)

所要時間

ノーマル

操作時間 3分30秒
(練和時間含む) + 硬化時間 3分00秒

ファースト

操作時間 2分00秒
(練和時間含む) + 硬化時間 1分30秒

タイプ	販売単位
ノーマル	500mL×2本 / 1箱
ファースト	500mL×2本 / 1箱

● 色調 (オレンジ)

※使用前にチューブをよく揉んでご使用ください

ゼロシール 詰替用アダプター (2PC/袋)



ゼロシール 空カートリッジ (12本/袋)



ゼロシールソフトチューブから詰め替えられる、カートリッジとアダプターです。二次印象にも使えて経済的です。

ゼロシールの三次印象に



※ゼロシールとの連合印象

ボンフレックスライト

用途	インレー、クラウン、ブリッジ、パーシャルデンチャー等の印象
セット内容	50mL×2カートリッジ ミキシングチップ



二次印象用シリコーン印象材

ボンフレックスヘビー

用途	インレー、クラウン、ブリッジ、パーシャルデンチャー等の印象、ダブルアーチ
セット内容	50mL×2カートリッジ ミキシングチップ

承認番号 ゼロシールソフト: 22000BZX00542000
 認証番号 ボンフレックスライト: 223AGBZX00175000 ボンフレックスヘビー: 223AGBZX00176000

販売元

製造販売元



グローバルな視点で歯科を考える

リンカイ株式会社

〒160-0012 東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階
 TEL: 03-3359-4321 FAX: 03-3353-8403

お問い合わせ、資料請求は ミンナヨイハ

0120-307418

www.rinkai-tokyo.co.jp

リンカイ

検索