

プロキシディスク

歯科用研削ディスク

タイトな隣接面の余剰セメントの除去、スペースの確保に



タイトな隣接面のスペースを 確保するディスク ロッキングモーションで 簡単に余剰セメントなどの 除去ができます



- 余剰セメントの除去、
ボンディング材、コンポジットレジンバリ除去に
- ロッキングモーションで操作しやすく、歯肉を傷つけにくい
- 作業部はプレーンな表面です
- 薬液消毒、オートクレーブ滅菌が可能で再使用できる

〈使用方法〉




①把持部の穴にフロスを通し結び、
口腔内での落下等のリスクに備えます。



②ロッキングモーションでプロキシディスクを
隣接面コンタクトに挿入します。



③同様の動きで適度な圧を加えながら
タイトな硬化セメントなど余剰材を取り除きます。

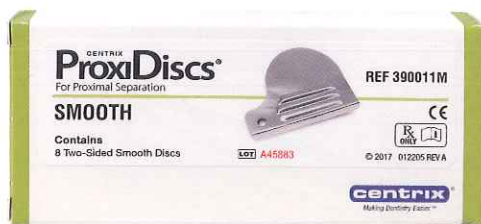

歯科用研削ディスク プロキシディスク

〈製品構成〉

寸法 22.8mm×31.75mm
厚み 76μm
オートクレーブ滅菌可(138℃以下)
標準価格 8枚入/箱 2,800円 206230050

販売名 プロキシディスク
一般的名称 歯科用研削器材
医療機器届出番号 27B1X00109000327
医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

●標準価格の後の数字は品目コードです。●掲載商品の標準価格は、2018年4月23日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。