


グリップストリップ

歯科研磨用ストリップ

2種類のダイヤモンド粒子がコーティングされた、
操作性の高い繰り返し使用可能な研磨ストリップです。

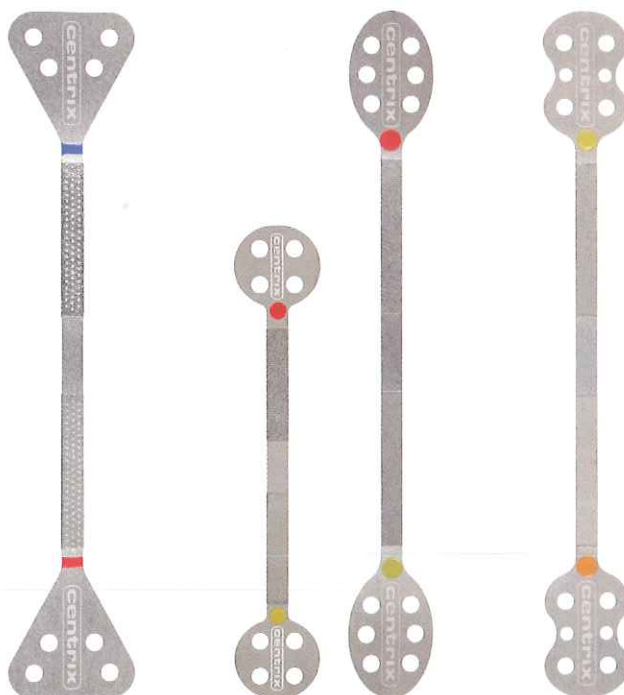



2種類の粒度のダイヤモンドがコーティング

「コース」「ミディアム」「ファイン」

形態修正と研磨の両方が1枚で行える

1枚のストリップに2つの異なる粒度のダイヤモンドがコーティングされており、形態修正、研磨、仕上げなど、1枚で2段階の作業が行えます。バーやディスクが届かない部位のオーバーハング、余剰レジン除去にも適しています。



<臨床写真ご提供> Dr. A. Devigus (スイス)

矯正時の細かな歯質の削合が可能に

「コース」は粒度が80 μ m/40 μ mと粗く、矯正治療時の歯牙移動スペースを確保するなどの歯質削合(スライス)にも適しています。手指操作でコントロールするので、曲面など形態の調整が容易です。

「コース」のダイヤモンドコーティング部はメッシュ状に小さな穴が開いているので歯質削合時の目詰まりを防ぎ、連続的に使用できます。

矯正治療時の上顎中切歯隣接面のスライス²⁾



削合前

削合中

削合後

コースはメッシュ状で目詰まりしにくい

<臨床写真ご提供> 1), 2)
大澤勇人先生
大澤歯科(東京・目黒区開業)

用途に応じて選べる3タイプ

コース

矯正時の歯質削合やCR充填前の形態修正に適しています。

推奨用途

- 矯正処置時の隣接面の削合
- CR充填前の形態付与・形成
- 余剰CRやオーバーハングの除去
- CR充填後の隣接面・歯肉辺縁の形成

ダイヤモンドコーティング部の拡大
コースのみ、ダイヤモンドコーティング部がメッシュ状に穴が開いており、目詰まりを防ぎます。



80 μ m

40 μ m

実物大

ミディアム

CR修復の形態修正や研磨、オーバーハングの除去に適しています。

推奨用途

- CR充填後の形態付与・研磨
- 余剰CRやオーバーハングの除去
- 隣接面・歯肉辺縁の仕上げ形成
- 矯正処置時の歯質削合・研磨

ミディアム ミニ

全長が短くなり前歯部での操作性が向上しました。

ダイヤモンドコーティング部の拡大



40 μ m

15 μ m

実物大

ファイン

CR修復の仕上げ、最終仕上げに適しています。

推奨用途

- 隣接面・歯肉辺縁の仕上げ形成
- 隣接面の最終研磨
- 隣接面のステインや変色の除去
- 矯正処置時の削合後の最終研磨

ダイヤモンドコーティング部の拡大



15 μ m

8 μ m

実物大

コーティングされた、繰り返し使えるメタルストリップ と、用途に応じて幅広く使い分けができます

ストリップの特長

適度な長さとお幅


口腔内の操作に適した全長80mmの長さです。
また2.5mmの幅は曲面など微細な形態修正に
適しており、歯肉にも接触しにくいです。
※ミディアム ミニは全長55mm

1枚に2種類の粒度

ダイヤモンドコーティング部は
それぞれ「粗」と「細」の2種類
の粒度で構成されています。

識別用のカラーコード

グリップの根元に粒度を識別するた
めのカラーコードが施されています。

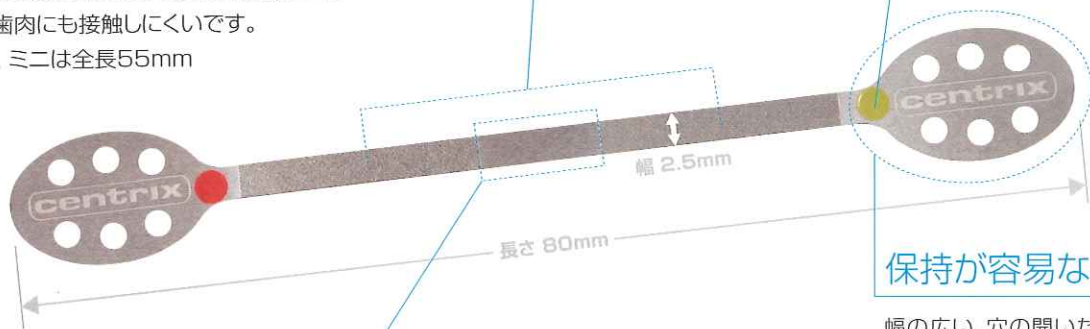

作業性を向上させる フリーミドルゾーン


中央部のダイヤモンドがコーティングされて
いない部分を「フリーミドルゾーン」と呼び、
コンタクトポイントを傷つけることなく挿入
できます。(厚み: 0.05mm)

140℃ オートクレーブ
滅菌可能

超音波洗浄、オートクレーブ滅菌対応
(140℃以下)。再使用が可能で、コスト
パフォーマンスにも優れています。

保持が容易なグリップ形状

幅の広い、穴の開いた両端の保持部は濡
れたグローブでもしっかりとストリップを
保持しやすい形状です。

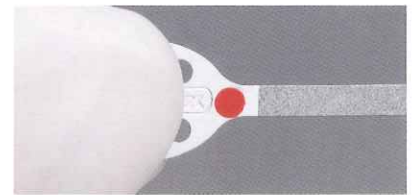

CRの充填時の使用例



1 中央のフリーミドルゾーンを
歯間部へ挿入します。



2 必要に応じて■80μm側ないし
■40μm側のより粗い研磨粒
子面を用いて充填する部分の
形態を修正します。



3 CR充填後、●40μm側の研磨
粒子面で形態修正・研磨します。
歯間スペースが制限される際は
●15μmをまず使用します。




4 ●15μmの研磨粒子面を前後
させて研磨します。
●8μm側で最終研磨をします。

歯科研磨用ストリップ グリップストリップ




コース

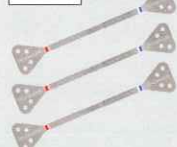


■包装 3枚入
標準価格 5,300円
206230031

ミディアム

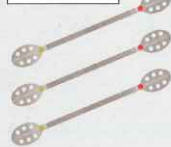


■包装 3枚入
標準価格 5,300円
206230032

ミディアム ミニ

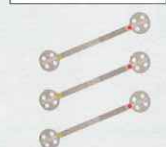


■包装 3枚入
標準価格 5,300円
206230035

ファイン

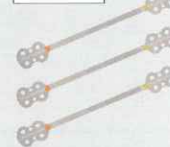

■包装 3枚入
標準価格 5,300円
206230033

アソート

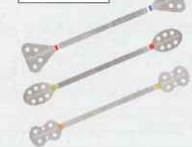

■包装 3枚入
標準価格 5,300円
206230034

Diagnostic and Imaging Equipment

Treatment Chair Units

Treatment Equipment

Handpieces and Instruments

Endodontic System

Laser Equipment

Laboratory Devices

Educational and Training Systems

Auxiliaries



製造
セントリックス (米国)

製造販売
株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020 (フリーコール)
<医療従事者様専用>

Morita Global Site: www.morita.com
More Infos about Products: www.dental-plaza.com

ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。
標準価格の後の数字は品目コードです。
掲載商品の標準価格は2018年4月23日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。