


エバポーレイテッドミラーとWリトラクター
の併用で、口腔内を容易に鮮明に撮影できます。

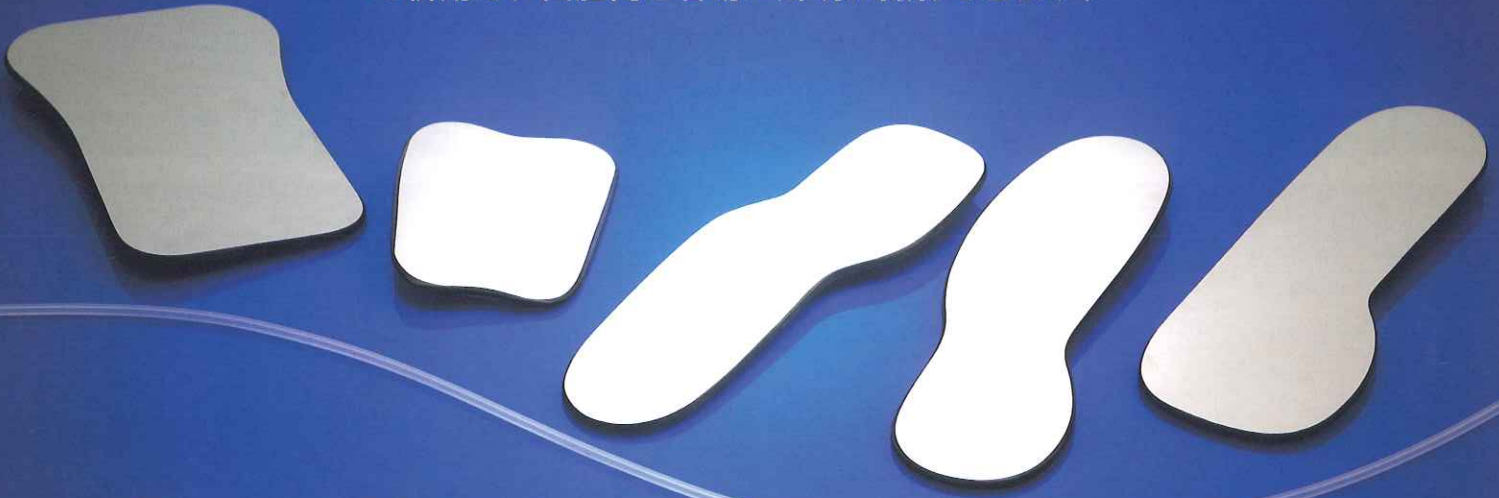

エバポーレイテッドミラー
材質：ガラス製（表面 ロジウムメッキ）
販売単位：1枚
一般医療機器 アメリカ製
届出番号 27B2X00041000004

口腔内写真撮影用 ミラー エバポーレイテッド ミラー

- 高品質の直接反射ミラーは乱反射がないため、歪みなく写ります。
- 表面のロジウムメッキは傷に強く、またフラッシュ光を吸収しはっきり写ります。
- 頬側・舌側・咬合面用があり、すべて両面使用できます。（裏面にサイズ表示）
- オートクレープ滅菌が可能です。

医院価格	成人用 (No.1/1B)	(No.2/2B)	(No.3/3B)	14,000円 (税別)
	成人用 (No.3L)			15,000円 (税別)
	小児用 (No.3C/3BC)			12,000円 (税別)



口腔内写真撮影用 口角鉤 Wリトラクター

- 口腔内写真撮影及び口腔衛生指導をする際に、口腔内の視野を広く確保できます。
- 半円形部は正面・側面鏡撮影に、フック部は咬合面鏡撮影に使い分けができます。
- 滑らかな素材が、口唇に不快感を与えません。
- オートクレープ滅菌が可能です。

医院価格 Wリトラクター（2個入）4,800円（税別）

Wリトラクター
材質：ポリメチルペンテン樹脂
販売単位：1袋/2個入
一般医療機器 日本製
届出番号 11B3X10020000001



Just put hot water between outer and inner cases,
and then fog away from mirrors!

Simple Mirror Warmer “Yuki Chan Deluxe” 湯器ちゃんデラックス

熱いお湯を外ケースに入れるだけで、内ケース内のミラーは濡れない！曇らない！



ご使用者の声

1. 撮影中に曇らなかった！
2. 拭く手間が省けて便利
3. 撮影用具が1つの容器に
まとめて使いやすい
4. 透明なので、お湯の量が
わかりやすい



使用前に濡れたミラーを拭く必要はありません。

口腔内撮影用ミラーや口角鉤を収納するための保温・保管容器です。
口腔内撮影用ミラーを濡らすことなく温めることにより、患者の口腔内撮影
用に入れた際、口腔内撮影用ミラーが曇りません。口角鉤用スペースには、
水を入れ口角鉤を濡らすことが可能です。

使用方法

- ① 外ケースに内ケースを入れる。その際に、内ケースの溝が外ケースの溝に
合うように差し込む。
- ② 約70℃のお湯を内ケースと外ケースの間のスペースに入れる。
- ③ 口腔内撮影用ミラーや口角鉤を本器にセットし、口腔内撮影用ミラーを温める。
温められた口腔内ミラーは、そのまま口腔内に入れても曇りません。

洗浄方法

- 水または中性洗剤で洗浄し、各種消毒剤で消毒してください。
- 内ケースはオートクレーブ滅菌（130℃以下）が可能です。
（外ケースはオートクレーブ滅菌できません。）

注意 ※ 乾燥工程・ガス滅菌・ドライクレーブ・紫外線殺菌はお止めください。
※ 次亜塩素酸系などの消毒剤は使用しないでください。
製品が変形する恐れがあります。

※ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※ 色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※ 価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。



寸法：106 x 106 x 85(mm)
素材：外ケース：TPX
内ケース：PP

湯器ちゃんデラックス
価格：¥7,500 (税抜)