

GC



TiON[®]

Take Home Platinum

患者さんにやさしいホームホワイトニング。

ティオン ホーム プラチナ


医薬品含有歯科用歯面清掃補助材

ホワイトニングジェル「ティオン ホーム プラチナ」だからできること

より早く、より白く。

「ティオン ホーム プラチナ」は、ジェルの性状や有効成分放出スピードを改良したことで従来製品より高いホワイトニング効果を実現。
より早く、より白く、が実感いただけます。

ティオン ホーム プラチナの臨床試験結果

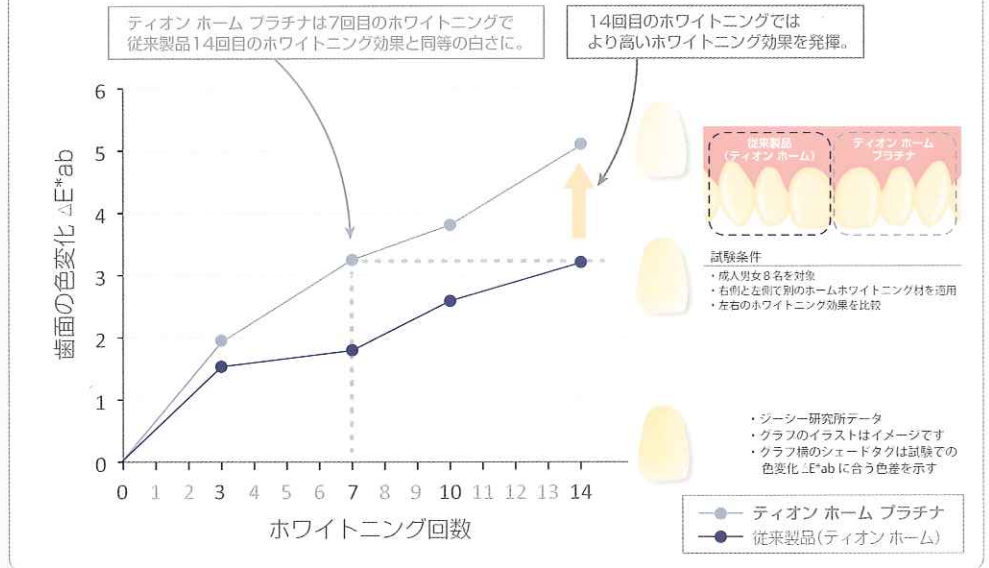


有効成分放出スピードがより速く、より効果的に歯面に作用

ホームホワイトニングでは、有効成分を効果的に歯面に作用させることが重要です。ティオン ホーム プラチナのホワイトニングジェルは、水となじみやすく有効成分が唾液・歯面に浸透しやすいため、有効成分がしっかり歯面に作用します。



ホワイトニングジェル有効成分放出量比較試験

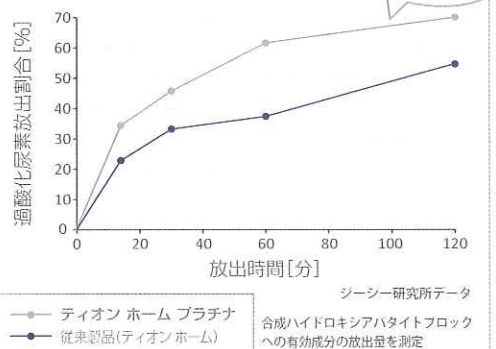

トレー装着中



※効果には個人差があります。

「ティオン ホーム プラチナ」は、従来製品「ティオン ホーム」をさらに使いやすくした高度管理医療機器です。

ホームホワイトニングは、歯科医師の指導のもと患者さん自身が、ご自宅などで行うため、高い安全性が求められます。

溶けない、垂れない、よく伸びるジェル性状

ホワイトニングジェルが唾液に溶けにくく、歯面に密着し広がり留まるため、マウストレー装着時に歯面にムラなく有効成分が作用します。

試験方法: アクリル板中央に円柱状の凹みを設け、そこにホワイトニングジェルを充填し水中に浸漬。

	従来製品 (ティオン ホーム)	ティオン ホーム プラチナ
浸漬直後		
120分後		
	完全に溶解	溶解しない

図解: A方向、B方向の試験方法を示すイラスト。

温度・湿度の高い口腔内でもジェルが垂れにくいため、マウストレーからジェルが流れ出しにくく、安心してお使いいただけます。



※着色したジェルを注入したトレーを模型に装着
条件: 37℃・湿度100%条件下で2時間放置。

確認のしやすい白色ジェル

ジェルが白色のため、マウストレー内の状態を確認できます。また、ジェルがトレーからあふれ出た場合も、患者さんご自身が目視確認できるため、すぐにジェルを拭き取ることが可能です。



マウストレーからあふれ出た状態でジェルを放置すると、歯肉の炎症を引き起こす恐れがあります。

高い再現性と柔軟性・耐久性を有するトレーシート

マウストレーは、柔軟性が高くソフトな装着感のため、違和感が少なく長時間のホワイトニングも快適に行えます。また耐衝撃性に優れているため、マウストレーの破損を防ぐことができます。



歯面にフィットしたトレーは透明性が高く、違和感なく使用いただけます。



トレーシートは、しなやかで細部まで正確に再現。


歯科医院でのステップ ▶▶▶



1 診査・診断
患者さんへインフォームドコンセントを行います。次にシェードテイキングを行い、口腔内の撮影を行います。



2 歯面の清掃
歯面研磨ペースト PTCペースト ルシェロホワイト等を用いて歯面清掃を行います。

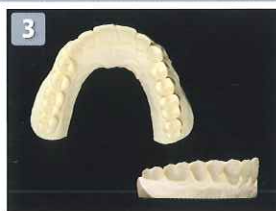

3 作業用模型の準備
全顎の作業用模型を作製し適切な形にトリミングします。
※トレーに液溜まりは必要ありません。



4 マウストレーの成形
真空加熱成形器 プロフォームを用いて成形を行います。



5 マウストレーのトリミング
歯頸線に合わせてカットし、患者さんの口腔内で試適します。

患者さんが行うステップ ▶▶▶



6 ホワイトニング前のブラッシング
効果的なホワイトニングのために、歯面のブラッシングを行います。



7 ホワイトニングジェルの注入
1歯あたり米粒2つ分を目安に、ホワイトニングジェルを注入します。



8 マウストレーの装着
マウストレー装着時、ホワイトニングジェルがあふれ出た場合は、すぐに拭き取ってください。ホワイトニング後は歯面をブラッシングし、ジェルを洗い流します。



9 マウストレーの洗浄
ホワイトニング終了後、マウストレーを歯ブラシを用いて洗浄します。
※マウストレーが変形する恐れがあるため、温水を使用しないでください。



10 マウストレー、ホワイトニングジェルの保管
マウストレーは、トレーケースに入れて保管します。ホワイトニングジェルは、冷蔵庫で保管します。

ティオン ホーム プラチナ

高度管理医療機器 医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
22900BZX00205000

ご使用に際しましては、必ず使用上の注意事項をお読みください。



スターターキット

包装・希望医院価格●ホームホワイトニング材(2.5mL)4本、トレーシート 2枚、トレーケース 1個、シェードガイド1枚、ペーパーバッグ 1袋=¥6,500

要冷蔵



リフィル

包装・希望医院価格●1函:ホームホワイトニング材(2.5mL)2本入×5=¥12,500

要冷蔵



2シリンジ

包装・希望医院価格●1函:ホームホワイトニング材(2.5mL)2本入=¥2,700

要冷蔵

シェードガイドの使用例

患者さんがご自宅でホワイトニング効果を確認するための簡易シェードガイドです。ホワイトニング前の近似シェードを上段にチェックし、ホワイトニング終了後の近似シェードを下段にチェックしておけば、経年による後戻りを患者さん自身が確認できます。

ホワイトニング前
ホワイトニング後



ティオン ホーム プラチナ トレーシート

包装・希望医院価格●1函:トレーシート 10枚=¥3,800



ティオン ホーム プラチナ トレーケース

包装・希望医院価格●1函:トレーケース 10個=¥5,000

禁忌・禁止等

下記の患者には本品を使用しないこと。

- 無カタラーゼ症の患者
- 妊娠中、授乳期の女性
- 小児
- 重度の歯肉炎や歯周炎を有する患者
- ポリオレフィンに対し、アレルギー反応が見られる患者

下記の歯には本品を使用しないこと。

- 健全でない歯(う蝕、くさび状欠損、咬耗症、クラック等)
- 知覚過敏を有する歯

本品は就寝中に使用しないこと。
本品を用いてウォーキングブリーチ法を行わないこと。
本品を用いて歯室内からの処置を行わないこと。

関連製品



歯科用オフィスホワイトニング

ティオン オフィス 要冷蔵 医薬用外劇物

包装・希望医院価格●オフィスホワイトニング材 シリンジA 1.0g 1本、オフィスホワイトニング材 シリンジB 1.0g 1本、リアクター-2.0g 1本、歯肉保護レジン 1.5g 1本、ディスプレイザブルティッシュ 1個、ディスプレイザブルブラシ 2本、ディスプレイザブルファイバー付きチップ 2個=¥5,800
高度管理医療機器 歯科用漂白材 22200BZX00785000

ホームホワイトニング前のクリーニングに。



フッ素入り歯面研磨ペースト

ジーシー PTCペースト ルシェロ ホワイト

包装・希望医院価格●1函:1本80g=¥2,400
一般医療機器
歯面研磨材 13B2X00124000003



歯面清掃用カップ

ジーシー PTCカップII

包装・希望医院価格●1函:カップII 20個=¥1,000
一般医療機器
歯面カップ 13B1X00155000291

マウストレーの作製に。



超速硬石こう(模型用)

シェイク!ミックス ストーン

色調●2色=ピンク、イエロー
包装・希望医院価格●1函:3kg(1.5kgシンブルパック×2袋)=¥2,980
一般医療機器
歯科用硬質石こう 13B1X00155000290

製品特設サイト



真空加熱成形器
プロフォーム
包装・希望医院価格●本体一式=¥65,100
一般医療機器
歯科技工用成形器 13B1X00155000106

ホームホワイトニング後の患者様にお勧めください。



薬用歯みがき

ルシェロ 歯みがきペースト ホワイト

【内容量】100g
包装・希望医院価格●1本=¥1,430
希望患者価格●1本=¥1,940(税込)

医薬部外品



歯ブラシ

ルシェロ歯ブラシ W-10

色調:2色=パールホワイト、パールゴールド
※ラバー1色=ホワイト 毛のかたさ:やわらかめ
包装・希望医院価格●1函:6本(各色3本)=¥1,920
希望患者価格●1本=¥400(税込)

CPP-ACP(リカルデント)の緩衝作用で口腔環境を整えます。

トゥースクリーム

MIペースト

【内容量】40g
包装・希望医院価格●各種フレーバー1本=¥1,310、イントロダクトリーセット3本(ストロベリー/ヨーグルト/ミント)=¥3,930
●アソートセット10本(各フレーバー2本)=¥13,100
包装・希望患者価格●1本=¥1,700(税込)



本品は牛乳由来成分(カゼイン)及びバラベンが含まれておりますので、牛乳由来成分(カゼイン)及びバラベンに対してアレルギーを持つ方には使用しないでください。

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の価格とジーシー研究所測定値の参考データは、2018年5月現在のものです。

※希望医院価格には消費税は含まれておりません。
※臨床写真は製品の性能を保証するものではありません。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

DIC(デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

http://www.gcdental.co.jp

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286