

咬合採得用付加型シリコーン印象材

# Oxford Bite

オックスフォード バイト

## ワンランクアップのクオリティー

オックスフォード バイトは  
咬合状態をスピーディーかつ  
精密に記録できる咬合採得用  
シリコーン印象材です

口腔内保持時間

スピーディーな硬化で、  
より精度の高い咬合採得

45  
秒

ショアA硬さ

硬化後のショアA硬さ：87-91  
ナイフや切削バー等でシャープに  
調整ができる高いショアA硬さ

90

クリーム  
タイプ

採得時の咬合抵抗が  
少なく、無理なく  
正確な咬合位置を記録

お得な

50mLのカートリッジが4本入  
で満足いただける低価格

4  
本入



PENTRON JAPAN INC.


## スピーディーな硬化

操作時間  
15秒以上

口腔内保持時間  
45秒

ペーストの押し出し操作は、軽くスムーズ。操作時間（15秒）内で、片側、両側を問わず歯列への注入が可能です。また、注入後はスピーディーに硬化が完了し、より精度の高い咬合記録を採得することができます。

## 硬化前のペーストは、きめの細かいクリームタイプ

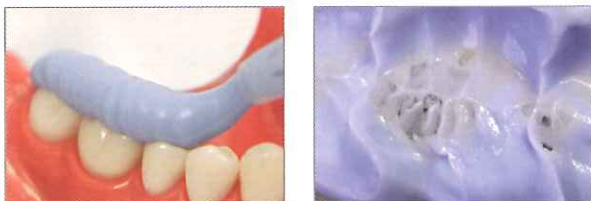

硬化前のペーストは、咬合抵抗が少ないクリームタイプのため、患者さんの正確な咬合位置を記録できます。またチキソロピー性に優れ、無圧状態では垂れにくく、加圧時にはスムーズに流れるので、さまざまな採得方法にも対応できます。

## ショアA硬さ：87～91



ナイフによるトリミング



切削バーによるトリミング

硬化物は適度な硬さがあり、ナイフや切削バー等でシャープなトリミングが可能です。

## 安定した寸法精度

付加型シリコンを採用し、硬化後長期間にわたり安定した寸法精度を維持します。

## 低価格を実現

高品質なバイトマテリアル オックスフォード バイト（50mLカートリッジ）4本入で、ご満足いただける低価格を実現しました。

### オックスフォード バイト 包装内容



カートリッジ：50mL×4本  
T-ミキサーチップ×10本  
イントラオーラルチップ（バイト）×10本 **標準価格：¥9,000**

一般医療機器 歯科材料6 歯科用充填材料 歯科咬合採得用材料(70333000) 届出番号:13B2X00022000069号

### 単品販売

#### ● T-ミキサーチップ

チップ内残量が従来品と比べて30%削減



50本入  
標準価格：¥5,500

一般医療機器 機械器具65 歯科用充填器 歯科用充填・修歯材補助器具(38782000) 届出番号:13B2X00022000069号

#### ● イントラオーラルチップ（バイト）



50本入  
標準価格：¥1,600

一般医療機器 機械器具65 歯科用充填器 歯科用充填・修歯材補助器具(38782000) 届出番号:13B2X00022000070号

### 関連商品

#### ● ディスペンサーガン（50mLカートリッジ用）

標準価格：¥15,200



一般医療機器 機械器具65 歯科用充填器 歯科用充填・修歯材補助器具(38782000) 届出番号:13B2X00022000013号

ご使用の際は、製品添付文書を必ずご確認ください。  
本価格は2015年9月1日現在のものです。（消費税を含みません。）

PENTRON®  
JAPAN INC.   
www.j-pentron.com

製造販売元

ペンترون ジャパン株式会社

〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17 5F-6F  
TEL.03-5746-0316 FAX.03-5746-0320