

NEW



ceram.x[®] SphereTEC[™] one
Universal Nano-Ceramic Restorative
セラメックス スフィアテックワン

5色のシェードでVITA16色をカバーするため色あわせが簡単

- ・高い賦形性で思いどおりの形態を付与
- ・高い研磨性により短時間で光沢を獲得

シンプルなシェードシステムで色あわせが簡単

セラメックス スフィアテック ワンは、独自のクラウドシェードコンセプト*に基づいてシェード設計され、少ない本数でも多くのシェードに適合しやすくなっています。また、フィラーとレジンマトリックスの屈折率をあわせることによりカメレオン効果を発揮し、1本のシェードで複数のVITAシェードをカバーするため、わずか5本のシェードでVITA16シェードが100%カバーされます。例えば、A3シェードはVITA A3, C2, D3, D4の4色に適合します。



*クラウドシェードコンセプトとは、VITAシェードの近似した色相をひとつのまとまり（クラウド）として新たに分類したセラメックス独自のシェードコンセプトです。




測色時 B1 であった症例にセラメックスの A1 を充填した症例。充填痕もなく馴染んでいる。

写真提供 北原信也 先生

新しいスフィアテック フィラーがもたらす快適な操作感


セラメックス スフィアテック ワンは粒状フィルター技術により、微細なサブミクロンフィラーから 3.5 ~ 15 μ m の真球状のフィラーに造粒しました。このスフィアテック フィラーの配合により、メリハリのある操作感、器具へのべたつきの抑止、優れた研磨性を実現しています。

スフィアテック フィラーとは？

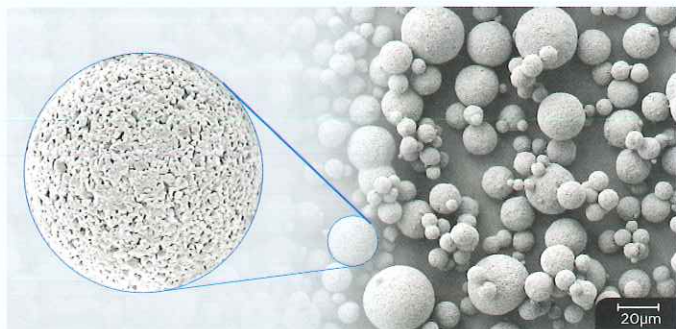

平均 0.6 μ m の微細なサブミクロンフィラーから噴霧顆粒法で得られたスフィアテック フィラーの表面性状。

メリハリのある操作感!

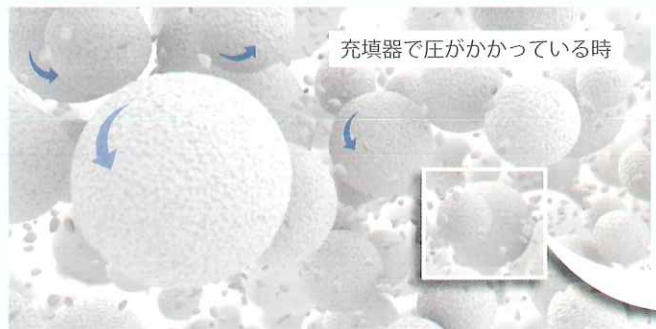

充填時に力を加えると、スフィアテック フィラーがボールが転がるような働きをし、わずかな力で賦形が可能です。

賦形性が高く、形態付与も思いのまま


チクソトロピー性が高く、充填操作中は適度な流動性があるものの、インスツルメントを離すとそのままの形が留まることによって賦形した状態を維持し、複雑な形態も再現しやすくなります。咬頭部や隆線、列溝など臼歯部における細かな賦形もストレスなく行えます。



写真提供 鷺野 崇 先生

短時間で光沢が得られる優れた研磨性

スフィアテック フィラーは平均 0.6 μmのサブミクロンフィラーにより造粒された真球状フィラーのため、研磨時には研磨材が当たった部分の微細なフィラーのみが研削され、短時間で光沢が得られます。

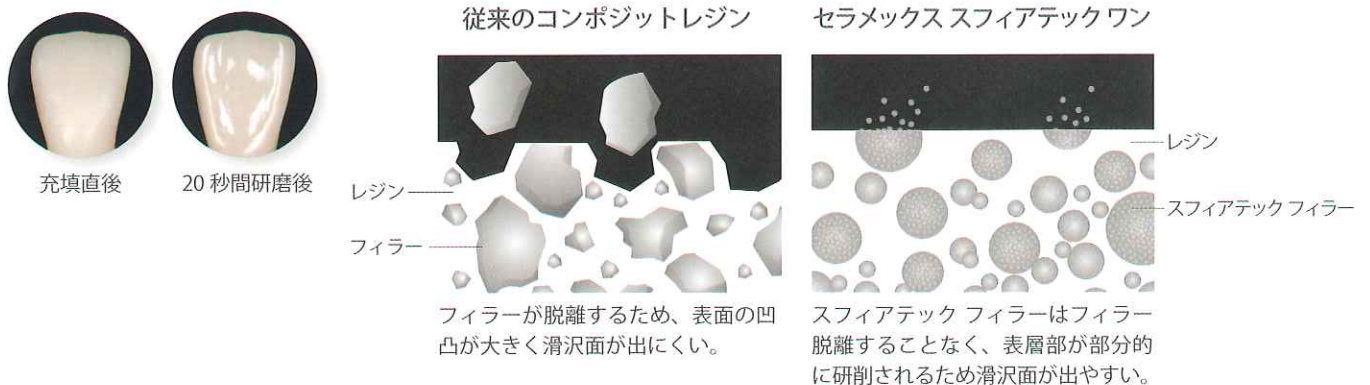

User's Voice

セラメックス スフィアテック ワンを臨床で取り入れた先生方のコメントが動画でご覧いただけます。



vol.1 鷺野 崇 先生



vol.2 大谷 一紀 先生

インスツルメントにべたつきにくい!

充填器で圧がかかっていない時

stop

力が加わっていない状態の時には、サブミクロンフィラーがスフィアテック フィラーの転がりを抑止する働きをする事で形態を保ち、垂れずにとどまります。

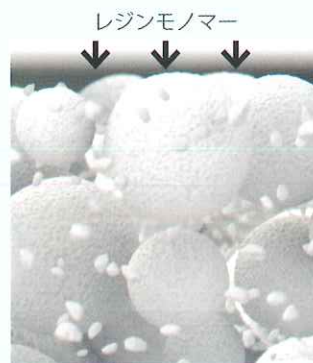


図1

べたつきの要素となるレジンモノマーは、多孔性のスフィアテックフィラー内に含まれる事で(図2) 表層に出にくくなるため、充填時のべたつきを抑えます。

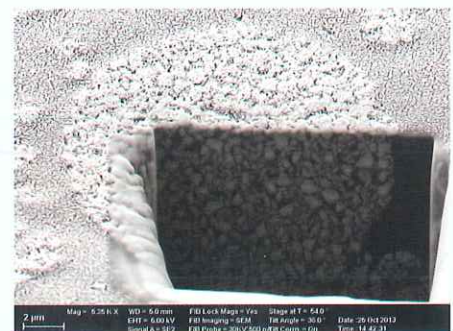


図2

セラメックス スフィアテックワン 各 3.0g 入

| 商品番号 | 商品名 | 価格 |
|----------|--|---------|
| 60701621 | セラメックス スフィアテックワン A1 (VITA A1; B1; C1) | 3,500 円 |
| 60701622 | セラメックス スフィアテックワン A2 (VITA A2; B2; D2) | 3,500 円 |
| 60701623 | セラメックス スフィアテックワン A3 (VITA A3; C2; D3; D4) | 3,500 円 |
| 60701625 | セラメックス スフィアテックワン A3.5 (VITA A3.5; B3; B43; C3) | 3,500 円 |
| 60701624 | セラメックス スフィアテックワン A4 (VITA A4; C4) | 3,500 円 |
| 60701564 | セラメックス スフィアテックワンシェードガイド | 3,500 円 |



プライム&ボンド ユニバーサル

| 商品番号 | 商品名 | 価格 |
|------------|--------------------------|----------|
| 60667350 | プライム&ボンド ユニバーサル 4.0ml | 11,000 円 |
| 60667350ST | プライム&ボンド ユニバーサル スターターキット | 12,900 円 |
| 60667346 | クリックスディッシュ 3 個入 | 2,400 円 |

関連製品

| 商品番号 | 商品名 | 価格 |
|----------|---------------------------|-----------|
| 662010Y | POGO (ポリッシュ&ゴー) ディスク 30 本 | 17,750 円 |
| 662022Y | POGO (ポリッシュ&ゴー) ポイント 30 本 | 17,750 円 |
| 662023Y | POGO (ポリッシュ&ゴー) カップ 30 本 | 17,750 円 |
| 662025Y | POGO (ポリッシュ&ゴー) アソート 30 本 | 17,750 円 |
| 403338 | V4 クリアメタルスターターパック | 60,000 円 |
| 403339 | V4 クリアメタルアップグレードパック | 49,000 円 |
| 60603002 | SDR | 4,260 円 |
| 60603003 | SDR エコパック | 11,270 円 |
| 64450020 | スマートライト FOCUS イントロキット | 138,000 円 |

| 販売名 | 一般的名称 | 届出・認証番号 | クラス分類 |
|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| セラメックス ST One | 歯科充填用コンポジットレジン | 229AGBZX00070000 | II (管理医療機器) |
| プライム&ボンド ユニバーサル | 歯科象牙質用接着材 | 230AGBZX00043000 | II (管理医療機器) |
| POGO (ポリッシュ&ゴー) | 歯科用ゴム製研磨材 | 13B1X10236Y00420 | I (一般医療機器) |
| V4 システム | 歯科充填・修復材補助器具 | 13B1X10236Y03920 | I (一般医療機器) |
| エスディーアール | 歯科充填用コンポジットレジン | 223AFBZX00008000 | II (管理医療機器) |
| スマートライト FOCUS | 歯科重合用光照射器 | 13B1X10236Y03870 | I (一般医療機器) |

*表示価格は、2018年6月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 *仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布借成ビル

カスタマーサービス

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659

<http://www.dentsply-sankin.com>