




軟化象牙質除去用 MI カーバイドバー

コメット **H1SEM** シリーズ (低速・CA用)

**新サイズ** を追加

### 低速でもサクサク切れる

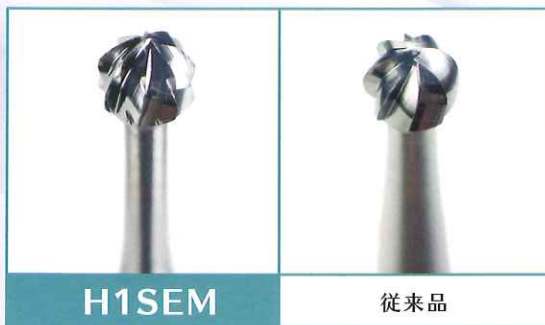

ビッカース硬度 1600 のカーバイド製  
切れ味を高めるブレードデザインなので  
低速でも軟化象牙質をサクサク削れます  
推奨回転数：毎分 1500 回転

### 錆びないカーバイド製

カーバイド製の作業部  
オートクレーブでも錆びません (軸部はステンレス製)

### 低振動なクロスカット

目詰まりを防止するクロスカット  
低振動で軟化象牙質を除去できます



Quality Products  
Made in Germany



＜ この切れ味・この耐久性を貴方に ＞

従来、軟化象牙質の除去にはスチールバー（ビッカース硬度 800）やステンレススチールバー（同 600）が用いられてきた。スチールバーは耐腐食性が低く、ステンレススチールバーは切れ味が悪い。

この H1SEM はその欠点を補ってくれる製品である。素材には耐腐食性の高いタングステンカーバイド（同 1600）が使われており、ステンレスやスチールと比較しても段違いに硬い。またその刃部にはクロスカットが施されており、これにより従来のラウンドバーに比較して振動が少ない。



スリムネックで高い視認性



H1SEMと通常のスチールバー

隣接面へのアクセスでも術野がしっかり見えます



外科処置や肉芽の処置にも



製品動画はこちら

品番	H1SEM-010	H1SEM-012	H1SEM-014	H1SEM-016	H1SEM-018	H1SEM-021	H1SEM-023
最大径 (mm)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3
CA	○	○	○	○	○	NEW	NEW
CAロング	○	NEW	○	NEW	○	NEW	NEW
適正回転数	毎分 1,000 ~ 1,500 rpm						
標準医院価格	980円(1本入) 4,900円(5本入)						

イラストはほぼ実物大です 全長:CA 22mm / CA ロング 26mm

医療機器の分類:一般医療機器 一般的名称:歯科用カーバイドバー

販売名:コメット カーバイドバー

届出番号:27B2X00091000002



株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35  
TEL 06-6773-3333 (内)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2  
TEL 03-3835-2653 (内)

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21  
URL : http://www.momose-dm.co.jp/ TEL 092-575-6060 (内)

お問い合わせは