

Technisil テクニシル

良好な再現性と操作性!! パテタイプの縮合型シリコン印象材



- ① 計量スプーン1杯分のパテに対して、ひも状に出したキャタリストを5cmほど加えて、十分に練和します。(写真は計量スプーン2杯分)
- ② 模型に練和物を盛ります。



〈特徴〉

- 30秒の練和後、4分の操作猶予時間がありますので、余裕をもって作業が行えます。
- 流動性が高いため再現性の良い印象が取れます。
- 硬化後の切削性がよく、余剰部分の切除作業が容易です。

〈包装単位〉

テクニシル 5kg (計量スプーン付)	標準価格 ¥7,000
テクニシル 1.6kg (計量スプーン付)	標準価格 ¥3,700
テクニシル キャタリスト 60ml	標準価格 ¥1,200

※キャタリストの使用本数目安。

・テクニシル(1.6kg)に対してキャタリスト(60ml)1×1本

・テクニシル(5kg)に対してキャタリスト(60ml)1×2本

カラー	ライトブルー(練和後) ※パテ…ホワイト キャタリスト…ブルー
練和時間	30秒
操作時間(23℃)	4分
シヨアA硬度	85
細部再現性	50ミクロン
耐熱温度	140℃
寸法変化	-0.1%

※記載価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は予告なく変更する場合があります。



ベシスフローII

義歯床用アクリル系レジン

管理医療機器

注入型多目的アクリル系レジン

医療機器認証番号 222AFBZX00064000



**耐衝撃性・操作性・審美性が従来よりアップ!!
より強く、より使いやすくなった**

●長い操作余裕時間

練和開始後およそ3分(23℃)までは流動性があるため、操作時間に余裕があります。

粉液練和 20秒	脱泡 10秒	流し込み 2分30秒以内	加圧重合 30分~60分
-------------	-----------	-----------------	-----------------

【物性データ】

曲げ強度 (MPa)	90.0
伸び (mm)	14.6
表面硬度 (Hv)	15.6

重合条件: 重合温度55℃
重合圧力 0.2MPa
重合時間 30分
標準粉液比 (10g / 6mℓ)

【用途】


●一般義歯及び、コーヌステンチャー等のアタッチメント義歯の製作

包装単位	●セット/粉末650g×1、 液材500mℓ×1、湿和カップ、 スパチュラ、粉計量スプーン、 シリンダーカップ、スポイト 標準価格 ¥9,800	●単品 ・粉末500g(アルミパック(各色)) 標準価格 ¥4,800 ・液材500mℓ (スポイト付) 標準価格 ¥3,400 ・液材4ℓ 標準価格 ¥24,000
------	--	--

色調	④LFピンク	⑤クリアー	⑥LFα
----	--------	-------	------

※④、⑥は縦継入。

■耐衝撃性の向上

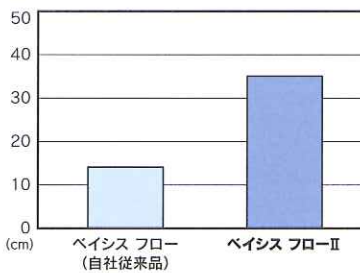

耐衝撃性試験:
落球試験で衝撃に耐えうる
最大高さの数値を計測。

従来品と比べ、耐衝撃性が向上
し、割れにくくなりました。

プロビファイン

歯科汎用アクリル系レジン

管理医療機器

急速硬化性常温重合レジン

医療機器認証番号 223AFBZX00191000



色調	A1	A2	A3
	④LFピンク	⑤クリアー	⑥LFα

※④、⑥は縦継入。⑥は④に比べ透明度を抑えた色調です。

包装単位	●粉末 ・50g (計量カップ コリンスキー筆 No.1付) ・250g (計量カップ コリンスキー筆 No.1付) ●液 (ノーマルタイプ・ファーストタイプ) ・100mℓ (スポイト ワンタッチキャップ付) ・260mℓ (スポイト ワンタッチキャップ付)	標準価格 ¥2,600 標準価格 ¥5,600 標準価格 ¥2,600 標準価格 ¥3,400
------	---	--

※粉末はノーマルタイプ・ファーストタイプ共用です。

流し込み時の高い流動性と筆積み時の垂れ難く、高い築盛性を兼ね備えた常温重合レジン!!
良好な操作性・審美性・耐久性を有し、プロビジョナルレストレーションにも適しております。

※記載価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は予告なく変更する場合があります。

山八歯材最新情報はホームページで... ~健康は歯から~ (お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております) www.yamahachi-dental.co.jp/

●ご用命は...



製造販売元
山八歯材工業株式会社
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1
TEL (0533) 57-7121 FAX (0533) 57-1764
Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>
E-mail box@yamahachi-dental.co.jp