

PI PASTE



■ 特長

- ◆ 計量、練和不要
チェアタイムが短縮できる
- ◆ 硬化しない
顎をすらすらの運動時も診査できる
何度でも繰り返し診査できる
- ◆ 厚みがない
精度の高い診査ができる

プレッシャー インジケーター ペースト

フルデンチャー・パーシャルデンチャー・インレー・クラウン などの異常位を正確に、簡単に確認できます

■ 使用方法



step 1
ペーストを専用フデで塗布



step 2
ペースト面にスプレーを吹き付ける



step 3
適合状態を確認



step 4
リムーバーを使用しペーストを除去

■ P.I.P. 単品商品 必要に応じて単品でお求めいただけます

ペースト ジャー式 ¥5,800 (税別) ペースト ポンプ式 ¥9,500 (税別) ペースト チューブ式 ¥4,600 (税別)



- 練和の必要がなく、必要時にすぐ使用できます

容量 36g
筆/ハード・ソフト各1本
ヘラ5本 練和紙 1冊



- 簡単に取り出すことができ清潔に使用できます

容量 113.5g
筆/ハード・ソフト各1本
練和紙 1冊



- 必要量だけを取り出すことができます

容量 29g
筆/ハード・ソフト各1本

リムーバー ¥1,300 (税別)

スプレー (シリコン乳液) ¥2,300 (税別)

筆/ハード・ソフト 各¥700 (税別)

■ P.I.P. セット ¥8,000 (税別)



- P.I.P. シリーズをすべて取りそろえたお得なセットです。お求めやすい価格となっております導入におすすめます

- ペースト ジャー式 36g 1個
- スプレー 120ml 1本
- リムーバー 120ml 1本
- 筆/ハード・ソフト各1本 ● ヘラ5本 ● 練和紙 1冊



容量 120ml

- 確認後はティッシュペーパーにリムーバーを染み込ませ、ペーストをきれいに拭き取ります



容量 120ml

- スプレー使用でP.I.P. ペーストが口腔内に付着しにくくなり、異常部位を確認しやすくなります



入数 5本

■ P.I.P. トライアルキット ¥5,800 (税別)



- P.I.P. ペースト(36g) と P.I.P. スプレー・リムーバーのミニサイズがセットになったトライアルキットです

- ペースト ジャー式 36g 1個
- スプレー 30ml 1本
- リムーバー 30ml 1本
- 筆/ハード・ソフト各1本
- ヘラ5本 ● 練和紙 1冊

製造元 キーストン インダストリーズ
made in U.S.A.

ミジィ P.I.P. ペースト 届出番号 27B2X00041000085
ミジィ P.I.P. スプレー 届出番号 27B2X00041000086
ミジィ P.I.P. セット 届出番号 27B2X00041000087
ミジィ P.I.P. トライアルキット 届出番号 27B2X00041000088

*仕様および外装は製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。