

修復物の隣接面の形態修正・最終研磨に！


コンタックEZ

イーズ

サブジンジバルストリップ

歯肉縁下に挿入しやすい
幅狭ストリップ

新登場

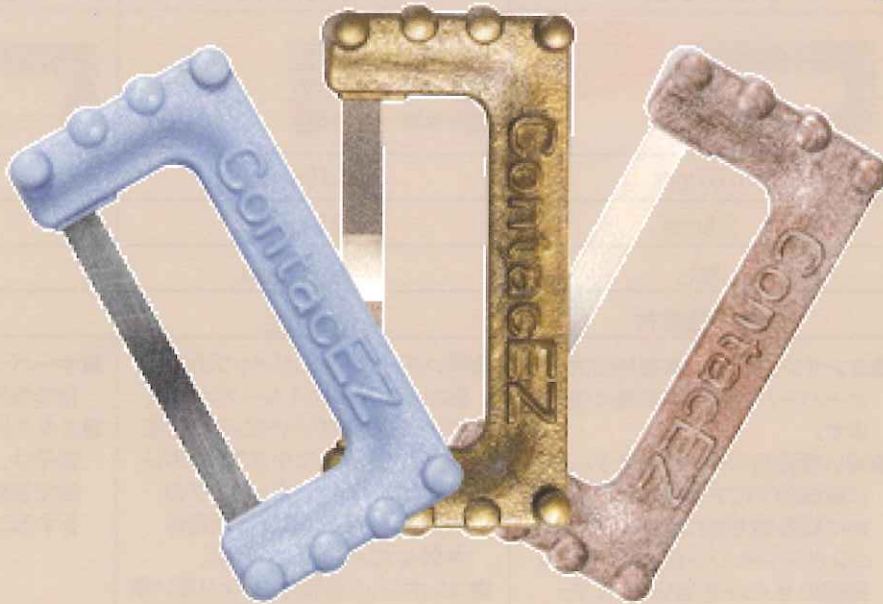

ブルーナロー
ストリップ

CUT



- ・コンポジットレジン修復時の大きなオーバーハングの除去
- ・間接修復物周囲の大きな余剰セメントの切り離し

ゴールドナロー
ストリップ

TRIM



- ・コンポジットレジン修復時の小さなオーバーハングの調整
- ・間接修復物周囲の小さな余剰セメントの除去

カッパーナロー
ストリップ

POLISH



- ・修復物の最終研磨

- サブジンジバルストリップ アソート5個入
内容：ブルーナロー×2個、ゴールドナロー×2個、カッパーナロー×1個入
- サブジンジバルストリップ ブルーナロー5個入
- サブジンジバルストリップ ゴールドナロー5個入
- サブジンジバルストリップ カッパーナロー5個入

歯科医院様参考価格

¥4,500




コンタックEZ イーズ サブジンジバルストリップ




コンタックEZ サブジンジバルストリップシステムは、到達が困難な歯肉縁下部位の、隣接面の修復物辺縁の修正およびオーバーハングを除去し、自然な歯の外形に清掃研磨ができるように、特別に設計された幅狭ストリップです。サブジンジバルストリップは、歯肉縁下の湾曲した修復物辺縁に容易にアクセスでき、オーバーハングを除去することができます。

間接修復物の形態修正方法

- ① 最終セメンティング前に間接修復物(クラウン等)を試適します。
- ② 間接修復物をわずかに移動させ、ストリップの研削面を間接修復物の切削面に向けて歯間部に挿入します。
- ③ 間接修復物を患歯の正しい位置に保持し、ストリップを頬舌側方向に前後に動かして、間接修復物の隣接面を研削し、形態修正を行います。この際に上下に力を加えないでください。
- ④ 近遠心面のいずれかに圧力がかかっている場合は、均等の抵抗になるまで調整を繰り返します。

種類	ブルーナロー	ゴールドナロー	カッパーナロー
外観	 CUT	 TRIM	 POLISH
ブレード厚さ	0.07mm	0.10mm	0.06mm
ストリップ幅	2.5mm	2.5mm	2.5mm
ダイヤモンド粒子	なし	片面42μm	片面25μm
鋸歯	上下鋸歯付	鋸歯なし	鋸歯なし
用途	<ul style="list-style-type: none"> ●コンポジットレジン修復時の大きなオーバーハングの除去等に使用します。 ●薄い鋸歯付ストリップのため、容易に歯肉縁下にアクセスでき、穏やかに頬舌側方向に動かし、余剰のコンポジットレジンおよびクラウン周囲のセメントを切り離します。 	<ul style="list-style-type: none"> ●厚いダイヤモンドストリップの中央部から歯間部にスムーズに挿入でき、左右のダイヤモンド研削面を用いて、迅速に小さなコンポジットレジンのオーバーハングの調整および間接修復物周囲の余剰セメントを除去します。 ●コンポジット充填時の、より良い接着のために、歯肉縁下の窩洞形成周辺のバイオフィルムの除去にも使用可能です。 	<ul style="list-style-type: none"> ●オーバーハングの除去後の修復物の清掃研磨に使用します。 ●エキストラファインダイヤモンド粒子は、1ステップで簡単に健康的で自然な歯の外形に最終研磨をすることができます。

- ▶ 片手で操作ができ、適切なコントロールが可能で、手の疲労感を減少させます。
- ▶ 柔軟なストリップのため、自然な歯の外形に形態修正を行うことができます。
- ▶ オートクレーブ滅菌(132℃、10分間)および再使用(目安:3~5回)が可能です。

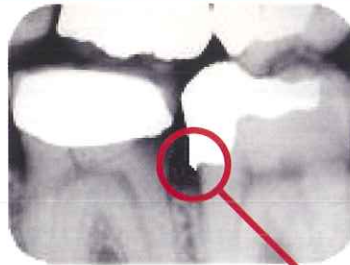

歯肉縁下にオーバーハングが残存しています。



カッパーナローストリップを歯肉縁下の部位に使用しています。

本紙に掲載されている価格は2018年10月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

一般医療機器 歯科研削用ストリップ 医療機器届出番号: 13B1X10098130001
 製造業者: ContactEZ, LLC (コンタックイーズ エルエルシー社) 製造国: アメリカ合衆国

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

製造販売業者  EIKO CORPORATION

株式会社エイコー
 〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
 TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655

販売業者  株式会社モリムラ

株式会社モリムラ
 〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
 TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は