

TAKAZONO

小型包装品用高圧蒸気滅菌器

SteriWit V



小型・軽量・シンプル操作の高圧蒸気滅菌器



SteriWit V

SV-TA1N1

株式会社 **タカゾノ**

シンプル機構。
でもしっかり滅菌。



SteriWit V (ステリウィット ブイ) は
軽量・コンパクトな設計ながら、18cm丸カストを
2個収納可能な小型包装品用高圧蒸気滅菌器です。

小型包装品用高圧蒸気滅菌器

SteriWit V

SV-TA1N1

ステリウィット ブイ



こんなお客さまにおススメ！

滅菌作業は
1日1~2回

安価でも
しっかり
滅菌したい

サブ機を
探している

操作は
シンプル
がいい

コンパクトで簡単操作の高圧蒸気滅菌器

Point 1



設置場所を選ばない、コンパクト・軽量設計

シンプル設計で大幅な小型化・軽量化を実現。サイズを気にせずに置き替え可能です。



Point 2



衛生的な『毎回給水方式』

つねに清浄な水を使用する『毎回給水方式』のため、衛生的です。蒸留水や精製水のみでの滅菌にも対応しています。



Point 3



待機電力を自動的に抑える『ECOモード』

SteriWit Vを操作していない状態で10分間経過すると、自動的に『ECOモード』に切り替わります。待機電力をカットし、ムダな電力消費を抑えます。



6ステップの簡単操作

シンプルに徹した設計だから、手順が覚えやすく、操作は簡単です。

スタート
Start



1. 専用給水カップで
チャンバー内に注水



6. 乾燥運転終了後、乾燥完了を
アラームでお知らせ



2. 被滅菌物を入れて
ドアをロック



5. ドア開放で、乾燥運転が
自動スタート



3. 操作パネルのスタートキー
で滅菌開始



4. 滅菌・排蒸完了を
アラームでお知らせ

シンプル設計の操作パネル

ドアLED


ドアの開閉状態を表示。
LEDの点灯時はドアが閉まっている状態です。

7セグLED

滅菌温度、工程時間を表示。

+キー/-キー

滅菌時間や乾燥時間を設定する際に使用。

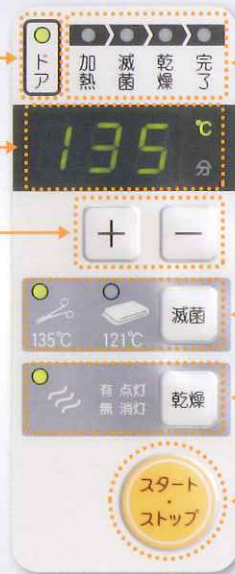

工程LED

加熱から完了にかけて、現在の動作状態をLEDで表示。

滅菌キー

135°C・121°C・乾燥のみが選択可能。

乾燥キー

乾燥有り・無しが選択可能。

スタート・ストップキー

機械を動作開始または停止します。

『毎回給水方式』でつねに衛生的



ここに
給水!



SteriWit Vは『毎回給水方式』を採用しているため、いつも清浄な水で滅菌作業を行います。使用できる水は水道水・蒸留水・精製水に対応しています。

ドアを開けると乾燥が自動でスタート



ドアは
◀まで
開放で
OK!


滅菌・排蒸完了後、アラームでお知らせ。その後にドア開放で、乾燥工程が自動的に開始します。ドアの開け忘れを防ぐ再アラーム機能も備えています。

小型包装品用高圧蒸気滅菌器 SteriWit V ステリウィット ブイ

■本体仕様

品名	小型包装品用高圧蒸気滅菌器 SteriWit V
型式	SV-TA1N1
外形寸法	幅412×奥行469×高さ344mm
本体質量	約21kg
使用電源	AC100V:50/60Hz
消費電力	950W
入力装置	シートキースイッチ
表示	7セグLED・LED
缶内有効寸法	φ220×340mm
収納力	18cm丸カスト2個又は角カスト(NS-250-6)1個
貯水槽容量	3.5L
乾燥方式	ヒーター加熱(ドア開け乾燥)
滅菌温度	121℃・135℃
滅菌時間	121℃/24~99分 135℃/7~99分
乾燥時間設定(標準)	0~99分(30分)
圧力計	0~0.4MPa
安全弁吹出圧力	0.26MPa
安全装置	安全弁・温度ヒューズ・空焚き防止温度ヒューズ・漏電ブレーカー
付属品	スノコ専用給水カップ
使用環境	温度範囲5~40℃・相対湿度MAX80%(5~31℃) MAX50%(31~40℃)・標高2,000m以下
使用水	水道水・蒸留水・精製水
オプション	角カスト・架台・金網バスケット・積重式トレー・用取っ手
消耗品	小型滅菌器用洗浄剤
電撃保護の形式と程度	クラスI B形
医療機器一般の名称	小型包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器クラス	クラスII(特定保守管理医療機器)
認証番号	227AGBX00084000
対応規格	JIS規格(JIST7324:2005等) EMC規格(JISC1806-1:2010) 電気用品安全法

■外形寸法図

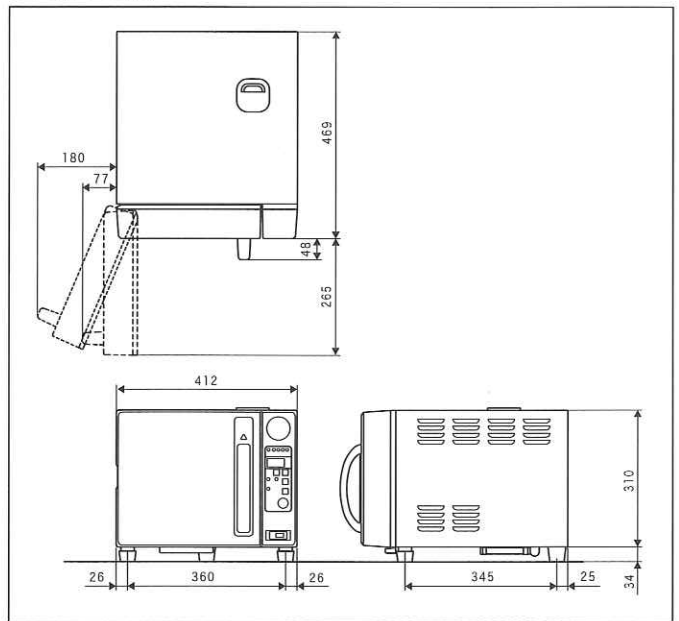

SteriWit V を安全にご使用いただくために

電源は、必ず交流100V 15A以上の医用コンセント(アース付き)に接続してください。また、本体を電源に接続する際、テーブルタップや変換プラグ等は使用しないでください。(ともに故障および火災の原因となります。)

■オプション

<h3>架台</h3> <p>●外形寸法: 幅480×奥行480×高さ750mm</p>	<h3>積重式トレー</h3> <p>●外形寸法:幅140×奥行275×高さ30mm</p> <h3>トレー用取っ手</h3> <p>※最大3段まで収納可能</p>
<h3>角カスト</h3> <p>●外形寸法:幅180×奥行320×高さ110mm</p> <p>※上下開閉タイプ</p>	<h3>金網バスケット</h3> <p>●外形寸法:幅200×奥行300×高さ145mm</p>

■消耗品

洗浄剤

洗浄剤を使用することで、チャンバー内の普段の清掃では取れない、こびりついた汚れをスツクリ落します。

※一箱12袋入り

※ご注意: ご使用の際は、取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。
※機能向上のため予告なく仕様を変更することがあります。カタログ掲載の製品については印刷の関係で製品カラーが異なる場合がありますのでご了承ください。



タカゾノは、社会貢献活動と環境保全活動を積極的に推進しています。

<p>積極的な障がい者雇用 特例子会社(株)タカゾノリースを設立し、障がい者の雇用を推進しています。</p>	<p>ピンクリボン運動 オフィシャルサポーターとして、日本乳がんピンクリボン運動を支援しています。</p>	<p>エコ活動 地球温暖化防止のために電気使用量の削減やエコ運転等に取り組んでいます。</p>	<p>かものはプロジェクト カンボジアの子どもたちを支援するNPO法人の活動に協賛しています。</p>
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

株式会社 タカゾノ

営業本部 東京都港区芝公園2丁目4番1号 ミナトビル8階14号 ☎105-0011 ☎03(3578)3700(代) Fax03(3578)3710

札幌営業所 ☎011(788)1570	横浜営業所 ☎045(914)7100	高知 S S ☎088(880)3171
函館 S S ☎0138(22)8355	新潟営業所 ☎025(234)3671	北九州 S S ☎093(923)5454
旭川営業所 ☎0166(34)8820	金沢営業所 ☎076(238)9751	福岡営業所 ☎092(513)5115
釧路 S O ☎0154(31)8102	長野営業所 ☎0263(39)7012	長崎営業所 ☎0957(49)9191
青森 S O ☎017(721)6678	静岡営業所 ☎054(654)3351	熊本営業所 ☎096(334)5231
盛岡営業所 ☎019(634)1434	名古屋営業所 ☎052(528)3777	大分営業所 ☎097(503)9535
仙台営業所 ☎022(246)5860	京都営業所 ☎075(604)4701	宮崎 S S ☎0985(63)4741
秋田 S O ☎018(868)6721	大阪営業所 ☎06(6903)5300	鹿児島営業所 ☎099(281)8775
郡山営業所 ☎024(966)3780	大阪南営業所 ☎072(420)0025	沖縄営業所 ☎098(884)6336
北関東営業所 ☎029(304)0170	神戸営業所 ☎078(579)8810	
宇都宮 S O ☎028(651)1551	山陰 S S ☎0852(55)7274	
前橋 S O ☎027(256)7330	岡山営業所 ☎086(246)2200	
さいたま営業所 ☎048(710)7770	広島営業所 ☎082(850)0333	
千葉営業所 ☎047(403)4881	山口 S S ☎083(972)8900	
東京営業所 ☎03(5917)5531	高松営業所 ☎087(886)8151	※[SS]はサービスステーション
多摩営業所 ☎042(635)1620	松山営業所 ☎089(905)2644	※[SO]はサテライトオフィスの略称です。

東京本社 東京都港区芝公園2丁目4番1号 ミナトビル8階14号 ☎105-0011 ☎03(3578)5700(代) Fax03(3578)5712
大阪本社 大阪府門真市柳田町4番17号 ☎571-0038 ☎06(6903)2000(代) Fax06(6903)2225

●お買い求めお問い合わせは.....

CTL-405D 2018.02.015.S