

ドライマウスの義歯装着者に適した口腔保湿剤

Denture Wet_{10g}

デンチャーウェット

入れ歯がくちびるやほっぺたにくっついて入れにくい・しゃべりづらい

こんな方に!

入れ歯が乾いてしゃべりにくい

入れ歯に食べ物がつきやすい

従来の「水溶性」の口腔保湿剤とは違います!

入れ歯表面のスベリ(潤滑性)を良くする**油性**の口腔保湿剤です。

油性と水溶性の口腔保湿剤の違いは?

	油性	水溶性
目的	入れ歯表面に塗布し、口唇や頬粘膜とのくっつきを抑えます。	粘膜の乾燥予防及び保湿
効果	「スクワランオイル」の働きで入れ歯の表面を滑沢にし、潤いをあたえます。「オリーブオイル」の働きで保湿と水分保持。	粘膜の保湿と蒸散防止。但し、水に溶けるため唾液で流れやすい。



デンチャーウェット 10g

標準価格
980円(税別)

MADE IN JAPAN

発売元: (株)デントケア
大阪府寝屋川市豊里町17-16

問合せ先: **072-828-8590**
<http://dent-care.net/>
E-mail: info@dent-care.net

Denture Wet

デンチャーウエット

ドライマウスの義歯装着者に適した口腔保湿剤

■ 特 長

「スクワランオイル」の働きで、入れ歯の表面を滑沢にし、潤いをあたえます。ドライマウス患者の入れ歯表面に塗布することで、口唇や頬粘膜とのくっつきを抑えます。

■ Q & A



味はありますか？

無味無臭です。



塗布して効果はどれくらい続きますか？

1回塗れば数時間の効果が持続します。但し、食事内容等により違いがありますので、効果がなくなったら塗りなおしてください。



1本あたりの使用回数はどれくらいですか？

少量ですから、約2ヶ月使用できます。1回の使用量は米粒ぐらいを目安に使用して下さい。入れ歯の唇側部、頬側部、舌側部にうすく塗布してください。(入れ歯の大きさ、使用頻度等により違いがあります。)




どの義歯にも使用できますか？

一般的な義歯床に使用できます。



■ 使 い 方

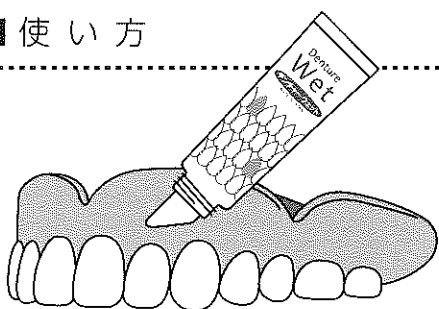

- ①入れ歯を洗浄し、水分を拭き取ります。
- ②入れ歯の表面に少量の「デンチャーウエット」を出します。
- ③義歯全体に広げるように塗ります。

※食品添加物のみを使用していますので、誤って飲み込んでも問題ありません。

〈弊社関連商品〉



デンチャージェル

義歯装着者に適した口腔保湿剤

口腔粘膜用の保湿剤で、従来品よりも粘性があるため、義歯装着者にも利便性があります。

小袋(2.5g×30袋) チューブ 45g

標準価格
2,500円(税別)

標準価格
1,400円(税別)



ウエットエイド

要介護者向けの口腔保湿剤

ドライマウスや乾燥した唇には湿潤用ジェルとして、要介護者の乾燥痰に、垂れない泡状にして軟化除去ができます。

100mL

25mL

標準価格
1,430円(税別)

標準価格
380円(税別)