



除菌用ワイプ

バイオサニタイザーワイプ

乾燥後も効果が持続するバイオサニタイザーに ワイプタイプが **新登場!**

除菌・抗菌・消臭

院内感染
防止

マイクロファイバー不織布を採用

一般的な不織布に比べ、細くて長い繊維を使用している
ので、汚れの拭き取り性能にすぐれ、また、拭き取った汚
れの再付着も防止します。

除菌・抗菌技術バイオトロール®を使用

塩素、アルコール不使用でありながら、様々な菌やウイルス
に作用することが確認されています。



持ち運びが簡単なピロータイプ

置き場所を選ばず詰め替えの手間もない120枚入
ピロータイプです。マイクロファイバー不織布は薬液が乾燥
しにくい製法で編まれており、最後の一枚まで効果が変わら
ない状態で使用可能です。訪問診療にもオススメです。

数量限定

**携帯性にすぐれた
お試しパック
(20枚入)も用意!**



用途

頻繁に接触する環境表面の清拭用としてご使用ください。

使用例：ME 機器類、手すり、ドアノブ、タブレット、キーボード、PHS、待合室、玄関、車椅子など



SHOFU INC.

バイオトロール®の除菌・抗菌のしくみ

バイオトロール®は陽イオン界面活性剤(第4級アンモニウム塩)と疎水性ポリマーに基づいた技術です。

この技術は主に懸濁コロイドの殺菌成分の配列と構造化に因るもので、これをアンフィセルと呼称しています。

上記構造化のアンフィセルにより、濡れた場所や清拭後に乾燥しても変わらず除菌効果が発揮され、付着菌はもちろん浮遊・落下菌やウイルスに対しても一度の接触で十分な物理的除菌効果を持つことが報告されています。

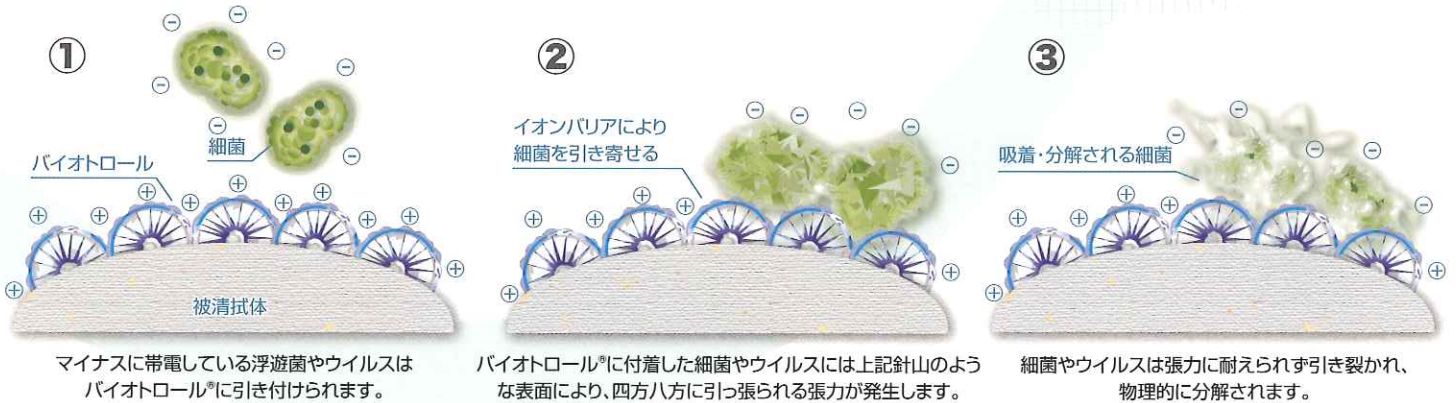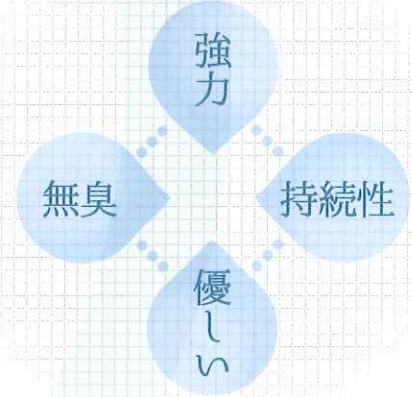

※イメージ図

成分

ジデシルジモニウムクロリド、塩化ベンザルコニウム、ポリヘキサメチレンピグアニド、ジメチコン

材質：ナイロン、PET

寸法：150mm×200mm



Q & A

Q. ワイプの消費期限は？

A. 未開封で約2年、開封後はなるべく早めにご使用ください。

※開封後は必ず蓋を開けてください。

Q. より効果的な清拭法は？

A. 指先でワイプを挟みながらS字を描くように拭き取ってください。

【使用上の注意】

バイオトロール®は生分解されるため、様々な箇所に使用可能ですが、マイクロファイバー不織布は拭き取り性能にすぐれている反面、表面の柔らかい箇所への清掃時には傷をつける場合があります。漆、金銀箔、塗装面へのご使用はあらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。

包装・価格

バイオサニタイザー ワイプ



120枚入 ¥2,400

数量限定



お試しパック 20枚入 ¥500

関連製品

バイオサニタイザー



500mL ¥3,800

バイオサニタイザー スプレー容器



(500mL用) 1本 ¥1,200

取扱い店

ご使用の際は製品に記載の注意事項等をよく読んでお使いください。

このカタログの記載価格は2019年3月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。