


NEW

ピカット

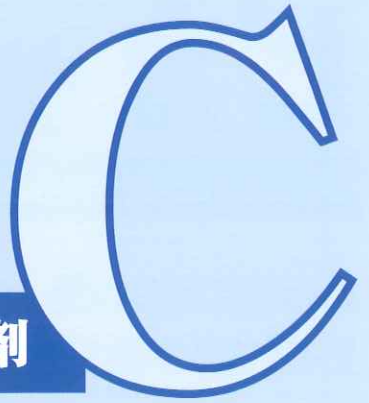

セラミック / ハイブリッドレジン用鏡面仕上研磨剤



鏡面

プレス
セラミック

ポーセレン
セラミック


ハイブリッド
レジン

ジルコニア
セラミック

陶材をグレースしたジルコニアにもご使用いただけます！
ジルコニアと陶材が同時に研磨できてとても便利

人造ダイヤモンド粉末とセラミック微粉をブレンドした「ファインハイブリッド砥粒」を採用
幅広い材質に使える多用途性と基本的な艶出し性能を維持しつつ、低コストを実現しました

- ◆ 大容量「50グラム入り」!! ダイヤモンド入り研磨剤で1グラムあたり¥180の低コスト
- ◆ 研磨剤が劣化しにくい「アルミケース」包装
- ◆ 細かい破片はまとめて『湯せん』で再使用できて経済的!!

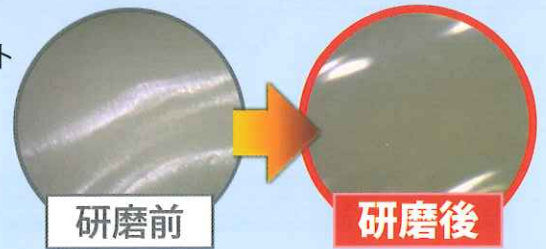

■用途■

プレスセラミック、ポーセレン、歯冠用ハイブリッドレジン (CAD/CAM冠を含む) の最終仕上げ研磨用
条件次第では、ジルコニアセラミックにもご使用いただけます

使い方ワンポイント!

「ピカットC」は様々な材質でご使用いただける分、それぞれの材質にあった使い方をさせていただくことで初めてその効果を発揮します

硬めの材質

ジルコニアセラミック
プレスセラミックの場合、

本品適量を **Step.1**
ブラシに塗布して研磨

研磨し始めは表面がくすんだ状態に
なりますが、次第に艶が出てきます

回転数 低~中速
力 普通

おすすめツール
かためのロビンソンブラシ

もし艶があまり出なくて
表面がくすんだままの
場合は...

(Step.2へ)

Step.2

何も付けていない
ブラシ、バフで研磨

次第にカラッと艶が出てきます!

回転数 超低速
力 ソフトタッチ

おすすめツール
ロビンソンブラシ、バフ等 (普通
乗らかめ)

それほど硬くない材質

ハイブリッド
CAD/CAM冠の場合、

本品適量を
ブラシ、バフに塗布して研磨

この段階では、艶が出ずに表面がくすんだ状態の
場合がありますが、問題はございません

Step.1

回転数 低速
力 ソフトタッチ

おすすめツール
ロビンソンブラシ、バフ等

(Step.2へ)

内容量 50g

標準定価 (税別) ¥9,000

ピカットZ

大容量追加

ジルコニアセラミック専用鏡面仕上研磨剤

最高級に美しい艶とキズ取り効果を求めて...
ダイヤモンド砥粒含有率 65%以上と贅沢に配合しました

- ◆ 少量使用ユーザー用「5グラム入り」と、コスト重視の大容量「20グラム入り」
- ◆ 研磨剤が劣化しにくい「アルミケース」包装
- ◆ 細かい破片はまとめて『湯せん』で再使用できて経済的!!

■用途■

ジルコニアセラミックの最終仕上げ研磨用

フルジルコニアにおすすめ!
真珠のような美しい艶が出ます

一般医療機器 歯科用研磨器材 届出番号: 27B3X00027000058

美しい艶出し効果に、Ra 0.1、Rz 0.9 を改善する優れた傷取り能力をプラス!

データで検証!



鏡面

ジルコニア
セラミック

5g入り



内容量	5g	20g
標準定価 (税別)	¥2,900	¥9,000



20g入り

待望の20グラム入り
ついに登場!

つや出し・仕上用研磨剤 推奨使用用途一覧表

◎:推奨 △:条件によっては使用可

商品名	床用 レジン	歯冠用 硬質レジン	歯冠用 ハイブリッドレジン (CAD/CAM冠含む)	貴金属 (金パラ等)	コバルト クロム 合金	セラミック	プレス セラミック	ジルコニア
ピカットZ	-	-	-	-	-	-	◎	◎
ピカットC	-	△	◎ (早い)	-	-	◎	◎	△
ピカットオレンジ	◎	◎	◎	◎ (明るい艶)	◎ (明るい艶)	△	-	-
コバルトファインG	-	-	-	-	■ (傷取り)	-	-	-
オールシャイン	◎	△	△	◎	◎	-	-	-
ルージュ白棒	△	△	△	◎	◎	-	-	-
ルージュピカール	◎	◎	◎	-	-	-	-	-



有限会社 秋山産業

〒572-0865 大阪府寝屋川市小路北町7番29号

TEL (072)822-6936 FAX (072)822-6932

E-Mail: info@akiyama-sangyo.jp

有限会社秋山産業のホームページ: https://akiyama-sangyo.jp