

手をかざしてシュッと消毒

tette

アルコールディスペンサー

自動手指消毒器



シュツ

「テッテ」TE500  
¥4,900+消費税

指定医薬部外品

速乾性すり込み式  
てゆび  
手指消毒剤AL



手のひらに  
ワンプッシュ



折りたたんで  
廃棄可能

組成： エタノール 72%  
ベンザルコニウム塩化物 0.05%

分類： アルコール系

包装： 1L (ポンプ付減容タイプ容器<sup>※</sup>)

※ 減容タイプ容器は、使用后折りたたんで  
廃棄でき、ごみ削減が可能です。

【効能・効果】

◆ 手指・皮膚の洗浄・消毒

【副作用】

◆ 紅斑、掻痒感、浮腫等の過敏症状または刺激症状があらわれることがあるので、  
このような場合には使用を中止すること。

【用法・用量】

◆ そのまま手指又は皮膚に噴霧又は塗布してください。

手指消毒剤 AL 1L  
¥2,000+消費税

製造販売元：サンケミファ株式会社 仙台市青葉区芋沢字大竹新田 8-1 販売名：フレガード AL

SD SUNDENTAL CO.,LTD.

## 特長



### 自動噴射でシュッと消毒

手をかざすとセンサーが感知して消毒液を噴射するので本体に触れることなく、清潔に消毒することができます。



### 手指消毒剤 AL を利用可能

手指消毒剤 AL や市販のアルコールタイプの消毒剤が利用できます。  
※ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水には使用できません。



### 小型で大容量の 500ml ボトル

小型で乾電池式なので置き場所を選びません。



### 残量が見やすい透明ボトル

消毒液の補充やお手入れがカンタンにできます。

## 仕様



商品名	アルコールディスペンサー「テッテ」
品番	TE500シロ
本体価格	¥4,900+消費税
外形寸法	約120(W)×212(D)×188(H)mm (トレー使用時) 約102(W)×162(D)×180(H)mm (本体のみ)
質量	約330g (トレー、消毒液、乾電池を除く)
材質	PP (本体、ボトル、トレー)
電源	単3形アルカリ乾電池×4本 (別売)
容量	約500ml
動作環境	温度：5～35℃ 湿度：30～80% (非結露)
保存環境	温度：-10～55℃ 湿度：5～80% (非結露)
セット内容	本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、 取扱説明書(保証書付) ※単3形アルカリ乾電池、消毒液は別売りです。
JAN	4971660775613

### ⚠️ 安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。●本製品は液体アルコールタイプの消毒液専用です。ジェルタイプの消毒液は絶対に使用しないでください。●次亜塩素酸水は使用できません。●乾電池やアルコール消毒液が入ったまま直射日光の強い所や炎天下の車内など高温の場所に放置しないでください。●本製品は電子部品を使用した精密機械です。取扱いにご注意ください。●火気のある場所でのご使用はしないでください。●転倒・落下にご注意ください。●本製品の内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●本製品は日本国内専用です。This product is for use only in Japan. ●商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。●キングジム、KING JIM、テッテ、tette は、株式会社キングジムの商標または登録商標です。●このパンフレットの内容は2019年10月現在のものです。

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で。

**サンデンタル株式会社**

<http://www.sundental.jp/>

本社 大阪市中央区南船場4丁目8番9号 TEL: 06-6245-0950  
東京 東京都台東区上野3丁目7番3号 TEL: 03-3836-9347  
福岡 福岡市博多区博多駅南4丁目3番9号 TEL: 092-482-2318