



DENTAL PLASTER DISK FOR CAD/CAM

# SAN ESU DISK G

サンエスディスクG

歯科用CAD/CAM切削加工用石膏ディスク

サンエスディスクGは、歯科用CAD/CAM切削加工用の石膏ディスクです。

独自の配合により高い切削性を追求しながらチッピングを抑制し、

WAXの加工パスによる切削を可能にしました。

切削時間の短縮により作業効率の向上やコストダウンを実現します。

18mm・25mmの2種類をご用意しておりますので加工機・用途に応じてディスクをお選びいただけます。



φ98×T25mm

切削時間  
短縮滑らかな  
加工面切削バーの  
摩耗低減

φ98×T18mm

サンエス石膏株式会社

SAN ESU GYPSUM CO.,LTD.

# 切削時間の短縮を実現したCAD/CAM用石膏ディスク

## 特長

- 1 切削時間の短縮に特化した石膏ディスクになります。
- 2 切削加工後の表面性状も良好です。
- 3 適度なディスク強度により、ミリングバーの摩耗を低減させ、ランニングコストを抑えます。
- 4 厚さは18mm、25mmの2種類からお選びいただけます。

## 用途

歯科用CAD/CAM切削加工用石膏ディスク

- 1 CAD/CAMシステムによる製作物の試適用模型  
高い精度が求められるロングスパンのブリッジやインプラント症例において、適合を確認するための試適用模型を製作できます。
- 2 ポーセレン築盛作業用模型など  
切削加工した模型をポーセレン築盛作業時の模型にお使い頂くことで、より患者様の口腔内をイメージできます。
- 3 ジルコニア冠などの納品用模型  
製作物の納品用模型としてお使いいただけます。

## 包装及び形態

直径98mm 厚さ18mm アイボリーイエロー 1枚入り箱×5/PC  
直径98mm 厚さ25mm アイボリーイエロー 1枚入り箱×5/PC  
\*輸送時には、小箱5個入り/大箱で発送いたします。

## 使用上の注意事項

- 1 本材は、石膏の硬化体です。扱いによっては、欠けや割れが発生することがございますのでご注意ください。
- 2 乾式加工機でお使い下さい。湿式加工機には対応しておりません。
- 3 本品の切削粉が目に入らない様ご注意ください。保護メガネの着用を推奨します。万一目に入った場合は、直ちに大量の流水で洗浄し眼科医の診断をうけて下さい。
- 4 切削加工後の模型表面に強度が必要な場合は、石膏模型表面強化剤の使用をおすすめいたします。  
推奨品：SSSコート (3ml×4×10) 高精度石膏模型表面強化剤
- 5 CAD/CAMの設定に関しては、ご使用になられている機器のメーカー様へお問合わせ下さい。



大阪本社 | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F  
TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

デンタル事業部

東京オフィス | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-6 福利久ビル5F  
TEL(03)5283-6201(代) FAX(03)5283-6205

大阪オフィス | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F  
TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

福岡オフィス | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル6F  
TEL(092)413-5220(代) FAX(092)413-5222

URL : <http://www.san-esugypsum.co.jp>  
E-mail : [headquarter@san-esugypsum.co.jp](mailto:headquarter@san-esugypsum.co.jp)

サンエス石膏

販売元:サンエス石膏株式会社

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ