

# Lifemate S

生体情報モニタ SVM-7200シリーズ

体調変化の見守りに、  
手軽に使える安心を。


NIBP  
非観血血圧

SpO<sub>2</sub>  
経皮的動脈血  
酸素飽和度

PR  
脈拍数



SVM-7260

-  機能を搭載。早く、やさしく血圧測定
- 8型タッチパネルを採用。直感的でわかりやすい操作性
- 小型、軽量、ハンドル付きで持ち運びやすく。小型の架台\*1も用意
- 約6時間連続使用可能なバッテリーを搭載、いざという時も安心
- より安全なモニタリングをサポートする、「SI\*2」「RPP\*3」も表示

\*1 オプション KC-170P

\*2 SI (Shock Index): 出血性ショックの指標

\*3 RPP (Rate Pressure Product): 心臓が必要とする酸素量の指標



エレクトロニクスで病魔に挑戦

 NIHON KOHDEN

# 患者さんに“やさしさ”を、 医療スタッフに“スピード”を。


## 早くてやさしいiNIBP

従来のNIBP (非観血血圧) 測定に加え、iNIBP測定を選択できます。  
iNIBPは、日本光電オリジナルのアルゴリズムにより、加圧時にNIBPを測定する技術です。従来の減圧測定に比べ、最大加圧圧力の減少や測定時間の短縮を可能にし、患者さんへの負担をより軽減させます。  
また、日本光電オリジナルのカフ使用により、皮下出血の発生を低減するとともにチューブの閉塞も防止。患者さんの安全・快適に徹底的にこだわった設計がされています。



※iNIBPで測定する場合は、当社指定の加圧測定対応カフを使用してください。  
指定外のカフを使用すると、非観血血圧を正しく測定できないことがあります。

### 直線加圧測定方式「iNIBP」の特長

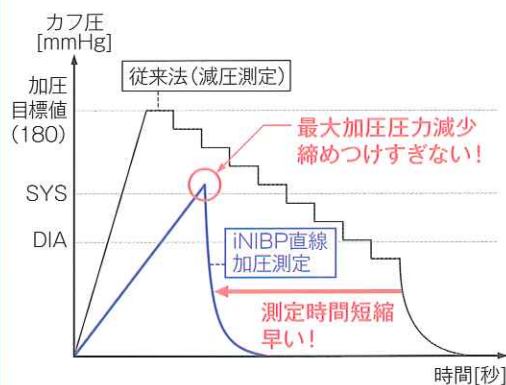

### 規格 (SVM-7260)

#### 表示部

ディスプレイ	8型 TFT カラーLCD
波形表示方法	フィックス方式
波形表示項目	脈波
数値表示項目	非観血血圧値、SpO <sub>2</sub> 値、脈拍数
トレース数	1トレース (SpO <sub>2</sub> )
掃引速度	6.25mm/秒、12.5mm/秒、25mm/秒、50mm/秒

#### 非観血血圧計測

測定方式	オシロメトリック法
測定値	最高血圧値 (SYS)、最低血圧値 (DIA)、平均値 (MAP)
圧力表示範囲	0 ~ 300mmHg
測定モード	手動測定、連続測定、定時測定、ルンパール測定

#### SpO<sub>2</sub>計測

表示範囲	0 ~ 100%
脈拍数計数範囲	30 ~ 300回/分

#### 記録器

測定方式	サーマルアレイ記録方式
記録トレース数	1トレース

#### その他

安全性	クラス I 機器 (AC電源動作時)、内部電源機器 (バッテリー使用時) 耐除細動形のCF形装着部
電源	AC100~240V 140VA 以下 (AC電源使用時) DC7.2V (オプションのSB-720P内蔵時、約6時間連続使用可 <sup>※</sup> ) ※当社指定条件の場合
寸法・質量	幅232×高さ246×奥行135mm (本体のみ、突起部含まず) 約2.1kg (本体のみ)

### 付属品 (SVM-7260)

薬機法認可品

- 電源コードW [L945]
- 成人用中継エアホース YN-901P [S902]
- 成人用カフ (標準) YP-713T [S951D]
- SpO<sub>2</sub>中継コード JL-900P [K931]

### オプション (SVM-7260)

薬機法認可品 (記録紙を除く)



非観血血圧測定用カフ  
リユーズブルタイプ



非観血血圧測定用カフ  
ディスポーザブルタイプ



SpO<sub>2</sub>測定用プローブ  
リユーズブルタイプ



SpO<sub>2</sub>測定用プローブ  
ディスポーザブルタイプ

- 架台 KC-170P
- バッテリーパック SB-720P
- 記録紙 FQW50-2-100 [A721] 10冊/箱



劣化部品や消耗品の予防交換で万が一のトラブルを回避する「プリベンティブプラン」もご用意しています。ぜひご検討ください。

販売名：生体情報モニタ SVM-7200 シリーズ  
商品コード：SVM-7260 (SpO<sub>2</sub>: 日本光電仕様)  
SVM-7250 (SpO<sub>2</sub>: コヴィディエン仕様)  
SVM-7230 (SpO<sub>2</sub>: マシモ仕様)

医療機器認証番号 230ADBZX00091000

クラス分類：管理医療機器、特定保守管理医療機器

製造販売

日本光電

日本光電工業株式会社 東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560  
☎03-5996-8000 (代表) Fax 03-5996-8091



このカタログは、「植物油インキ」「水なし印刷」で印刷しています。

※関連する保険点数については、当社営業員にお問合せください。  
本カタログの画面例・記録例には原則として架空の人名を使用しています。  
都合により外観・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

<https://www.nihonkohden.co.jp/>

CAT.NO.68-0005 '19.4. SCR. AO. 9464