

管理医療機器
歯科セラミックス用接着材料
(歯科金属用接着材料、歯面処理材)
医療機器認証番号：301ABBZX00015000

カタナ[®]クリーナー


支台歯・補綴装置への汚染を
シンプルなステップで清掃



唾液などの汚染により、 歯科用接着材の **接着力** は **低下** します

- MDP塩の界面活性作用*1による **高い洗浄効果**
- 弱酸性*2だから、**口腔内外で使用可能**
- ワンタッチ開閉できる容器を採用

「ノリタケ カタナ®ジルコニア」HTに対する
「パナビア®V5」のせん断接着強さ(人工唾液汚染)

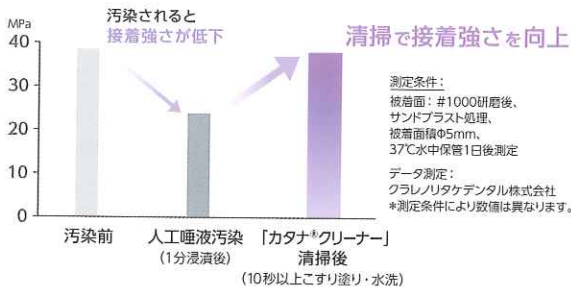

※1 試通時などに生じる唾液や血液などの汚染をリン酸エステル系モノマー「MDP」と塩基性成分から形成される塩(MDP塩)の界面活性作用により清掃。汚染面に対する接着材料の接着性を高めめます。
※2 約pH4.5 測定方法: JIS Z 8802: 2011


高い洗浄効果

○色素結合法を用いた染色試験(人工唾液汚染)



測定条件: ジルコニア板(「ノリタケ カタナ® ジルコニア」HT)を人工唾液に浸漬(1分間)
人工唾液に含まれるタンパク質と結合する染色剤による染色度で汚染度を評価
データ測定: クラレノリタケデンタル株式会社 *測定条件により染色度は異なります。

○「パナビア®V5」のせん断接着強さ(人工唾液汚染)

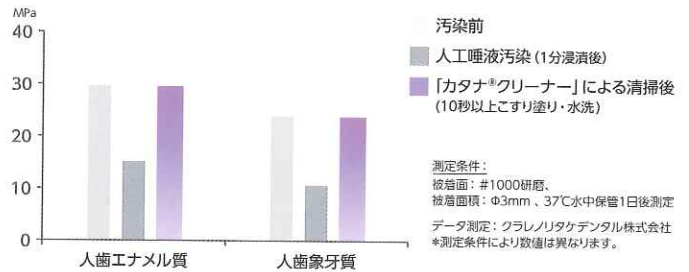

口腔内外で使用可能

- 歯質
- 補綴装置
 - ・セラミックス
 - ・コンポジットレジン
 - ・歯科用ポスト
 - ・歯科用金属



シンプルなステップ

症例写真提供: 高橋歯科 加藤正治 先生



- ※1 使用前に通法にしたがい仮封材・仮着材を除去・防湿。本品を塗布・10秒以上こすり塗り *マイクロブラシ・小筆・綿球・スポンジで使用可能。
- ※2 本品の色が完全になくなるまで水洗した後、エアにて乾燥。
- ※3 併用する歯科用接着材、又は歯科用セメントの添付文書にしたがい接着操作。

管理医療機器
歯科セラミックス用接着材料
(歯科金属用接着材料、歯面処理材)

カタナ®クリーナー

医療機器認証番号: 301ABBZX00015000
●単品 4mL
メーカー希望小売価格 **4,200円** 202430970



関連製品

「カタナ®クリーナー」は「パナビア®V5」「SALルーティング® Multi」や「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」などの接着前の清掃に使用できます。

管理医療機器 歯科用セメントキット
パナビア®V5

医療機器認証番号: 226ABBZX00106000
●スターターキット (ユニバーサル)
メーカー希望小売価格 **23,000円** 202430601



管理医療機器 歯科接着用レジンセメント
SALルーティング® Multi

医療機器認証番号: 230ABBZX00096000
●オートミックス 単品 ●ハンドミックス 単品
メーカー希望小売価格 **10,700円** メーカー希望小売価格 **7,700円**
202440212214 202440202204

- メーカー希望小売価格の後の9ケタの数字は株式会社モリタの商品コードです。
 - 価格はメーカー希望小売価格です。掲載商品のメーカー希望小売価格は2019年11月現在のものです。メーカー希望小売価格には消費税等は含まれておりません。
 - 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
- 管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品 医療機器認証番号: 301ABBZX000190000 クリアフィル®AD ファイバーポストⅡ
管理医療機器 歯科初期加工用セラミックス 医療機器認証番号: 223AFBZX00185000 ノリタケ カタナ®ジルコニア ディスク 管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号: 226AFBZX00116000 カタナ®アベンシア®ブロック
管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料) 医療機器認証番号: 228ABBZX00065000 クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル
0120-330-922
月曜～金曜 10:00～17:00

ホームページ
www.kuraraynoritake.jp

クラレノリタケデンタル公式アプリ



Download on the
App Store

Google Play
で手に入れよう

クラレノリタケデンタル **検索**

サポート OS バージョン iOS9.0 以上 / Android5.0 以上