

IMPLANTOLOGY  
ORAL SURGERY  
motor systems by Bien-Air

GC



# PURE SIMPLICITY

シンプルさを突き詰めると、この形になりました

SWISS  MADE



NEW

ジーシー インプラントモーター BA  
シロプロ 3<sup>rd</sup>ジェネレーション

IMPLANTOLOGY  
motor system

## 特長① カンタン操作

ダイヤルを回して選択



押して決定



## 特長② らくらくメンテナンス

ダイヤルは取外し可能で、  
滅菌もOK



ガラスパネルで  
お手入れらくらく



骨質やインプラントシステムに合わせて最大5ステップまでカスタマイズ可能



初期設定

Step <sup>※1</sup>	回転数 <sup>※2</sup>	トルク値 <sup>※2</sup>	ブースト値 <sup>※3</sup>	正逆回転	注水量 <sup>※4</sup>
1	2,000 rpm	25.0 N·cm (画面上に表示されない)		正	90ml
2	600 rpm	55.0 N·cm (画面上に表示されない)		正	90ml
3	20 rpm	45.0 N·cm	10.0 N·cm	正	off
4	20 rpm	55.0 N·cm		逆	off
5	20 rpm	45.0 N·cm	10.0 N·cm	正	off

※1：ステップ 1 2 は回転数、3 4 5 ではトルク値の変更が可能。  
 ※2：CA20：1 使用時の設定可能範囲は以下のとおり。(トルク値は回転数によって使用できる値が制限されます)  
 【回転数】5～2,000 rpm 【トルク値】10.0～70.0 N·cm  
 ※3：正回転から逆回転に切り替えたとき、設定したトルク値を基準に自動的に「5N·cm」または「10N·cm」大きくする機能。  
 ※4：6段階(0～150ml)の範囲で設定が可能。

大型カラーディスプレイ

回転数・トルク値・回転方向・注水量を簡潔に見やすく表示します。

キャリブレーション不要

高精度の電子制御システムにより煩雑なキャリブレーションは不要です。

インプラント用マイクロモーター

ジーシー インプラントモーター BA



包装・希望医院価格

コントロールユニット、ダイヤルノブ、マイクロモータ、モータ用ケーブル、ハンドピース、ブラケット、イリゲーションシステム(10個)、フットペダル、フットペダルガード、イリゲーションチューブ(10本)、イリゲーションスタンド、チューブ取付けクリップ、電源ケーブル、プロテクションフィルム(2枚)  
 一式 = ¥560,000

※掲載情報は、2019年11月現在のものです。  
 ※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。  
 ※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 ※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

仕様

コントロールユニット

寸法(幅×奥行×高さ)/質量	242×244×102mm/2.8kg
ステップ	3ステップ(最大5ステップ)
注水量	0～150ml/min(6段階)

マイクロモータ/ケーブル

寸法/質量	φ23.2×83.8mm/110g
回転速度域	100～40,000rpm
ライト(ハンドピースとの組合せ)	12Klux以上

ハンドピース(CA20:1L KMマイクロシリーズ)

ギア比	20:1
回転速度域	5～2,000rpm(モータ使用時)
寸法/質量	85mm/79g
最大トルク	70N·cm
ヘッドの高さ	13.5mm

関連製品

イリゲーションチューブ(10本入) = ¥12,000  
 メンテナンス用スプレートリオパック = ¥23,000  
 アクアケア注水チューブ洗浄スプレー500ml = ¥7,000(1本)  
 スプレーネット洗浄スプレー500ml = ¥8,400(1本)  
 ルブリフルイド潤滑スプレー500ml = ¥8,400(1本)

シロプロ 3rd Generation  
 電動式骨手術器械  
 管理医療機器(クラスII)  
 231AKBZX00017000

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **ビエン・エア・アジア株式会社**  
 東京都文京区本郷3-2-14 東京都豊島区池袋 2-40-12 西池袋第一生命ビルディング10F

DIC(デンタルインフォメーションセンター) 支店  
 お客様窓口 ☎0120-416480 ●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333  
 受付時間9:00a.m.～5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く) 営業所  
 http://www.gcdental.co.jp ●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
 ●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286