

Smile Dent

Dental Professionals Recommended

Aligner Retainer Cleaner

Formulated with 2 Active ingredients

Ag⁺

CPC

Kills 99.99%* of odor-causing bacteria
Helps Remove Stains and Plaque

※衛生微生物研究センター

Fresh Mint



60 tablets

Color additive free

歯科医院専用

スマイルデント

アライナー・リテーナー洗剤

KEEP CLEAN and CLEAR!

ダブル除菌剤配合

Ag⁺ 銀イオン

アルミノケイ酸塩(銀イオン含有)から銀イオンが放出され、アライナー等に付着している菌を取り除きます。



CPC 塩化セチルピリジニウム

アライナー等に付着している菌を取り除きます。CPCは、歯磨剤、のど飴などにも使用されています。



特徴

パワフル除菌

カンジダ菌

除菌率*

99.99%

※衛生微生物研究センター
※5分で99.99%除菌します。
※全ての菌に効果があるわけではありません。

- ① **パワフル除菌** アライナー等に付着しているカビやバイ菌を強力に落とします。
- ② **ニオイを防ぐ** ニオイのもとになる汚れを落とし、口臭への悪影響を防ぎます。
- ③ **スッキリ洗浄** 酵素の力で汚れを分解し、気持ちよく仕上げます。
- ④ **着色料無配合** 色移りの心配がありません。
- ⑤ **ミントの香り** さわやかなミントの香りでスッキリ爽快。

使用方法

1

約150mLの水またはお湯(40~50℃)に錠剤を1錠入れます。
△60℃以上のお湯で使用しないでください。

※水温が低いとまれに発泡しにくくなります。40~50℃のお湯をおすすめします。

△錠剤の包装は使用する直前に切り離して開けてください。

※開けたまま放置すると発泡しないことがあります。



2

すぐにアライナー等を浸してください。

※ふつうの汚れの洗浄は5分程度で終了します。特に汚れがひどい場合は、一晚浸しておく効果的です。



3

洗浄後は水でよくすすいでください。


△ごくまれに汚れが落ちない場合がありますが、無理な洗浄やブラッシングはせずに、歯科医にご相談されることをおすすめします。

△溶液は毎回お取替えください。

※本製品をご使用后、洗浄液が白濁したり、沈殿物が残ることがありますが、品質には問題ありません。

毎日の使用で、さらに効果が増します。

錠剤は1回1錠が目安です。また、溶液は毎回お取替えください。

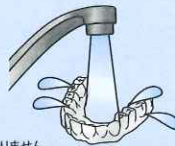

成分

漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、アニオン系界面活性剤、アルミノケイ酸塩、塩化セチルピリジニウム(GPC)、セラック、漂白活性化剤(TAED)、酵素、ポリリン酸塩、発泡剤、結合剤、流動改善剤、香料

液性

中性

内容量

2.8g × 60錠



60錠入

歯科医院様参考価格 ¥750
患者様参考価格 ¥950

本紙に掲載されている価格は2020年1月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

株式会社 モリムラ

〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351
http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は