

院内環境にやさしい! 除菌・消臭・洗浄スプレー

# ラバラックS<sup>®</sup> 1000ppm

〈次亜塩素酸ナトリウム 0.1% 調整液〉

除菌

脱臭

防錆

洗浄



徳用タイプ:5L

500mLタイプ

## 特長

抗菌効果が高い  
次亜塩素酸ナトリウムの  
濃度安定化

防錆剤配合で  
金属にも使用できます

用途によって使いわける、  
除菌・脱臭・防錆・洗浄

容量: 500mL

1,200円  
(税別)

徳用タイプ: 5L

8,000円  
(税別)

# ラバラックS 1000ppm

用途によって使いわけ、カンタン除菌・脱臭・防錆・洗浄!!

## ラバラックS 1000の主な使用法

テーブル、スピットン、スリッパ・待合室のソファ等の除菌・洗浄に!

**診療室**

ガーゼ等にしみ込ませ拭いた後、3分後水拭き

**待合室**

**手袋**

※スプレー後、水洗いしてください。

**◎印象採得時の印象面に!**

流水洗浄後ラバラックS1000をスプレーし再び流水洗浄の後、石膏注入

※スプレー、噴霧後の水洗いは十分に行ってください。(30秒以上が目安です。)

**マスク**

※内面・外面にスプレー後、日光で乾燥させてください。

### 【使用上の注意】

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 他の製品や酸と混ぜての使用は絶対に避けてください。
- 金属に使用する場合は、そのまま放置しますとサビの原因になります。
- 使用時には手袋・保護メガネを着用してください。
- 万一、目に入ったときは、すぐに流水で洗い流し、必ず医師の手当を受けてください。
- 皮膚に付いたときは、流水でぬめり感が無くなるまで洗い流してください。
- 保管は直射日光の当たらない場所に保管してください。(常温保存)
- 液が衣類などの繊維につくと脱色する恐れがあるので、ご注意ください。
- 換気をよくして使用してください。

### 【使用できない器具の材質】

- アルミ製品・メッキ製品・カーバイト銅(※一部のカーバイト銅につきましては変色の可能性があります。)

### ラバラックS 1000

- 【用途】 除菌・脱臭・防錆・洗浄
- 【性状】 無色透明でわずかに塩素臭がある
- 【成分】 次亜塩素酸ナトリウム 0.1%、安定剤、防錆剤

【内容量】 500mL      【価格】 1本 **1,200** 円(税別)

【内容量】 5L(徳用タイプ)      【価格】 1箱 **8,000** 円(税別)

発売元

**SD サンデンタル株式会社**

〈本社〉 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号  
Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690

〈東京営業所〉 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号  
Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090

〈福岡営業所〉 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3番9号  
Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339

■お問い合わせ・ご用命は

サンデンタル ホームページ <http://www.sundental.jp>

※掲載商品の価格は小売価格で2020年4月現在のものです。仕様及び外観は、製品改良の為、予告なく変更することがあります。