



FOR THE PATIENT

OKABE

ドクターキムヘッドランプ専用日本製フェイスシールド

# OKシールド

OK Shield

MADE IN JAPAN



## 特徴

### 1. 拡大鏡との併用可

フェイスシールドと拡大鏡を組み合わせるのはなかなか難しいものです。OK シールドはドクターキムヘッドランプ用各種拡大鏡との併用が可能です。

### 2. 眼鏡との併用可

フェイスシールドと顔の間のスペースを任意に調整できるため、眼鏡をかけていても干渉しにくく併用が可能です。

### 3. 心地よいフィット感


おでこと接触するアタッチメントに本革を採用することで、長時間装着しても痛くなりやすく疲れにくい設計です。

### 4. 着脱が簡単

フェイスシールドの固定にマジックテープを採用することで、着脱の煩わしさを軽減しました。

### 5. クリアな視界

透明度が高く傷が入りにくいPVC（ポリ塩化ビニル）をフェイスシールドの素材に採用しました。

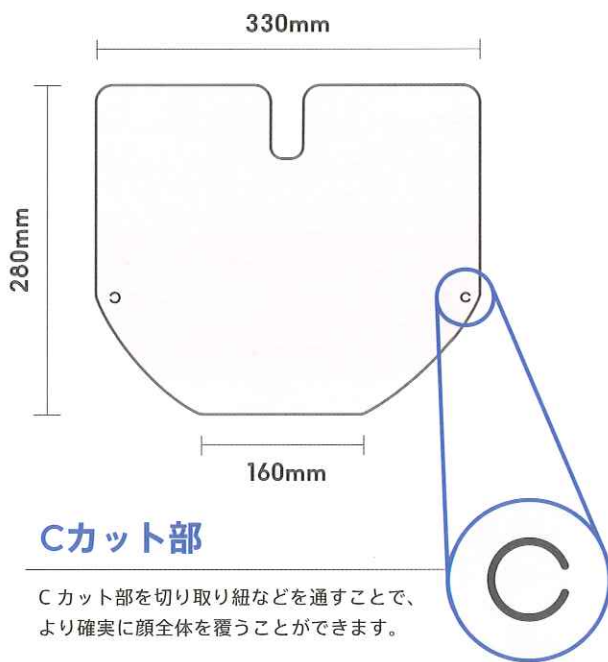

### Cカット部

Cカット部を切り取り紐などを通して、より確実に顔全体を覆うことができます。

縦 : 280mm

横 : 330mm

厚さ : 0.25mm

素材 : PVC

総重量

60g

※ドクターキム  
本体は除く



OK Shield Starter Kit

OKシールド スターターキット

No.3130 ¥6,000 [税別]

本革アタッチメント × 1、調整用アタッチメント × 1、フェイスシールド × 10、マジックテープ × 20

# 装着方法

装着方法紹介動画  
YouTube  
OKABE Channel



## アタッチメントの取り付け

フロントカバーを取り外し、  
本革アタッチメントを取り  
付けます。



調整用アタッチメントを本革アタ  
ッチメントの上に重ねて取り付  
けます。取り付ける位置によっ  
てフェイスシールドと顔の間の  
スペースを変えられます。  
(フェイスシールドを顔に密着  
させたい場合は不要です)



## フェイスシールドの 取り付け

フェイスシールドの上部 2ヶ  
所にマジックテープを取り付  
けます。



アタッチメントとフェイスシールドをマ  
ジックテープで固定し、アタ  
ッチメントを好きな角度に曲  
げて使います。  
(Cカット部に紐などを通して後  
方で結ぶとより顔全体を覆  
うことができます)



※ 感染防止のため、隙間を極力排除した設計に  
なっています。フェイスシールドが曇ってしま  
う場合は、市販の曇り止めスプレーを使用いた  
だくことをお勧めします。

## OKシールド 単品10枚入

(マジックテープ 20 枚付)

No.3131 ¥2,200 [税別]

## OKシールド お徳用100枚入

(マジックテープ 200 枚付)

No.3132 ¥20,000 [税別]



## OK 本革アタッチメント

No.3133 ¥5,000 [税別]



## OK 調整用アタッチメント

No.3134 ¥1,200 [税別]



販売元

株式会社 岡部/OKABE Co., Ltd.

〒815-0041 福岡県福岡市南区野間4-4-32  
TEL 092-561-8198 FAX 092-561-8070  
<http://www.okabe118.co.jp>

ZIP CODE 815-0041  
4-4-32, Noma, Minami-Ku, Fukuoka, Japan  
TEL +81-92-561-8198 FAX +81-92-561-8070

※お取引のある歯科ディーラー様、歯科商店様へお問い合わせ下さい。