

# フロー・サイナスケア

鼻うがい


毎日の簡単習慣、これからの口腔ケアに鼻うがいを。



洗浄液は、人体にとっても近い成分(等張電解質液)なので、刺激は少なく、鼻腔内がすっきりします。  
※防腐剤・香料などは入っていません。



# Features

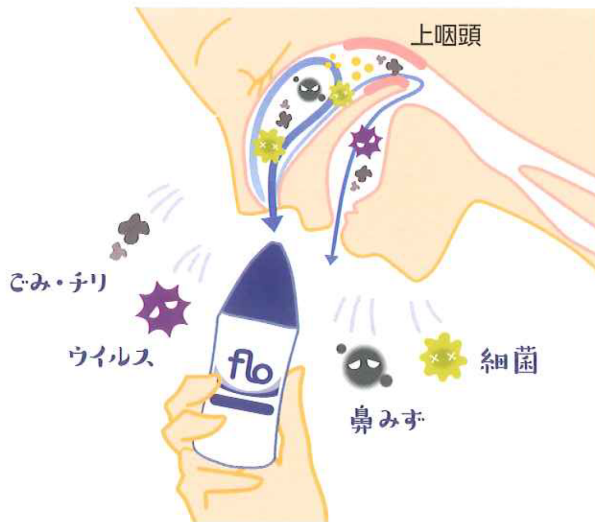

## 鼻の奥まで洗浄液が届く

鼻の奥は、外部から侵入する異物に接しやすい部位なので、いつも清潔にしておくことが重要です。温かな洗浄液が鼻腔内を優しく洗浄します。



## 使いやすい洗浄用ボトル

ボトルを軽く押すだけで洗浄液が鼻腔内を優しくしっかり流れます。吸う動作は必要ありません。広い開口部は洗浄剤(粉)を入れやすく、使用後のボトル洗浄、乾燥がしやすい構造です。

## お子さま(4歳以上)から大人まで手軽にお使いいただけます



**1** ひと肌程度に温めた安全なお水<sup>\*</sup>をボトルの線まで入れます。  
<sup>\*</sup>煮沸水、浄水器を通した水、市販のペットボトル水、精製水、上水道水。  
 電子レンジが使えます。



**2** 洗浄剤(小袋)1包の粉をボトルに入れます。キャップをしっかりと閉めて、洗浄剤がすべて溶けるまでボトルを振ります。



**3** 洗面台で前かがみになり、キャップ先端を一方の鼻の穴に軽く当てます。口で息をしながら、そっとボトルを握ると温かい洗浄液が反対側の鼻や口から出てきます。鼻で洗浄液を吸う動作は必要はありません。  
 残った洗浄液で反対側の鼻も同じ手順でおこないます。

# Specifications

### フロー・サイナスケア スターターキット

内容物: 洗浄用ボトル+洗浄剤(粉)12包

希望患者価格 1,000円

### フロー・サイナスケア 洗浄剤(粉)50包

内容物: 洗浄剤(粉)50包

希望患者価格 1,700円

### フロー・サイナスケア 洗浄剤(粉)100包

内容物: 洗浄剤(粉)100包

希望患者価格 3,000円

● 価格感値の値のケタの数字は商品コードです。● 掲載商品の標準価格は、2020年5月21日現在のものです。標準価格には消費税は含まれておりません。  
 ● 仕入れおよび外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。● ご使用に際しましては、製品に添付の説明書を必ずお読みください。

販売名 フロー・サイナスケア 一時的名称 鼻用洗浄器 医療機器の外産 一般(CI) 医療機器届出番号: 2781X00118000014  
 総研元/販売先 大塚株式会社 製造販売 有限会社ウイルアンド 大阪府大阪市北区喜原町10-32 DAIKILビル7階 〒530-0046  
 製造販売 株式会社 モリタ 大阪本社: 大阪府吹田市南水町3-33-18 〒564-8650 T 06-6380-2525 東京本社: 東京都港区区上野2-11-15 〒110-8513 T 03-3634-6161  
 支店 札幌 札幌駅前センター T 0800-222-8020(フリーコール) ● 産科医療研修センター  
[www.dental-plaza.com](http://www.dental-plaza.com)

PUB NO. MG052.1.2006.72,000.NJQ/ST 208530408