

院内清掃・器具洗浄はこれ1本でOK!!

環境配慮次世代型スマート洗剤

# Smash

NEW

スマッシュ

強力な  
洗浄力  
マルチ  
に使える

アルカリフリー  
中性  
タイプ  
で手にやさしい

※1  
コロナにも  
有効



今ならお得な  
キャンペーン  
開催中!! 期間  
2020.9/20~  
11/30迄

■スマッシュ 1本 5L入 標準価格 2,800円

**マルチパーパス**

これ1本でユニット・床拭き用掃除からミラー・ピンセットなどの  
歯科器具用の洗剤としても**多用途にご使用頂けます。**

**安心・安全**

器材にやさしい中性洗剤なのにアルカリ洗剤と同等の強力な洗浄力と除菌力。

**殺菌レベルの除菌性能!!**

新型コロナウイルスに有効な界面活性剤「アルキルアミンオキシドを配合」

**低コスト**

洗剤の使い分け不要!・在庫管理もこれ1本でOK!!

汚れや場所に応じて**原液から300倍まで希釈**してご使用いただけます。



これ1本で多用途にご使用いただけます。  
場所や汚れに合わせ200倍から300倍に希釈して幅広い用途でご使用いただけます。

歯科クリニックでの対象箇所	 歯科用器具・器材	 スケーラー・重合器などの小機械の表面の清掃	 チェアユニット コンタクトポイント	 床	 待合室 テーブル・椅子
希釈倍率	<b>200 ~ 300 倍</b>				

更に、原液使用なら強力な洗浄力でキッチンなどのギトギト油汚れも素早く、スッカリおちる!!


**安心・安全** [やさしい]

アルカリフリーで器材長持ち、手にもやさしい。新型コロナにも有効な優れた除菌性能で安心・安全。

■アルカリフリーだから“素材にもやさしい”  
アルマイトのテストピースを3分間浸漬したときの基材損傷性を比較。



■アルカリフリーなのに“ギトギト油を落とす超浸透テクノロジー”  
変性して落とすしづらいギトギト油も、未変性部分にグングン浸透することでしっかりと洗浄することができます。

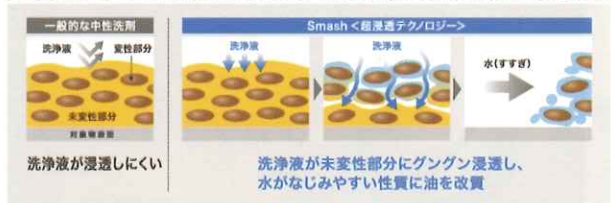

※1  
スマッシュには、独立行政法人 製品評価技術基盤機構 nite 記載の **界面活性剤** (30倍希釈でアルキルアミノオキシド0.05%以上) を含有しています。


新型コロナウイルスに対して有効な



**300倍希釈での除菌性能試験**

経路条件  
・SUS試験片: 8×3×0.1cm  
・消毒液量: 0.3ml (SlogCFU/ml, 疑似汚れとしてBSAO.5%添加)  
・洗剤濃度: 0.3ml (300倍希釈)  
・洗剤接触時間: 30分  
・培養時間: 37℃, 24時間

経路方法  
① SUS試験片に消毒液0.3mlを添加し塗り乾かす。  
② ①のSUS試験片に各種洗浄剤0.3mlを添加し塗り乾かす。30分静置。  
③ 拭き取りの停止後1mlに含菌した標準菌にて②の表面を拭き取る。  
④ ③の拭き取り液を段階希釈し培地に播き、37℃, 24時間培養後、CO2-数をカウントして生菌数を算出。

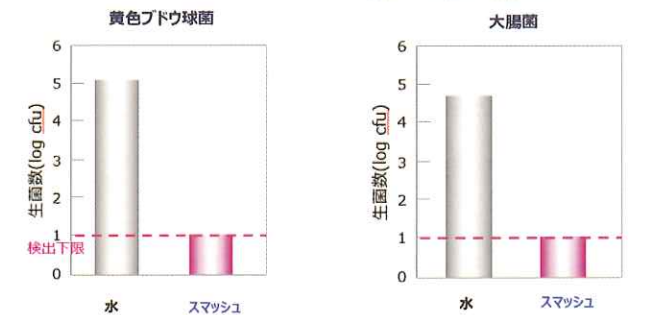

**低コスト** 医院で使う洗剤の種類を減らすことでコスト削減・在庫管理の手間が省けます。

**300倍希釈で1リットルあたり 1.87円 の経済性!!**  
※コロナウイルスに対して有効な希釈倍率 (0.05%以上) は 30倍希釈でお使いください。※1

「つよさ」と「やさしさ」を兼ね備えた次世代型スマート洗剤

**Smash** 今なら、スマッシュ1本 2,800円をお求め頂きますと、

5Lボトルから1プッシュで500ccが正確に計量できる **希釈用軽量ポンプ 1,000円**

1本 標準価格 **500円**

お掃除用 600ml スプレー容器 **500円**

1ヶ 標準価格

**もれなくプレゼント**

さらに、2本お買い求め頂きますと、**専用スポンジプレゼント!!**

※スポンジは数量無くなり次第終了となります。

期間 2020.9/20 ~ 11/30迄



■販売店名