

ジーシー セラスマートコート

光重合型レジン表面滑沢キャラクタライズ材



ラボサイド(口腔外)で



チェアサイド(口腔内)で



クリア
コート

インテンシブ
ホワイト

インサイザル
グレー

サービカル
ブラウン

表現 自由自在!

CAD/CAM冠をはじめ
各種保険診療の補綴装置に
ひと塗りでワンランク上の表現へ



光重合型レジン表面滑沢キャラクタライズ材

ジーシー セラスマートコート



色調●4色=クリアコート、インテンシブホワイト、インサイザルグレー、サービカルブラウン
包装・希望医院価格●

スターターセット1箱:クリアコート(5mL)1本、インテンシブホワイト(2.6mL)1本、インサイザルグレー(2.6mL)1本、サービカルブラウン(2.6mL)1本、ディスポパレット3枚、ディスポパレット用遮光カバー1個、丸筆No.1B(付替用)1本、平筆No.1B(付替用)1本、筆用ハンドル(ホワイト)1本=¥13,490

クリアコート単品:1本(5mL)=¥3,990

インテンシブホワイト単品:1本(2.6mL)=¥3,390

インサイザルグレー単品:1本(2.6mL)=¥3,390

サービカルブラウン単品:1本(2.6mL)=¥3,390

ジーシー セラスマートコート

高分子系歯冠着色材料 / 歯科表面滑沢硬化材
管理医療機器 3Q2AKBZX00048000

色合わせの難しい少数歯の症例に

Simple

各部位の表現に各1色。
シンプルな4色のラインナップです。

Easy

色を混ぜなくてもすぐに使える色調。
お好みに応じて重ね塗りができます。
またクリアーコートを用い希釈により
表現を調整いただけます。

Beauty

100nm以下のナノフィラー配合に
よる優れたツヤ維持性と耐摩耗性。
長期的に審美性を維持します。

《使用ステップ (セラスマートレイヤーへの使用例)》 口腔内でも口腔外でもお使いいただけます。

●チェアサイド(口腔内)



試適



表面処理



キャラクタライズ



光照射

(40秒/G-ライトプリマII PLUS)



完成

●ラボサイド(口腔外)



着色前



表面処理(粒径25~50μmの
アルミナ、噴射圧0.2MPa以下)



キャラクタライズ



光重合


(90秒/ラボライトDUO)



完成

※フィラー・着色材が沈降していることがありますので、ご使用前にボトルをよく振ってください。
※着色は丸筆No.1B、クリアーコート塗布は平筆No.1Bの使用をお勧めいたします。
※保険診療の補綴装置に使用する場合、本品の材料料は所定点数に含まれます。
※前歯のCAD/CAM冠には、CAD/CAM冠用材料(IV)を使用した場合のみ、保険請求可能です。

●キャラクタライズ例

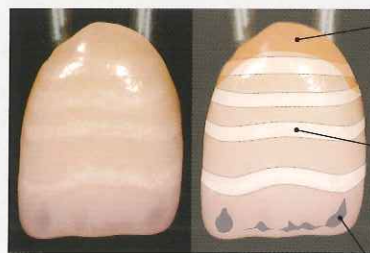

セラスマートレイヤー A2 ELの
キャラクタライズ例

- 歯頸部 サービカルブラウン:クリアーコート=1:1
- 切端 インサイザルグレー
- 白帯 インテンシブホワイト
- 仕上げ クリアーコート

サービカル
ブラウン

歯頸部、裂溝の
表現

インテンシブ
ホワイト

白帯、
ホワイトスポットの
表現

インサイザル
グレー

切端部の表現

クリアーコート

全体のコート・
艶出し
色調の濃度調整

●最終重合

光照射器	最終重合 照射時間
G-ライトプリマII Plus	40秒
ラボキュアHL(L)	90秒
ラボライトDUO	90秒

※青色LED(450~480nm)のみを光源とする可視光線照射器は使用できません。
※塗布面にファイバーロッドを十分に近づけて、光照射してください。

関連製品

CAD/CAM用高審美性ハイブリッドブロック NEW

セラスマートレイヤー

(CAD/CAM冠用材料(IV) 該当)

歯科切削加工用レジジン材料

セラスマート レイヤー 管理医療機器 231AKBZX00004000



※写真はAadva CAD/CAM用

形態●1種=14

色調●4色(デンチン層相当)=A1 EL, A2 EL, A3 EL, A3.5 EL

種類●2種類=Aadva CAD/CAM用、UNIVERSAL用
包装・希望医院価格●5個1函(各色・各種類) = ¥26,200

※掲載情報は、2020年11月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号

製造販売元 **株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ**
愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

DIC(デンタルインフォメーションセンター) 支店
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも

App Store Google Play

どちらもこちらのQRコードでOK!

推奨OSバージョンはiOS:11.0以上、Android:8.0以上です。

ジーシー
公式アプリ

