

## AFRミニレグ

Dentrade e.K.



- 下顎の限界運動を記録し、水平的顎間関係を定めるためにご利用いただけるゴシックアーチ描記装置です。
- 一つのサイズでどの顎形状にも装着でき、事前準備も最小限で大幅時間短縮。
- 記録の保管も可能なスケールラベル付き。  
※バウシュ8μアルティフォルと一緒にご利用ください。



### 使用方法



1 描記板と描記針を除菌後、パテ、シリコンバイト材等を描記板に盛り、口腔内に装着する。  
※推奨製品ソールバイト

2 描記針も同じ要領で口腔内に装着する。  
※推奨製品ソールバイト

3 タッピングを何度か行い、顎のストレスを解消する。

4 バウシュアルティスプレーを描記板に塗布する。

5 ゴシックアーチの描記を行う。

6 描記針をCRに合わせ、CRバイトワックスで咬合位置を記録する。

7 CRバイトワックスを使用し、上下顎の位置関係を咬合器上で合わせる。

※スケールラベルを使用の際、記録を必要とする際はスケールラベルを両面シールで描記板に貼付し、バウシュアルティフォル8μを描記針と描記板の接点にあて、記録する。

### セット内容



① ゴシックアーチトレーサー  
・描記板×5  
・描記針×5  
・CRバイトワックス×5  
・スケールラベル×10  
・両面シール×10



② ゴシックアーチ スターターセット  
・描記板×1  
・描記針×1  
・CRバイトワックス×2  
・スケールラベル×2  
・両面シール×2



③ CRバイトワックス  
・CRバイトワックス×10

### AFRミニレグ

AFR-Mini-Reg

ディスプレイ

商品コード	種類	入数	価格
① AFR100	ゴシックアーチトレーサー		8,000円
② AFR101	ゴシックアーチ スターターセット	1セット	4,000円
③ AFR102	ゴシックアーチ CRバイトワックス		

販売名：AFR ミニレグ 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000007