

歯科切削加工用セラミックス
KZR-CAD シルコニア グラデーション
GR-SHT-A0ホワイト / GR-HT-A0ホワイト



Aurora "WHITE" Gradation

オーロラ ホワイト グラデーション

KZR-CAD Zr



GR-SHT-A0ホワイト

透明感のある白さ



※SHTは3歯連結までの症例にお使いください

均一な強度

単一組成積層型のため、切端部から歯頸部まで均一な強度であり、ひずみなどなく安心してお使いいただけます。

材料特性(参考値)

	SHT	HT
0.5 mm厚ペレットでの透過率の比較		
透過率(%) ^{※1}	51	43
曲げ強さ(MPa) ^{※2}	770	1,200
破壊靱性(MPa·m ^{1/2}) ^{※3}	2.6	4.3

※1 弊社試験による(厚さ1mmペレット) ※2 3点曲げ試験 JIS T 6526 : 2018
※3 SEPB法 JIS R 1607 : 2015

良好な切削加工性

切削加工に最適な硬さを示すよう仮焼結しています。切削中のチッピングを抑制し、安定かつ精度よく加工することができます。



切削加工性が良好



うろこ状のチッピングや
切削痕が発生


GR-HT-A0ホワイト

強度を兼ね備えた白さ



オーロラグラデーション

コントラスト比が各層均一になるよう制御しており、色調変化がなめらかで高い審美性を実現しております。

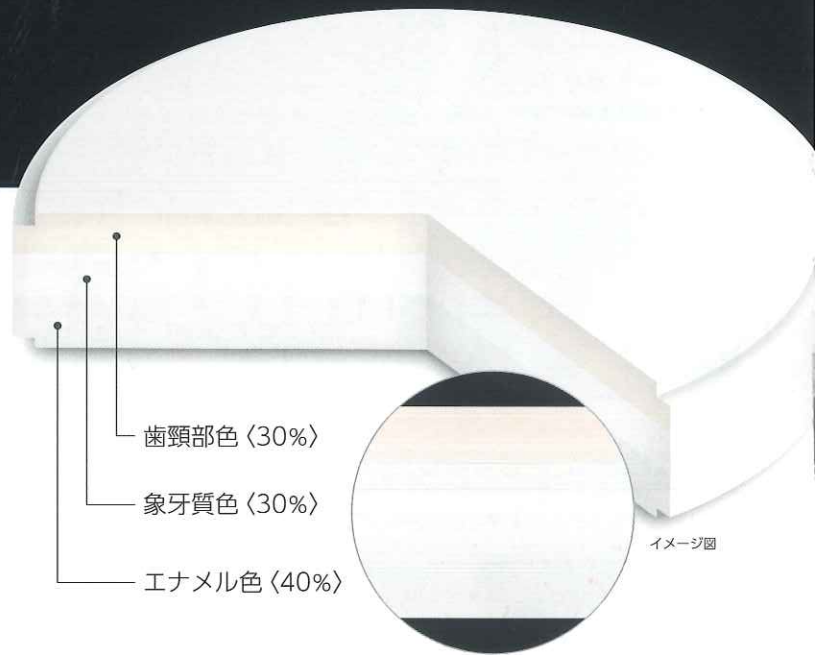

歯頸部色〈30%〉

象牙質色〈30%〉

エナメル色〈40%〉

イメージ図

〈焼結後の層構造〉

ステイニングによるキャラクタライズ

ゼオセライトZRステインを用いれば、テクニシャンの感性を自由自在に表現できます。

・使用方法ムービー



・インストラクション
ガイド



CAD/CAM用ジルコニアディスク



KZR-CAD Zr

KZR-CAD ジルコニア グラデーション SHT/HT

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 認証番号：228AFBZX00044000

色調	直径 (φ) 98.5mm			
	厚さ (t)			
	14 mm	18 mm	20 mm	22 mm
GR-SHT-A0ホワイト	36,000円	39,000円	—	41,000円
GR-SHT-A1, GR-SHT-A2, GR-SHT-A3	36,000円	—	40,000円	—
GR-HT-A0ホワイト	36,000円	39,000円	—	41,000円
GR-HT-A1, GR-HT-A2, GR-HT-A3	36,000円	39,000円	40,000円 (在庫限り)	41,000円

焼成スケジュール (参考値)

	昇温	昇温	保持	冷却
温度 (°C)	1,000	1,450	1,450	400 (炉内)
時間 (hour)	2	4.5	2	1.5

ジルコニア用ステイン陶材



ゼオセライト ZR

管理医療機器 歯科用陶材 認証番号：227AFBZX00042000

全24色 3.5g 2,500円
(Glaze, White, Milky, Light Orange, Orange, Brown, Dark Brown, Gray, Violet, Blue, Indigo, Pink, Dark Pink, Yellow, Khaki, Amber, Black, Buff, Fluorescent, Opal Glaze, Shade A, Shade B, Shade C, Shade D)

希釈液 ステインリキッド (10 mL) 1,000円



シェードガイド

本製品は受注生産品です。



製品名	シェード	価格
KZR-CAD Zr GR-SHT シェードガイド	GR-SHT-A0ホワイト GR-SHT-A1 GR-SHT-A2 GR-SHT-A3	13,400円
KZR-CAD Zr GR-HT シェードガイド	GR-HT-A0ホワイト GR-HT-A1 GR-HT-A2 GR-HT-A3	13,400円

院内コミュニケーションツール

「ジルコニアセラミック」を使用した治療のご案内リーフレットとポスターです。



ジルコニア治療案内ポスター (A3サイズ)



ジルコニア治療案内リーフレット

ご注文はお電話 (フリーダイヤル) かWebサイトからお申込みいただけます。送料含め、無料でご提供しております。



テクニカルサポート
(9:00~17:00) サンキュー ヨクツク
0120-39-4929



https://www.yamakin-gold.co.jp
ヤマキン 歯科 検索

製品や模型、パッケージなどの色は、印刷インクや撮影条件などから、実際の色とは異なって見えることがあります。記載のデータは条件によって異なる場合があります。製品の仕様、外観や容器などは予告なく変更する場合があります。価格は希望ユーザー価格 (税抜き) です。製品を使用するときは必ず最新の電子添文をご確認ください。

製造販売元 YAMAKIN株式会社

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

本社：〒543-0015 大阪市天王寺区真田山町3番7号
TEL.06-6761-4739 (代) FAX.06-6761-4743
東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・高知
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室
https://www.yamakin-gold.co.jp

● 製品に関するお問い合わせはこちら

テクニカルサポート

(9:00~17:00) サンキュー ヨクツク
0120-39-4929

お取扱店