

FUJIFILM

Value from Innovation

医療現場における、さらなる安心

Hydro Ag⁺

ハイドロ エージープラス

持続除菌

アルコールスプレー・クロス





独自技術による “持続力”ある環境除菌で 院内感染のリスクを軽減

Hydro Ag+は、アルコールによる除菌効果に加えて、
銀系抗菌剤と超親水コートによる“持続除菌”を兼ね備え、
院内環境を感染のリスクから守り続けます。



長時間にわたり除菌性能を発揮


銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせたHydro Ag+技術によって、アルコールが蒸発した後も持続的に微生物の増殖を抑制します。

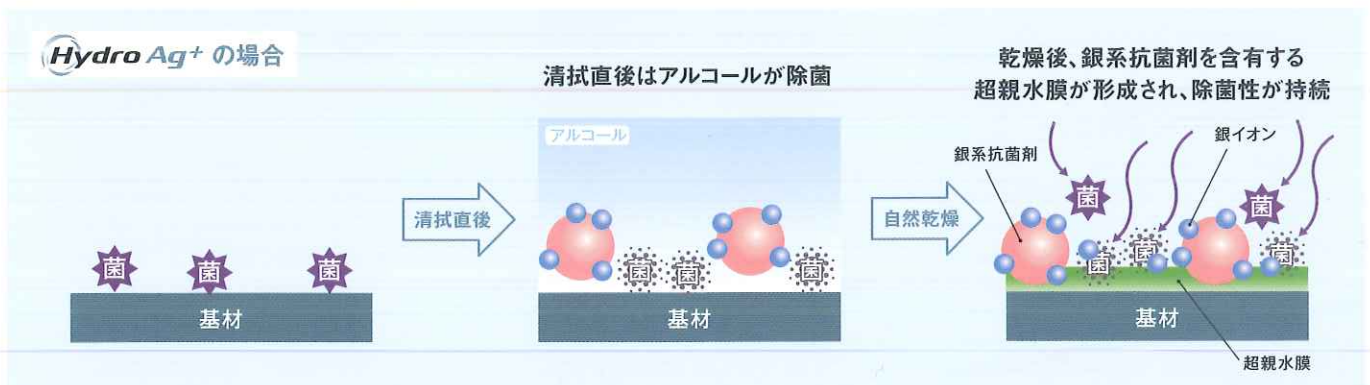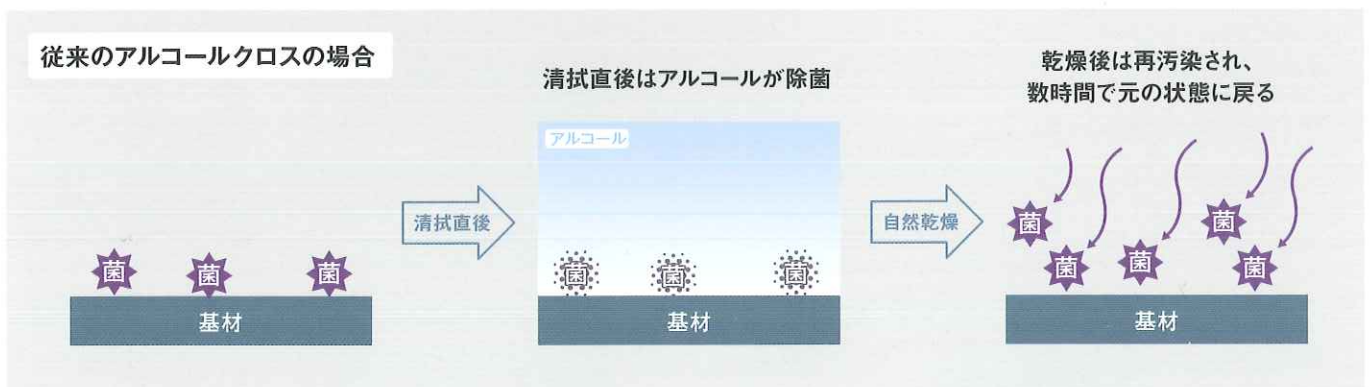

従来にない「持続除菌」性能

従来のアルコール同等の除菌性能を発揮。さらに銀系抗菌剤と超親水ポリマーによる“持続除菌”も従来品を大きく超える効果が見込めます。


従来品同等の除菌性能に銀の持続性をプラス

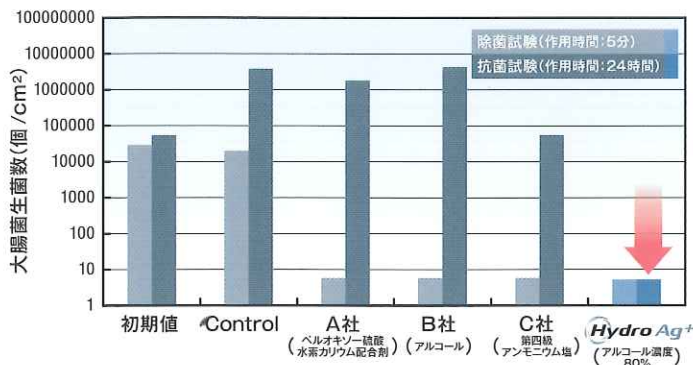

除菌試験: 住宅用合成洗剤、及び石けん除菌活性試験準拠
抗菌試験: JISZ2801抗菌性試験準拠

幅広い菌やウイルスに効果を発揮

Hydro Ag+は、細菌だけでなく、ウイルスやカビ等、さまざまな微生物の増殖を抑制します。

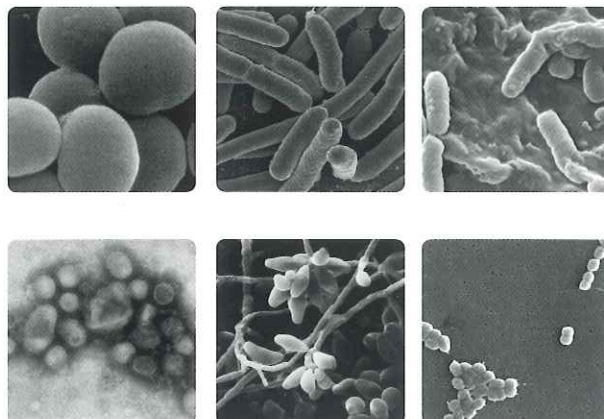

※全ての微生物への効果を保証するものではありません。対象となる微生物についてはお問い合わせください。

継続使用で持続除菌効果をさらにアップ

同一箇所に対して繰り返し用いることで、より強固なHydro Ag+コート膜が形成され、効果を高めることができます。

Hydro Ag+ 塗り重ね効果 (アルコール濃度80%)



抗菌試験: JISZ2801準用 (作用時間3時間)
※「抗菌活性性値」とは微生物が何桁減少したかを示します

人体へのリスクを防ぐ高い安全性

経口毒性	GHS区分は「区分外」 (LD50>2,000mg/kg)
皮膚刺激性	GHS区分は「区分外」 (無刺激)
皮膚感作性	LLNA: BrdU-ELISA法 陰性
生殖細胞変異原性	Ames試験 陰性
発がん性	IARCランク1, 2A, 2B 該当物質なし

院内のさまざまな箇所にお使いいただけます。

- 病棟のあらゆる手に触れる環境表面に使用可能。患者様はもちろん、来院者や医療従事者の感染リスクを抑えます。
- クロスタイプとスプレータイプの使い分けにより、対象物の設置場所や素材、形状などの違いに柔軟に対応します。



内容量

[アルコールクロス100枚入り] 140mm×180mm×100枚 [アルコールスプレー] 480mL
[アルコールクロス300枚入り] 140mm×250mm×300枚


成分

エタノール、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤

用途

手がよく触れる環境表面の除菌・抗菌(ドア、机、ベッド周り、車いす、スイッチ類、手すり等)
※1 布製品の除菌・抗菌(カーテン、布張りソファ、カーペット等) ※2 アルコールスプレー

使用方法

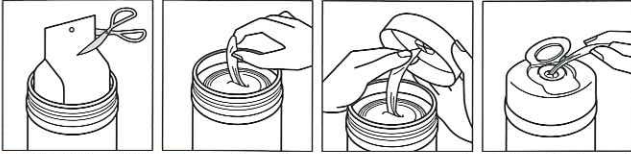

1 容器の蓋を外し、内封をボトルに入れて開封 2 ロールの中央から一枚目のクロスを引き出す 3 蓋中央の取り出し口の内側から1枚目のクロスを通す 4 蓋を閉め、取り出し口から出ているクロスを引き出す

[アルコールスプレー] 使用前にボトルをよく振り、ノズルをONの位置にして、不織布などにスプレーして清拭、もしくは直接スプレーしてください。使用後はノズルをOFFの位置に戻してください。

保管上の注意

火気、火花、高温、直射日光は避け、小児の手の届かない所に保管してください。※2 乾燥を防ぐため使用後は蓋をしっかりと閉め、開封後はできるだけ早く使い切ってください。※2 アルコールクロス

使用上の注意

火気のそばで使用しないでください。目に入った場合は直ちに水で洗い流し、症状が重い場合は医師の診察を受けてください。アルコール過敏症や皮膚の弱い方が使用された場合には、肌荒れ等にご注意ください。必要に応じて、手袋、マスク、保護メガネ等を着用してください。蒸気、ミストを吸入しないようにしてください。素材によっては変色、変質する場合がありますので、目立たない部分で確認してから使用してください。レンズ等へは使用しないでください。コーティングがはがれるおそれがあります。クロスは水に溶けないため、トイレには流さないでください。人体や食品・食器には使用しないでください。用途以外には使用しないでください。クロスは本製品の詰替用クロスをご使用ください。



火気注意



眼付着注意



変色注意



手や顔を拭くこと禁止



レンズ清拭禁止



便器投棄禁止



食品・食器に使用禁止



口に入れるものには使用禁止

製品ラインアップ

品名	製品イメージ	内容量	価格	JAN
Hydro Ag+ (アルコール 80%)				
Hydro Ag+ アルコールクロス専用ボトル (アルコール 80% 100枚入り) ※クロスは含まれません		—	オープン	4547410347432
Hydro Ag+ アルコールクロス (アルコール 80% 100枚入り) 詰替用		140mm×180mm 100枚	オープン	4547410347449
Hydro Ag+ アルコールクロス専用容器 (アルコール 80% 300枚入り) ※クロスは含まれません		—	オープン	4547410371925
Hydro Ag+ アルコールクロス (アルコール 80% 300枚入り) 詰替用		140mm×250mm 300枚	オープン	4547410371932
Hydro Ag+ アルコールスプレー (アルコール 80%)		480ml	オープン	4547410347401
Hydro Ag+ (アルコール 60%) 高濃度のアルコールで変色・色落ち・劣化しやすい機器には、アルコール濃度60%のクロス・スプレーもご用意しています。				
Hydro Ag+ アルコールクロス専用ボトル (アルコール 60%) ※クロスは含まれません		—	オープン	4547410347470
Hydro Ag+ アルコールクロス (アルコール 60%) 詰替用		140mm×180mm 100枚	オープン	4547410347487
Hydro Ag+ アルコールスプレー (アルコール 60%)		480ml	オープン	4547410444575
Hydro Ag+ つめかえ用 2L (アルコール 60%)		2L	オープン	4547410445848

FUJIFILM

製造販売業者
富士フイルム株式会社

販売業者
富士フイルム メディカル株式会社 メディカルサブライ推進部
〒106-0031 東京都港区西麻布2-26-30 TEL. (03) 6419-8055(代)

<https://fujifilm.com/fms/>



10520009(08)

富士フイルムメディカル株式会社は、
個人情報の保護に全社をあげて
取り組んでいます