



NEO DENTAL CHEMICAL  
PRODUCTS CO., LTD.

# Vitapex<sup>®</sup> Solvent



## ビタペックス<sup>®</sup> ソルベント

根管充填材用軟化材


包装 100 mL

標準価格 3,200円 (税抜)

### ビタペックスの除去に 専用ソルベント新発売！

根管充填後一定期間経過したビタペックスの組成を考慮し、適切な油脂溶解作用を付与したソルベントです。根管からの機械的な除去操作時に併用し、除去の効率を高めます。

また歯質に対してもその後の治療に影響を与えない処方となっています。ビタペックス応用時の作業性を高める専用軟化材です。

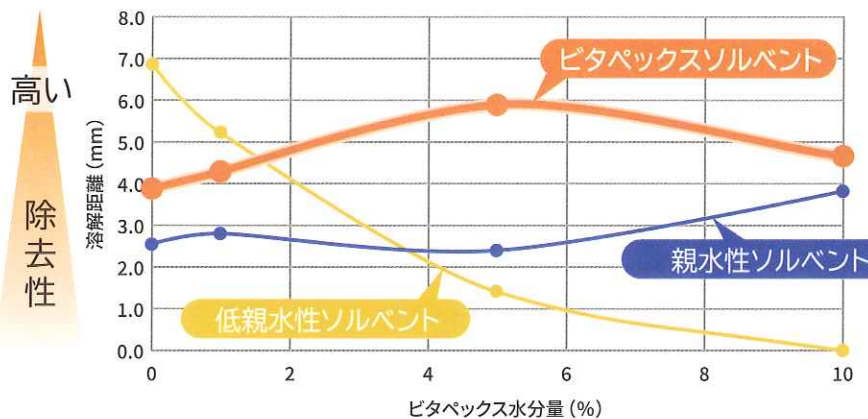

## ビタペックスの根管充填期間とビタペックス溶剤の除去性能の安定性に関するシミュレーション

比較対象として極性(親水性)の異なる溶剤を使用

※ビタペックス溶剤は、ビタペックスの水分量(根管充填期間)にかかわらず安定した除去性を示す。

(社内データ)

根管充填期間 長い

2021年12月(第1版)

医療機器認証番号: 303ADBZX00115000

歯科材料4 歯科用根管充填材料 管理医療機器 根管充填材用軟化材 70875000

# ビタペックス® ソルVENT

## VITAPEX® SOLVENT

### 【禁忌・禁止】

#### 【適用対象(患者)】

本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 構成

液(内容量 100mL)

外観・性状: 無色～淡黄色透明で、オレンジ様の芳香がある。

組成: d-リモネン、無水エタノール

#### 2. 原理

d-リモネンの油脂溶解作用による。

### 【使用目的又は効果】

根管充填材料ビタペックスの軟化・溶解、除去

### 【使用方法等】

本品の適量を根管内のビタペックス(医療機器承認番号: 16300BZZ009 18000)に滴下し、軟化させてリーマ等により除去する。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 注入器を使用して滴下する場合には、なるべく側方噴出型の針を用い、強い圧が加わらないよう注意すること。[根尖孔外へ溢出することがある。]
2. 注入器を使用する場合には、ガラス製のものを用いること。[樹脂やゴムを侵すことがある。]
3. プラスチック製品を使用する場合には、使用器具や容器が溶解しないか事前に確認すること。[樹脂やゴムを侵すことがある。]

4. ラバーダムシート、ゴム手袋及び保護具等に付着した場合には、直ちに拭き取ること。[樹脂やゴムを侵すことがある。]
5. 引火性があるため、火気に注意して使用すること。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- (1) 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- (2) 本品は、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。  
万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

1. 引火性があるため、火気に注意して保管すること。
2. 室温で保管すること。

#### 【使用期限】

外箱及びラベルに表示

[記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: ネオ製薬工業株式会社

住所: 〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-1-3

電話番号: 03-3400-3768 Fax: 03-3499-0613

フリーダイヤル: ☎ 0120-07-3768

製造元: ネオ製薬工業株式会社

ネオ製薬ホームページ 最新の製品情報を掲載

<https://www.neo-dental.com/>

販売店名

製造販売業者



ネオ製薬工業株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号

Tel. 03-3400-3768(代) Fax. 03-3499-0613

お問い合わせ ☎ 0120-07-3768