

モデルリペアー ピンク

中粘度瞬間硬化型模型修復材

モデルリペアーII ブルー

高粘度瞬間硬化型模型修復材



Features

モデルリペアーは、必要な時に瞬時に模型修復等の作業ができる瞬間硬化型の模型修復材です。ベース材に硬化液をスプレーすると数秒で硬化します。

- ・モデルリペアーピンクのベース材は適度な粘性(中粘度)を備えています。
- ・モデルリペアーIIブルーのベース材は高粘度(ペーストタイプ)のため、盛り上げても垂れや流れがありません。
- ・それぞれのベース材にピンク色、ブルー色を付与しているため、修正箇所の見分けがつきやすくなっています。
- ・ベース材はチューブ入のため、取り扱いが簡便です。

ベース材の特性

| 商品名 | モデルリペアーピンク | モデルリペアーIIブルー |
|-------------------|---|------------------|
| 主成分 | エチルシアノアクリレートモノマー | エチルシアノアクリレートモノマー |
| 外観 | ピンク色粘稠体 | ブルー色ペースト状 |
| 粘度 (mPa·s) | 3,500~4,500(中粘度) | 200,000以上(高粘度) |
| 有効期間 (5°C開封前) | 1年 | 1年 |
| 硬化時間 (25°C 湿度60%) | 15分 | 20分 |
| 溶解性 | ・MEK、アセトン、ニトロメタン、トルエンに溶解 ・水およびアルコールにはゲル化 | |

使用例

- 1.石膏模型の破折、欠損部分の盛り上げ
- 2.石膏模型のアンダーカット部分の修正
- 3.石膏模型の気泡部分の修正
- 4.アタッチメントの接着用位置固定
- 5.接着用埋没のための位置固定
- 6.補綴物作製後の石膏模型の位置固定

Specifications

モデルリペアー ピンク



標準価格 4,420円 201280009
仕様 ピンク
内容量 ベース材 5g×4本
硬化液 70mL×1本

モデルリペアーII ブルー



標準価格 4,700円 201280010
仕様 ブルー
内容量 ベース材 5g×4本
硬化液 70mL×1本

関連製品

モデルリペアー 硬化液



標準価格 1,720円 201280011
内容量 70mL×1本

●標準価格の後の9ケタの数字は品目コードです。●掲載商品の標準価格は、2022年3月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、使用上の注意を必ずお読みください。

製造 株式会社アルテコ 大阪府茨木市西駅前町5-8 〒567-0032 T 072.627.1617
発売 株式会社モリタデンタルプロダクツ 栃木県大田原市下石上1382番地11 〒324-0036 T 0287.29.2221
www.dental-plaza.com