

バイオ
ハイゴフォーマック (Bio)

スウェーデンの歯科医院・大学で広く使用されているハイゴフォーマック
排唾ラインに接続してしっかり吸引します

Hygoformic® Bio

環境にやさしい サトウキビ由来のバイオベースポリエチレンでできています




The sustainable future of your dental practice

二酸化炭素排出量を削減し、地球温暖化を抑制するために。
ハイゴフォーマック (Bio) は再生可能なサトウキビを原料とした
バイオベース ポリエチレンを使用しています。



- 患者さんの口腔内状態に合わせて自由な形にアレンジ可能
- コイル部分の5つの穴から効率よく吸引
- コイル部分が舌や頬粘膜を排除
- 軽量で柔らかく患者負担が少ない
- 衛生的な単回使用
- 環境に優しいサトウキビを原料としたバイオベース ポリエチレン “グリーンPE” を使用

使用例

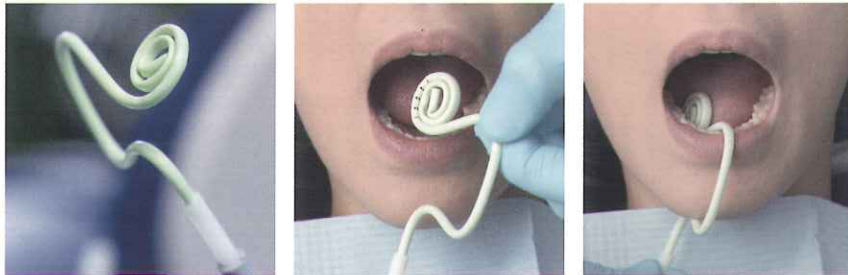

患者さんの骨格や施術箇所に合わせて形を調節でき、また顎に固定できるので安定した使用が可能



舌側に使用

頬側に使用

舌下に使用




開口器使用時に使用

ラバーダムと併用

舌の保護をしながら
クランプと使用

写真提供：小泉歯科医院 (東京都江東区) 院長 小泉 信隆 先生

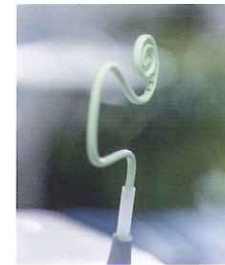

専用アダプターを使って
排唾ラインに接続

商品名 **ハイゴフォーマック (Bio)** バイオ

100 個入 (専用アダプター 5 個付き)
標準価格 2,200 円 (税込 2,420 円) @22 円 / 個

医療機器届出番号 13B1X00133000065

使用例
詳しくは動画を御覧ください



バイオ
ハイゴフォーミック (Bio)
Hygoformic® Bio




ハイゴフォーミック アダプターシリーズ



商品名
オートクレープアダプター 10 個入
 オートクレープ可 (134℃)
 標準価格 2,100 円 (税込 2,310 円) @210 円 / 個

オートクレープアダプター使用例

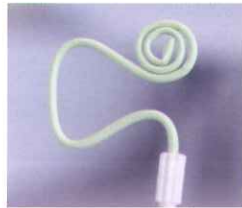

商品名
U16-11 アダプター 10 個入 (16mm から 11mm へ変換する)
 オートクレープ可 (134℃)
 標準価格 5,000 円 (税込 5,500 円) @500 円 / 個



商品名
ダブルアダプター 10 個入
 オートクレープ不可
 標準価格 2,100 円 (税込 2,310 円)
 @210 円 / 個

ダブルアダプター使用例



根管治療時に使用



補綴物装着時の防湿に使用

写真提供：守口歯科クリニック (岩手県盛岡市) 守口 和 先生

ハイゴフォーミックの先端近くの渦巻き部分は自由に
 変形することが可能のため、患者に嘔吐反射を起こさ
 せずにもっとも効率よく吸引する形に調節できる。
 先端だけでなく、側面にも 5 か所の小孔が穿たれて
 いるために、効果が持続する。また、コの字状の部分
 を調整して下顎に挟むことで、使用中にその位置がず
 れることを防いでくれる。そして先端を口腔底に設置
 することにより舌を排除 (写真)、あるいは頬側に置
 くことで頬粘膜を排除することが可能である。




自由に変形することが可能

また、排唾管の形状は、洗浄したとしても前の患者の
 汚れが完全に除去された保証はない。日本での患者の
 衛生観念は確実に変わってきており、医療の現場でも
 われわれの行動に目を光らせるようになってきた。こ
 のようなディスプレイ製品の製品を患者の目前で装着
 し使用後に廃棄している姿を見せることによって、感
 染対策に十分力を注いでいることを知っていただくこ
 とも、医療現場での真のサービスと言えるのではない
 だろうか。



フローネマルク
 オッセインテグレーション
 センター
 (東京都千代田区)
 院長 小宮山 彌太郎

超音波スケーラーなど注水があるものに関しては、患
 者さんへの負担が少ないことや施術しやすいことから
 私はハイゴフォーミックを使用しています。
 バキュームを持つとミラーが持てなくなるため、左上
 頬側の臼歯部は確実に見ることができません。よく見え
 ないため施術の質が落ちてしまう可能性も考えられま
 す。またのぞきこむようになるので患者さんに覆いか
 ぶさるような姿勢になり、場合によっては患者さんに
 不快なイメージを与えてしまいます。

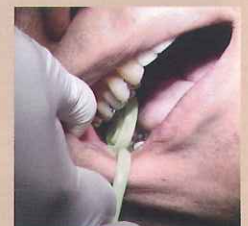

私は患者さんの右側にハイゴフォーミックをかけ、少
 し曲げて安定させるようにしています。こうすると施
 術中に途中でかけなおす必要もありませんし、穴が複
 数開いているため吸水が一点に集中せず頬粘膜を吸つ
 てしまうこともありません。喉に水が溜まることがつ
 らい患者さんや嘔吐反射がある患者さんは少し顔を右
 に向いていただくと楽なようです (写真)。ディスプレイ
 であることも感染予防対策として望ましいと思
 います。施術力を上げ、メンテナンスの質を高めるた
 めに、ハイゴフォーミックの利用は有効だと思います。



有田歯科医院
 (東京都新宿区)
 歯科衛生士スタディグループ
 奥山会主宰
 歯科衛生士 奥山 洋美

*本記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果等を保証するものではありません。ご使用の際は、添付文書等をよくお読みください。
 記載されている内容・価格は予告なく変更される場合があります。無断転載禁止

お問い合わせは



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
 URL : <https://www.crossf.com> E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元：株式会社吉田製作所