


再根管治療専用ファイル

HyFlex™ Remover

NEW

ハイフレックス・リムーバー

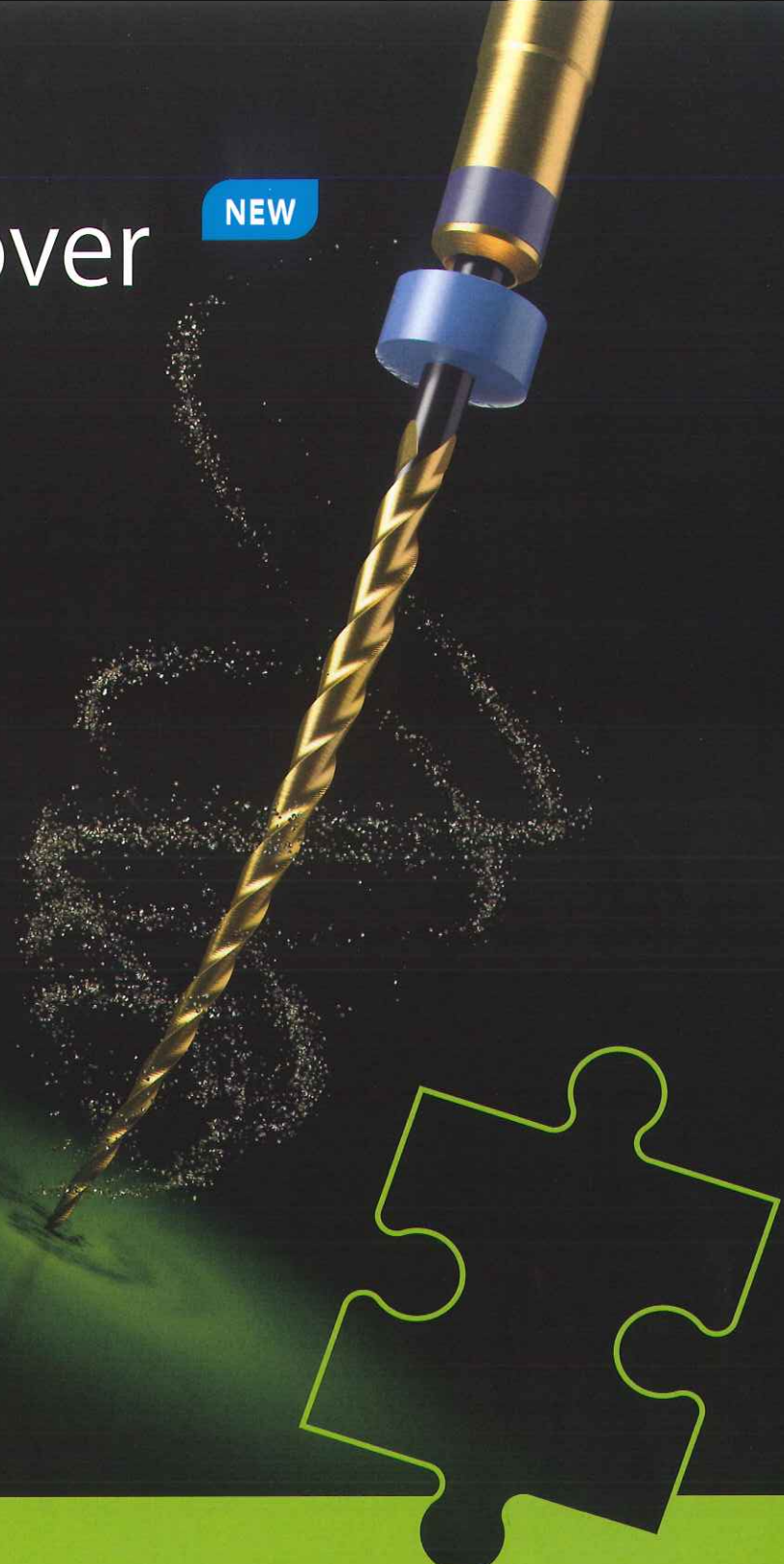

ガッタパーチャー除去・ワンファイルシステム

- ・ファイル1本で根管充填材を除去
- ・根管の解剖学的形態に追従する柔軟性を有し、多様な根管の充填材の除去が可能
- ・非切削状の先端のため根管壁を傷付けない設計
- ・溶剤不要で効率的

 COLTENE

優れたクロス・セクション工程により

切削力と柔軟性を兼ね備えたガッタパーチャー除去ファイルを実現

NEW

コルテンの新しく導入した精密製造技術により

NiTiワイヤーの直径最小化 (1mm) を実現 >>> よりMIな治療が可能に



非対称

断面形状
トリプルヘリックス

対称



HyFlex Remover 使用手順

充填材が根尖までである場合

HyFlex EDM
Orifice opener
25/.12

HyFlex
Remover
30/.07



400 rpm
Max torque 2.5 N.cm

400-800 rpm
Max torque 2.5 N.cm

充填材がアンダーの場合

HyFlex EDM
Orifice opener
25/.12

HyFlex
Remover
30/.07



400 rpm
Max torque 2.5 N.cm

400-800 rpm
Max torque 2.5 N.cm

ガッタパーチャ除去後は、コルテン社製HyFlex CM・EDM NiTiファイルで残り3mmのガッタパーチャを除去し、再拡大形成を行ってください。

より解剖学的な再根管治療が可能に

ポイント① 従来品より柔軟性と切削除去効率を向上させた熱処理NiTiワイヤーを使用

ポイント② 歯頸部をより保護する直径1mm NiTiワイヤーを使用

サイズ：30/.07 (19mm / 23mm)
正回転：400-800 rpm
トルク：2.5 N.cm
単回使用



熱処理NiTiワイヤー使用



ORDER INFORMATION

HyFlex Remover, 5 pcs

30/.07 Remover File



刃部の長さ

19mm 23mm

60023649 60023648

15.5mm 18.5mm

販売名：NiTiロータリファイルHyFlex滅菌パッケージ 医療機器認証番号：228A08Z100013200

販売業者

東京歯科産業株式会社

東京本社：〒101-0021
東京都千代田区外神田6-10-5
TEL:03-3831-0176(代)/FAX:03-3835-8254
大阪支店/名古屋営業所/九州支店

選任製造販売業者

AJMD 株式会社
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-4-5
真光ビルディング
TEL:03-5614-0733
FAX:03-5614-0734

www.coltene.com



COLTENE