

口腔粘膜の傷口をカバーし保護する

# バトラー マウスベール お口の液体絆創膏

Mouth Veil Oral Liquid Bandage



# BUTLER

# 口腔粘膜、気になる傷口のケアに 傷口をカバーして保護するお口の液体絆創膏

## 口腔粘膜の傷による悩み



違和感がつらい



食べづらい  
飲み込みづらい



話しづらい

- 口腔粘膜に傷があると、お口を動かすことで刺激が伝わり違和感が生じます。
- 食べづらい、話しづらいなど日常動作に影響を与え、日常生活に支障をきたすことがあります。

## 口腔粘膜の傷口をカバーしてバリア デリケートな傷口を保護して、日常生活をサポート



※内容物のイメージ画像


- とろみのある液体が口腔粘膜に付着し、傷口をカバーします。

傷口の状態



傷表面に神経終末が露出し、知覚が亢進している状態。外部からの刺激で痛みを誘発します。

カバーリングイメージ

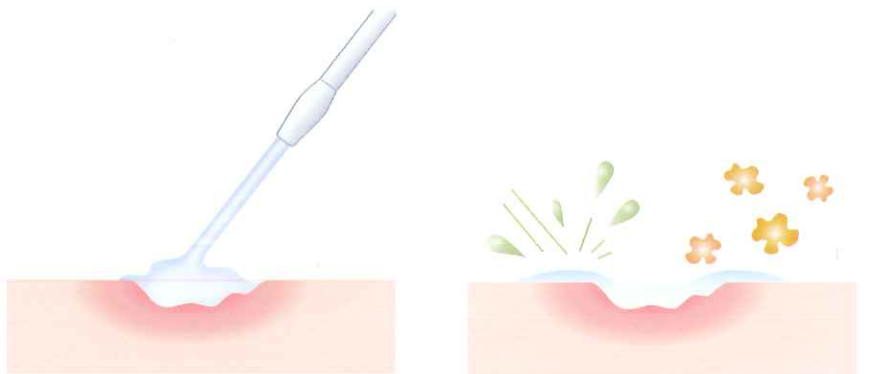

スプレーすると、とろみのある液体が口腔粘膜に付着し、傷表面を覆って保護します。

## 製品特長

- ▶ とろみのある液体が傷表面を覆って保護する口腔専用絆創膏。
- ▶ 口内炎の部位、義歯による創傷部位、歯科矯正装置などによる擦れ傷、やけどなど様々な口腔粘膜の傷にご使用いただけます。
- ▶ 口腔内に使用しやすいスプレータイプ、長いノズルで気になる所にもしっかり届きます。




ほのかな  
シトラスの香り

低刺激  
ノンアルコールタイプ

## 使用方法

- 1 キャップを外し、ノズルを装着します。
- 2 ノズルを口腔粘膜の傷口に向け、1回に3噴射、1日3回使用します。  
スプレー時は、ノズルの先端が口腔粘膜に直接触れないように使用します。
- 3 使用后、ノズル先端を紙や布でふき取ります。

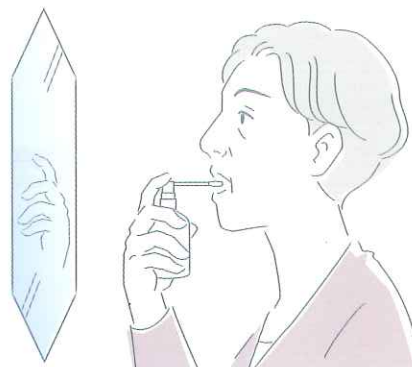

- 本剤は他の人と共用しないでください。
- 塗布後1時間は飲食を控えてください。
- こどもに使用する場合、保護者等の監督の下に使用するか、大人が操作してください。
- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人は使用しないでください。  
【成分】 水、ポリビニルピロリドン、タウリン、グルコン酸亜鉛、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、サッカリンNa、プルラン
- 連続して30日を超えて使用しないでください。



バトラー マウスベール お口の液体絆創膏の使い方を  
動画で解説しています。



SUNSTAR

**BUTLER** 

**バトラー** 粘膜保護  
**マウスベール**  
**お口の液体絆創膏**

Mouth Veil Oral Liquid Bandage

ほのかなシトラスの香り

お口のキズをカバーし  
**保護する**

90mL スプレータイプ

Butler provides the professional and optimal oral care solution for various kinds of mouth conditions.



分 類	一般医療機器
一 般 的 名 称	液体包帯
販 売 名	バトラー マウスベール お口の液体絆創膏
届 出 番 号	27B1X00134000003
内 容 量	90mL
JAN コ ー ド	 49 01616 01241 7

※本品は一般医療機器「液体包帯」であり、保険請求はできません。

商品についてのご質問・ご不明な点は下記へお問い合わせください。

## サンスター株式会社

〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3番1号

TEL:072-682-4733

FAX:072-684-5669