

入れ歯の キズ取りクリーム

Flex Shine Pro Paste 患者用

こんなストレスを
感じている患者さんに

- ・ザラザラが気になる…
- ・キズに菌が繁殖してそう…
- ・透明感がなくなってきた…
- ・ツルツル感を維持したい…
- ・キズだけならセルフケアで
なんとかしたい…

ご使用方法

※1週間に1回のお手入れを推奨



お手入れ前に入れ歯の水気を拭き
取ってください。



キズやザラつきが気になる部分を
キッチンペーパー等の丈夫な素材
で本品を適量拭い、ていねいにみ
がいてください。



入れ歯をみがき終わったら中性の
食器用洗剤で油分を取り、水で
十分に洗い流して下さい。
その後は通法通りに義歯洗浄剤
にてお手入れください。



磨いてピカッと
ザラつきを解消
自宅で簡単セルフケア

Full denture
Partial denture
Non-clasp denture



内容量：7g
※週1回のご使用で約3カ月分
患者価格
¥1,500 (税別)

一般医療機器 歯科用研磨器材
27B3X00139000089

DAIEI
Angel 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897

※本製品の仕様およびデザインは予告なく
変更となる場合がございます。

義歯専用

仕上げ用艶出し研磨剤

Flex Polishing series

Flex Shine Pro

Full denture

Partial denture

Non-clasp denture

フレックスシャインプロはアクリルレジンから軟質の熱可塑性レジンまで全ての義歯用レジン最終仕上げにご使用いただける研磨剤です。技工レース用の固形タイプとチェアサイド用のペーストタイプをご用意しています。



Flex Polishing series

Flex Shine Pro

フレックスシャインプロ



200g 入



レース用



80g 入

一般医療機器 歯科用研磨器材
27B3X00139000088

主にラボサイドでご使用いただくレース用固形タイプです。レースバフとの馴染みも良く、少量で滑沢なツヤが得られます。

Flex Shine Pro Paste

フレックスシャインプロペースト



50g 入

一般医療機器 歯科用研磨器材
27B3X00139000089



HP 用

主にチェアサイドでご使用いただくHP用のペーストタイプです。油分多めで高回転でも焼き付きが起こりにくく、短時間で滑沢なツヤが得られます。

※本製品の仕様およびデザインは予告なく変更となる場合がございます。

DAIEI Angel 大栄歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510ビル8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市千種区今池南2-9-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前3-10-23 第5西田ビル2C TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897