

# デントロ クリーンムース

## 入れ歯洗浄剤（歯科用）



Dentro Clean Mousse

デントロ クリーンムースは義歯安定剤の除去にすぐれたムースタイプの入歯洗浄剤です。

特にクリームタイプの安定剤を溶解除去し、清掃が容易になります。フルデンチャー、パーシャルデンチャー、ノンクラスプデンチャー、マウスピース、矯正用リテーナー等、幅広い口腔内装着具で安心してお使い頂けます。



**Dentro Clean Mousse**  
デントロクリーンムース

Dentro Clean Mousse  
デントロクリーンムース

# デントロ クリーンムース

## 入れ歯洗浄剤（歯科用）

ムースタイプ（細かい泡状）なので、ブラッシングするだけで、落ちにくい汚れも細かい泡が包み込んで洗浄し、不快な「ヌメリ」もスッキリします。IPMP（イソプロピルメチルフェノール）が口腔内の細菌から真菌までしっかりと除菌します。爽やかなクールミント香料の配合により、洗浄後、入れ歯の装着は爽快です。

入れ歯安定剤  
強力洗浄！



Dentro Clean Mousse  
デントロクリーンムース

Dentro Clean Mousse  
デントロクリーンムース

### ■ 使用方法

使用後の入れ歯を軽く水洗いしてください。



デントロクリーンムースのボトルをよく振ってから、入れ歯にかけてください。



上顎の総入れ歯で  
2 プッシュ、  
部分入れ歯で  
1 プッシュが目安です。



約 60 秒間ブラシなどでみがいでください。  
汚れがひどい場合は  
ムースをかけてから、  
3～5分後に  
ブラッシングをすると  
効果的です。



流水でしっかりとすすぎます。




### ■ 注意事項

口や目に入れないでください。  
直接口内で使用しないでください。  
万一飲み込んだり、目に入った場合は、  
水で洗い流した後、医師に相談してください。  
入れ歯の洗浄以外には使用しないでください。  
直射日光、高温の場所を避け、常温で保管してください。

### 製品案内


デントロ クリーンムース 1 本 (150ml)  
患者参考価格 1,200 円 (税別) (1 本)

### Test 1

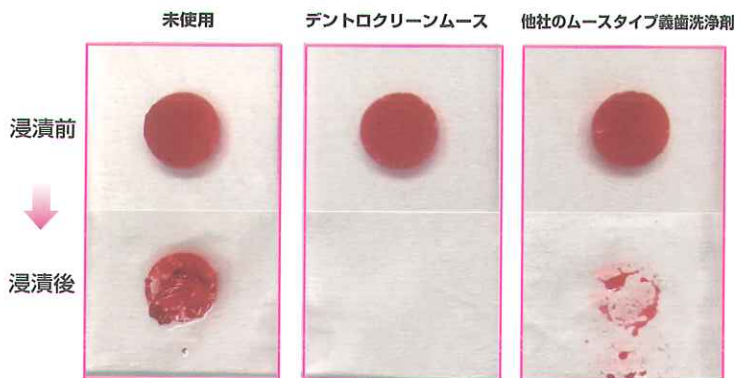

- 用意したアクリル板に着色した市販の義歯安定剤をモールドを使用して均一に伸ばした。
- 約 23℃ に調整した水、デントロクリーンムース、市販の義歯洗浄剤に浸漬した。
- 浸漬後、アクリル板を引き上げて試料上に残った義歯安定剤を撮影した。

### Test 2

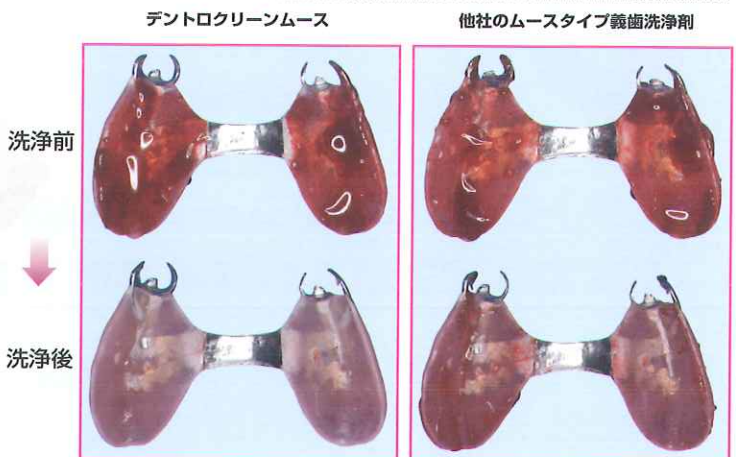

- 用意した部分床義歯に着色した市販の義歯安定剤を手指にて薄く延した。
- 常温の水道水 150ml に 5 分間浸漬した。
- デントロクリーンムースと市販の義歯洗浄剤を義歯上に塗布した。
- 義歯ブラシにて 30 回擦った後、流水でかるく流したものを撮影した。

資料提供:

鹿児島大学大学院歯学総合研究科 先進治療科学専攻 顎顔面機能再建学講座 口腔顎顔面補綴学分野  
原田 佳枝 先生

販売元

**Dentronics** 株式会社 デントロニクス

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-30-15 TEL(03)3209-7121 FAX(03)3232-6764  
www.dentronics.co.jp

製造販売元

株式会社 デントロケミカル

〒198-0023 東京都青梅市今井 3-2-12 TEL0428-30-7450

\* 写真の色は、印刷のため実物と多少異なることがあります。  
\* 仕様・外観・価格は、予告なく変更することがあります。