




株式会社

大平製作所

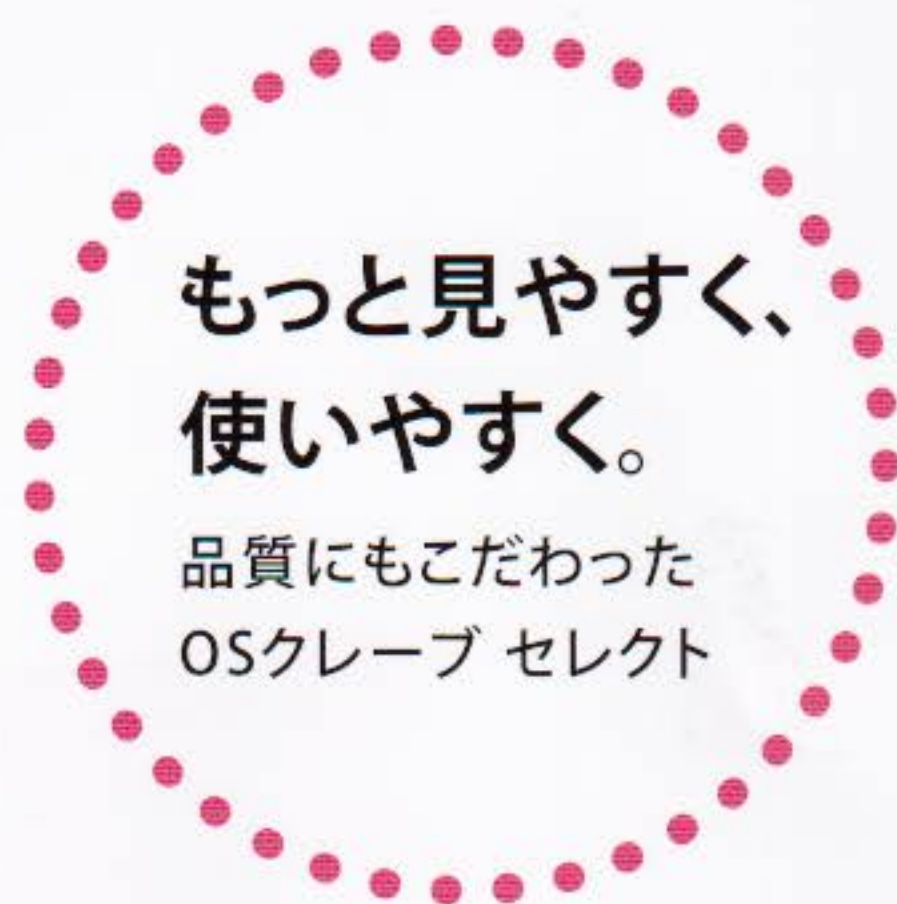


OS-907 SELECT

小型包装品用 高压蒸気滅菌器

使うたびに実感できる、操作性のよさと ストレスフリーなわかりやすさ。

より細かい時間設定ができ、器具にやさしい配慮も。
お客さまのご要望を取り入れた新機能が満載です。

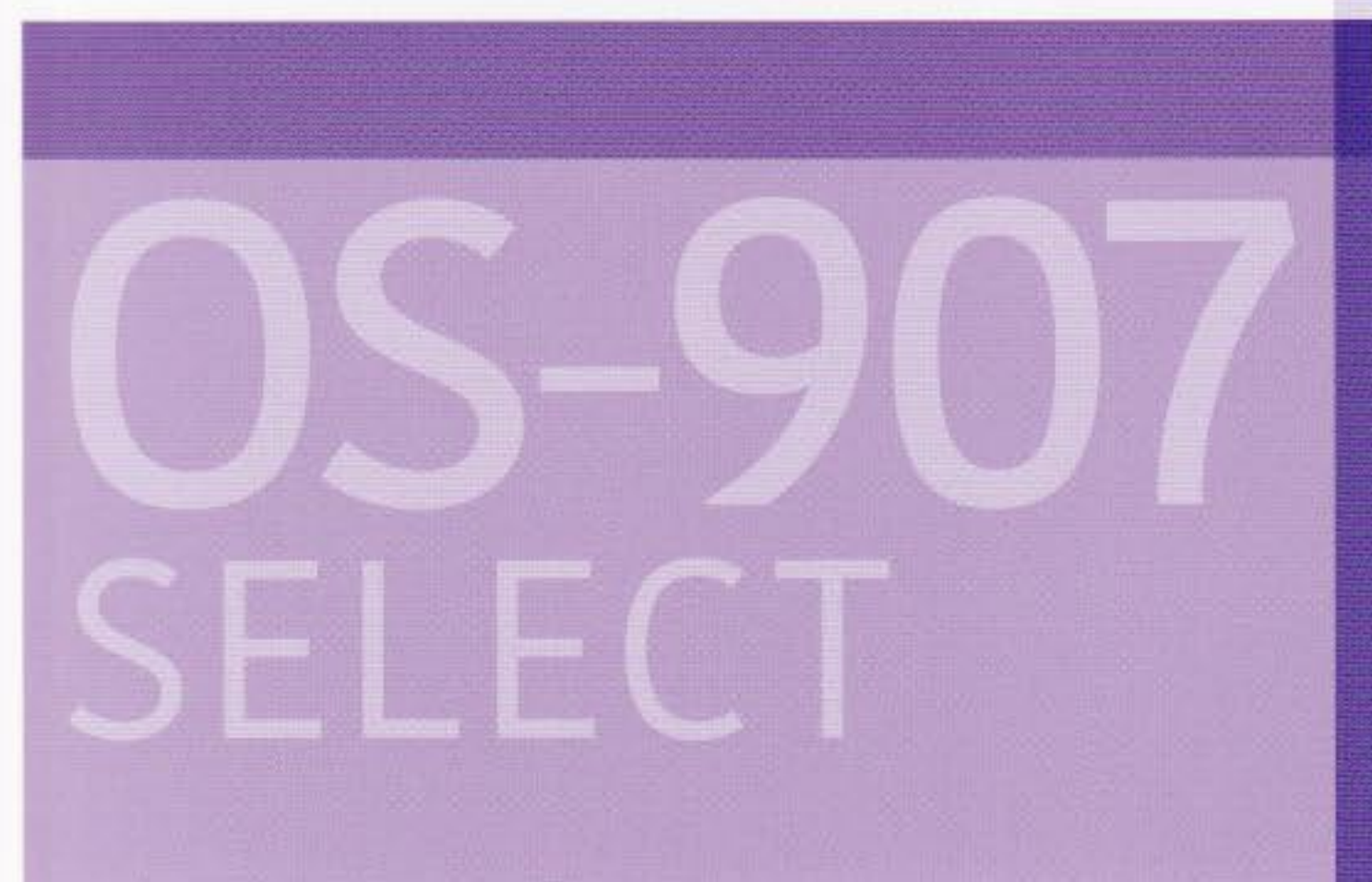

見やすい操作パネル

大きなディスプレイとシンプルなボタン操作で、
どなたでも使いやすいデザインです。



大画面ディスプレイ

大きな画面と漢字・ひらがな表示で、より見やすくなりました。選択した設定値や実行中の工程、異常状態などの情報が表示されます。

選ぶ Nモードボタン

包装品用・未包装品用の切り替え

包装品用(通常モード)、未包装品用(Nモード)の切り替えができます。
Nモードでは、よりスピーディーにプログラムが完了します。

選ぶ 予約ボタン

ご希望の完了日時を10分単位で予約設定でき、予約診療などに対応します。

選ぶ 再乾燥ボタン

追加で乾燥する場合は、再乾燥ボタンを押すだけ。時間は5～60分で設定可能です。

選ぶ 滅菌温度ボタン

3種類の温度設定+1分単位で時間設定

新たに135℃を加えた3種類の温度から選択でき、1分単位で時間設定が可能です。乾燥時間も1分単位で60分まで設定できます。

- 121℃: 20～40分
- 133℃: 10～30分
- 135℃: 5～20分
- 乾燥時間: 0～60分

使いやすい貯水タンク

貯水タンクが前方にあり、給水しやすくなっています。

水道水のほか、精製水なども使用できます。

※水道水以外を使用する場合は、10:1の割合で水道水を混ぜてください。

小型包装品用
高圧蒸気滅菌器
OSクレープ セレクト

OS-907 SELECT



器具にやさしい乾燥温度

選択した滅菌温度以上にならないよう乾燥温度が制御されているため、大切な器具類を傷めにくくなっています。

※被滅菌物の耐熱性はあらかじめご確認ください。

2回目からはスタートボタンを押すだけ

初回にプログラムを設定・選択すると、2回目以降はスタートボタンを押すだけでドアが自動的にロックされ、乾燥終了までフルオートで行います。

ドアは自動で開閉

ドア内部にモーターが内蔵されており、プログラムの設定に合わせて自動的に開閉&ロックします。

「丈夫で長持ち」、安心の堅牢設計




大平製作所は、1920年(大正9年)の創業以来、1世紀にわたって衛生的な診療環境づくりに貢献してきたオートクレープ専門メーカーです。厳選した高品質の素材のみを使用し、熟練した職人が丁寧に製造。末永くご愛用いただけます。

アフターフォローも万全



ご購入後はきめ細かくフォローさせていただき、万一のトラブルにも迅速に対応いたします。メンテナンスだけでなく、ご質問やお困りごとなど、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

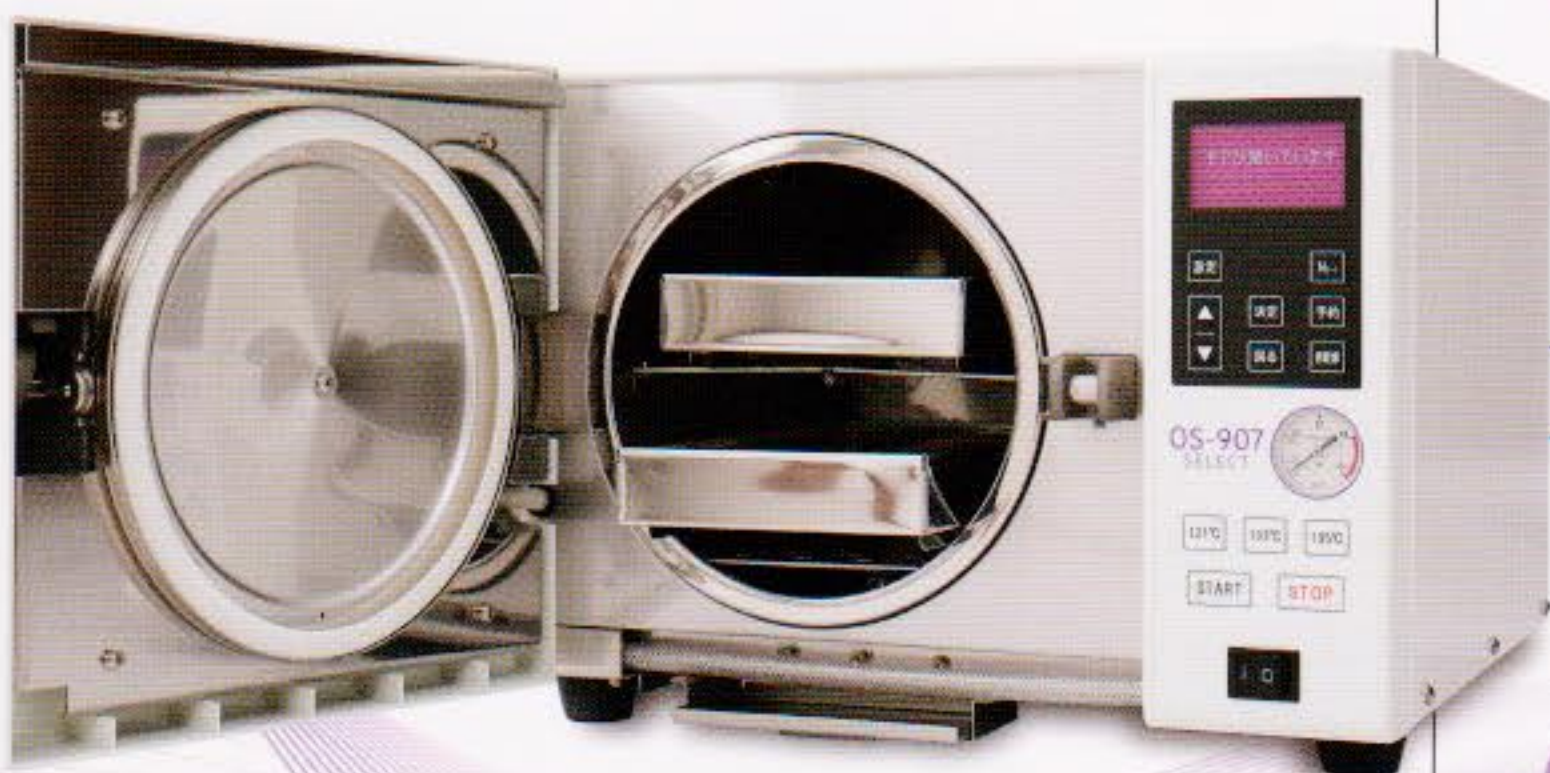

仕 様

製品名	OS-907 Select (セレクト)
定 格	交流単相:100V・周波数:50/60Hz
一般的名称	小型包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器クラス	クラスⅡ 特定保守管理医療機器
医療機器認証番号	301AGBZX00052000
消費電力	1150W
外形寸法	W470 × D530 × H342mm
重 量	約27kg
チャンパー寸法	φ241(入口寸法φ214) × D350mm
貯水タンク容量	3.2L
滅菌温度	121℃・133℃・135℃
滅菌時間	121℃: 20～40分・133℃: 10～30分・135℃: 5～20分 (各1分単位で設定可能)
乾燥時間	0～60分 (1分単位で設定可能)
再乾燥時間	5～60分 (1分単位で設定可能)
最高使用圧力	0.25MPa
ドアロック方式	自動ドアロック
安全装置	圧力安全弁・過熱防止サーモスタット・過熱防止パイメタル・電力ヒューズ
付属品	底板・棚板・パット・取っ手

外形寸法



付属品



底板



棚板(歯科用のみ)



パット(歯科用×2、医科用×1)



取っ手

オプション



バスケット



PSTレー専用パット



角カスト



丸カスト

専用洗浄液



OSクリア

製造販売元



株式会社 大平製作所

〒720-0074 広島県福山市北本庄1-8-14
Tel. 084-924-0650 Fax. 084-925-5288
<http://www.os-clave.com>

販売代理店



製品改良のため、予告なしに仕様・デザインを変更することがあります。ご了承ください。