

歯科用ラバーダム 総合カタログ

World of Dental Dam

デンタルダム

A
clever
move

ブランド名が変更します!!
コルテン・デンタルダム

HYSOLATE
Dental Dam

ハイジエニックデンタルダム → **新** ハイソレートデンタルダム
HYGENIC HYSOLATE



感染防止対策



ミラー防湿・器具の誤飲防止



安全・明瞭な術野の確保

全製品

NEW


パウダーフリー

COLTENE

症例別推奨例

デンタルダム

弊社のデンタルダムは様々な症例に対応できるよう多数の種類を取り揃えております。色・厚み・弾性の強さ・サイズ・アレルギー性の無いタイプ等、各症例・患者に合わせたデンタルダムをご選択いただけます。

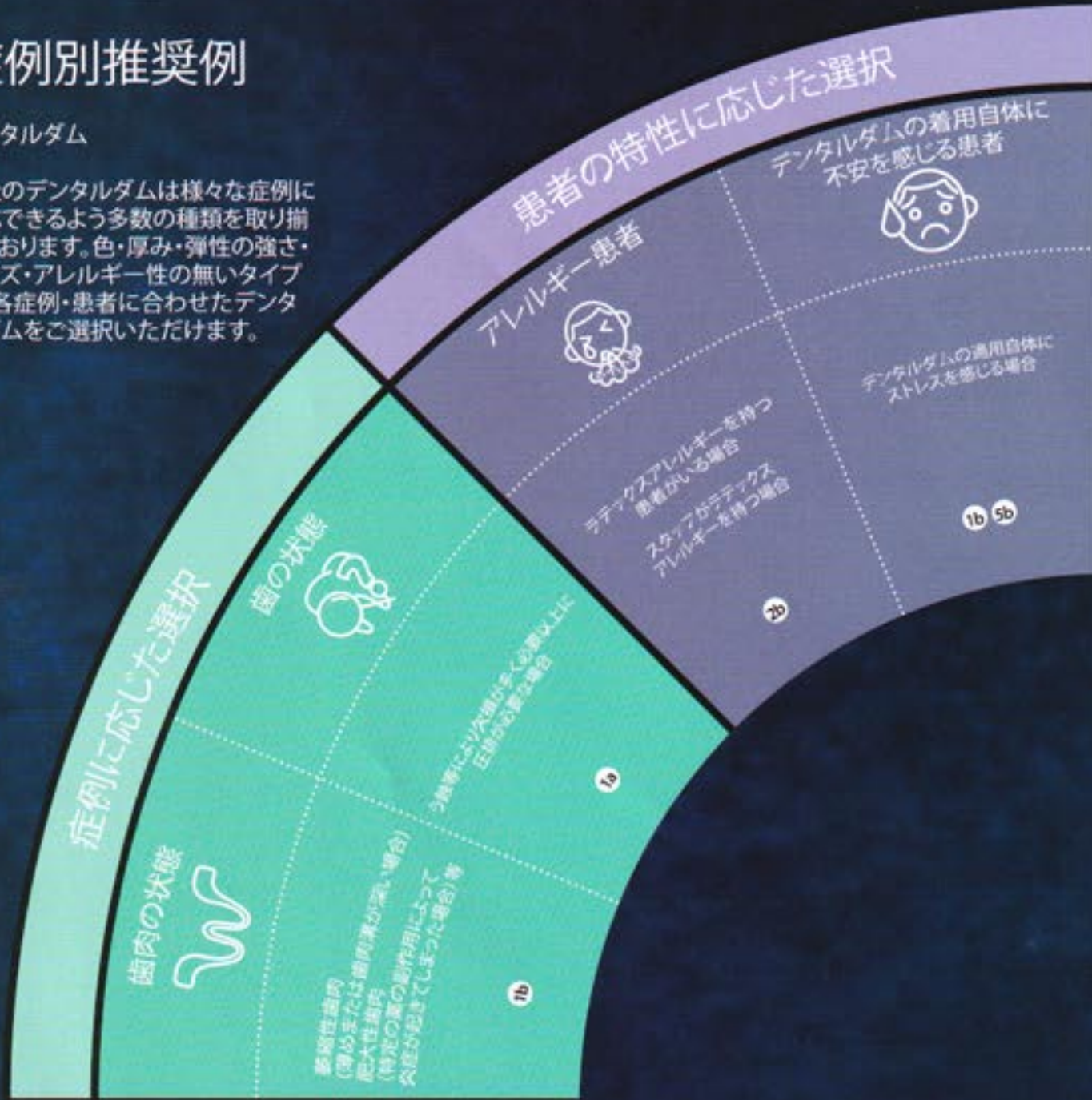

推奨種類

圧排

- ①a ラテックス製のデンタルダムをご使用ください。厚めであればあるほど歯肉圧排が容易です。
- ①b 薄めで柔らかいデンタルダムをご使用ください。圧排が少なく粘膜や歯肉に対してもストレスが少ないです。

アレルギー患者

- ②a パウダーフリータイプのデンタルダムをご使用ください。ラテックスたんぱく質によるアレルギー誘発を低減させることができます。
- ②b アレルギー反応が既にみられる場合は、ラテックスフリータイプをご使用ください。

耐性

- ③ ラテックス製デンタルダムを使用してください。一番耐性がある素材です。

色調別選択

- ④a 心理学に基づき、落ち着いた効果を得るために明るく心地よい色を利用してください。
- ④b 黒のデンタルダムをご使用ください。目にも優しくまた、術野の色調のコントラストがくっきりします。

サイズと適用

- ⑤a 127 × 127 mmの子供用サイズをご使用ください。
- ⑤b フレーム付きのフレキシダムをご使用ください。患者様への負担軽減になります。

一般推奨

- ・デンタルダムを少しカットしてあげると鼻呼吸ができ患者様が楽になります。
- ・Parotisroll(コットンロール)を上唇とダムの間においてあげる事でスペースを作ってください。
- ・デンタルダムナプキンを敷いてあげることでダムと肌の直接の接触を防げます。



パウダーフリー* デンタルダムセレクション

色・厚み・サイズ 豊富な種類、症例に応じてマッチ



パンチで開けた穴を引き延ばしても亀裂が入らない。



複数回引っ張ってもヨレない
(伸長度170%で30回引っ張った結果)




優れた引っ張り強度



弾性・引っ張り強度試験

ROEKO Flexi Dam Non-Latexは、引っ張り強度は平均的だが、高い弾性を示しています。そのためROEKO Flexi Dam Non-Latexは歯肉をあまり圧排しない方が良い症例に適しています。

Dental Dam Non-LatexはFlexi Damに比べると、高い引っ張り強度を示しています。そのため、ラテックスアレルギーの患者で尚且つ圧排が必要なケースに適しています。LatexDentalDamが一番高い引っ張り強度=圧排強さを示しているため、歯肉圧排が必要なすべてのケースに活用できます。

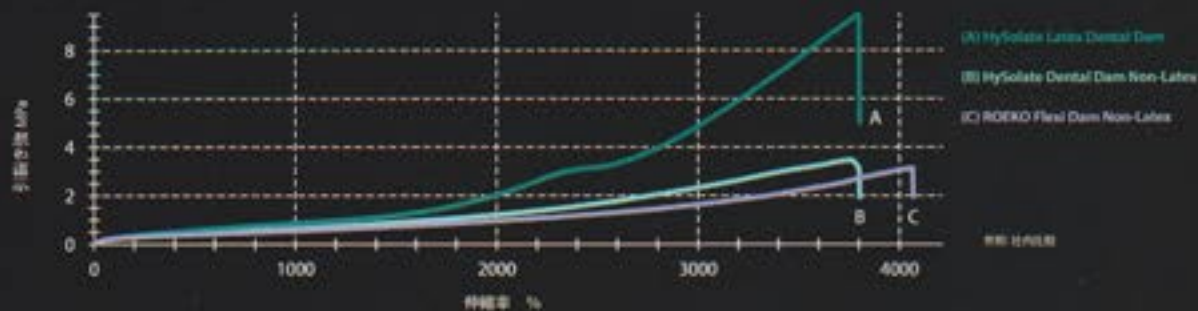

HySolate Dental Dam Non-Latex (ラテックスフリー)


サイズ	色	厚み	枚数	価格
		メディウム		
6インチ 152×152	グリーン	H09105	15	4,500円
		☎	75	
5インチ	グリーン	H09928	15	4,500円

HySolate Latex Dental Dam (ラテックス・パウダーフリー*)

*パウダー量 < 50µg/dm²
*プロテイン量 < 2mg/シート

サイズ	色	厚み				枚数
		シン	ミディウム	ヘビー	エクストラヘビー	
6インチ 152×152	グリーン	60034418	60034419	60034420	60034421	36
		-	☎	-	-	360
	ブラック	60031351	60031352	60031353	60031354	36
		-	☎	-	-	360
	ブルー	-	60034442	60034443	-	36
ライト	60034427	60034428	60034429	60034430	36	
	-	☎	-	-	360	
5インチ 127×127	グリーン	60034414	60034415	60034416	60034417	52
		-	☎	-	-	364
	ブルー	-	60034441	-	-	52
	ライト	60034424	60034425	60034426	-	52
-		☎	-	-	364	

	厚み表	価格
シン	約 0.15mm	3,500円
ミディウム	約 0.20mm	3,750円
ヘビー	約 0.25mm	4,800円
エクストラヘビー	約 0.30mm	4,800円

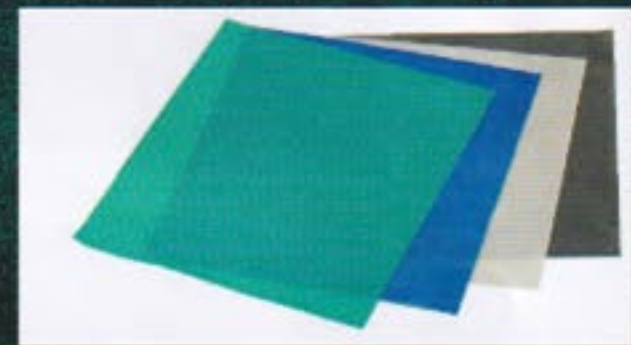

HySolate Fiesta Latex Dental Dam (ラテックス・パウダーフリー*)

サイズ	色	厚み			枚数
		シン	ミディウム	ヘビー	
6インチ 152×152	ピンク ラベンダー ライトブルー	60034433	60034436	60034438	36
		-	☎	-	360
5インチ 127×127	ピンク ラベンダー ライトブルー	60034434	60034435	☎	52
		-	☎	-	364



- ・3色同梱のため診療ごとに色分けが可能
- ・Fragrance付き

Brinker Clamp Tissue Retractor Clamp

歯肉圧排用クランプ

歯肉縁下にカリエスがある場合、従来のクランプでは歯肉を傷つける可能性があります。Brinker Clamp は歯肉への圧排を容易にすることができます。

製品番号 # H01054
 内容: プリンカークランプセット (6個入れ) #B1, #B2, #B3, #B4, #B5, #B6

セット価格 10,500円

単品
 # H01048
 # H01049
 # H01050
 # H01051
 # H01052
 # H01053

推奨
 B-1 下顎 白歯用
 B-2 上顎 左側白歯用
 B-3 上顎 右側白歯用
 B-4 前歯・小白歯
 B-5 歯頸部疾患の修復時におけるすべての歯に対応
 B-6 歯頸部疾患の修復時におけるすべての歯に対応

単品価格 1,950円



EDUCATION
 ONE STEP AHEAD
 Upgrade Dentistry

圧排エフェクト



プリンカークランプ



従来クランプ

写真提供: 辻本デンタルオフィス 辻本真規先生
 使用Brinker Clampサイズ B-4



写真提供: 宮地歯科医院 宮地秀彦先生
 使用Brinker Clampサイズ B-2



写真提供: 吉松歯科医院 吉松宏泰先生
 使用Brinker Clampサイズ B-4



写真提供: 宮地歯科医院 宮地秀彦先生
 使用Brinker Clampサイズ B-5



写真提供: 辻本デンタルオフィス
 辻本真規先生
 使用Brinker Clampサイズ B-5

ACCESSORIES

関連製品

デンタルダムテンプレート, 1枚
 5インチ用
 H01440

6インチ用
 H01441

価格
 1,380円



デンタルダムナブキン, 50枚
 フレーム 6/5インチ両用
 H01415

価格
 3,800円



【ロエコ・ラテックスフリーデンタルダム・その他デンタルダム関連製品】

各種製品により販売元が異なりますので、ご希望の製品ございましたら記載の各社ご連絡先までお問合せくださいませ。

ウェジェットー かんたんクランプ (ラテックス・ラテックスフリー)

サイズ	長さ	色	商品コード
LATEX			
ラテックス S 1.5mm	2.1 m	イエロー	29701 (H06522)
ラテックス L 1.8mm		オレンジ	29702 (H06523)
NON-LATEX			
ノン・ラテックス S 1.5mm	2.1 m	グリーン	29703 (H06524)
ノン・ラテックス L 1.8mm		ブルー	29704 (H06525)



ロエコ フレキシダム (ラテックスフリー)

サイズ	色	厚み	枚数
150 x 150		ミディアム	
	パープル	35241 (390035)	30
	ブルー	35243 (390033)	

お問い合わせ先:株式会社茂久田商会
E-Mail: info@mokuda.co.jp

それぞれに色分けされたステンレススチール製で、無反射のマットタイプの羽付クランプです。歯科用ラバーダムを固定する為に使用します。

カラークランプ 羽付マット Color Matte Finish Winged Clamps

Fiesta Color Coded Matte Finish Winged Clamps

#2 下顎小白歯 (フラットタイプ)	H09957	#9 前歯 (1-3 番用)	H09962
#2A 大型の小白歯 (フラットタイプ)	H09958	#12A 下顎大白歯	H09963
#4 小型の大白歯 (上顎大白歯 フラットタイプ)	H09959	滑り止めのギザ付き 13A とペア	
#7 下顎大白歯 (フラットタイプ)	H09960	#13A 下顎大白歯	H09964
#8A 大白歯 (湾曲の大きなタイプ)	H09961	滑り止めのギザ付き 12A とペア	
歯肉縁下を把持できる		#14A 大白歯 部分萌出や形態異常の大白歯用	H09965

包装:1

カラークランプ 羽無マット Color Matte Finish Wingless Clamps

Fiesta Color Coded Matte Finish Wingless Clamps

#W2 下顎小白歯 (フラットタイプ)	H02794	#W8A 大白歯 (湾曲の大きなタイプ)	H02799
#W2A 大型の小白歯 (フラットタイプ)	H02795	歯肉縁下を把持できる	
#W3 下顎大白歯 (小型の大白歯用のフラットタイプ)	H02796	#W9 前歯 (1-3 番用)	H02800
#W7 下顎大白歯、上顎 8 番大白歯 (フラットタイプ)	H02797	#W 14A 大白歯	H02802
		部分萌出や形態異常の大白歯用	
#W8 上顎大白歯	H02798	#W56 白歯全般	H02803

包装:1

デンタルダムフレーム

タイプ	サイズ	製品番号
Ostby plastic frame - X線透過性	6インチ	H00560
U-shaped plastic frame - X線透過性		H01414
U-shaped metal frame		H07083
U-shaped plastic frame - X線透過性	5インチ	H01416
U-shaped metal frame		H07082

製品番号

H01261 デンタルダムパンチ

製品番号

H01262 クランプ鉗子

お問い合わせ先:東京歯科産業株式会社
TEL: 03-3831-0176

BLACK EDITION ブラックエディション

新発売
2023年2月21日

- テンプレート印字で、作業効率UP!
- マットブラックのため、歯牙とのコントラストがくっきり!
- テンプレート印字(片面)・無地(片面)と両方あるので、症例に応じて使い分け可能!

- パウダーフリー

Ready to Punch
Dam-It, It's Easy



販売名:
デンタルダム
デンタルダム ラテックスフリー
ウェジェット ラテックス・ラテックスフリー
デンタルダムパンチ

医療機器届出番号:
1381X10231000103
1381X10231000145
1381X10231000144
1381X10231000128

販売業者
コルテンジャパン合同会社
〒190-0012
東京都立川市曙町2丁目25-1-2F
TEL: 042-595-6945/FAX: 042-595-6946
www.coltene.com

製造販売業者
AJMD 株式会社
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-4-5
真光ビルディング
TEL: 03-5614-0733
FAX: 03-5614-0734

販売名:
デンタルクランプ
カラークランプ
デンタルダムフレーム
歯科用クランプ鉗子

医療機器届出番号:
1381X10231000153
1381X10231000126
1381X10231000127
1381X10231000129

製造業者
Coltene/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
+1 330 916 8800
+1 330 916 7077
info.us@coltene.com

表示価格には消費税は含まれておりません。



COLTENE